


Maxi Twin

Daljinski upravljalnik




- | | |
|---|---------------------|
|  | Dvig |
|  | Spust |
|  | Nagnjeni položaj |
|  | Sedeči položaj |
|  | Zaprte noge okvirja |
|  | Odprte noge okvirja |

Zasilna zaustavitev

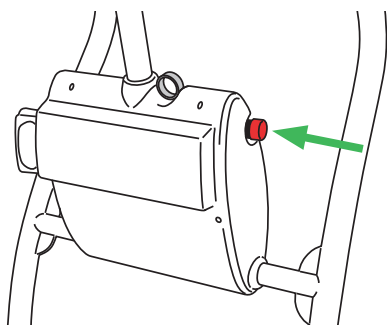


Pritisnite gumb ob strani pokrova sprožila.

Zasilno spuščanje

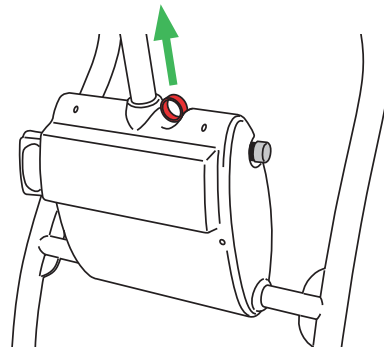


Povlecite gor obroček na vrhu pokrova sprožila.

Zavore

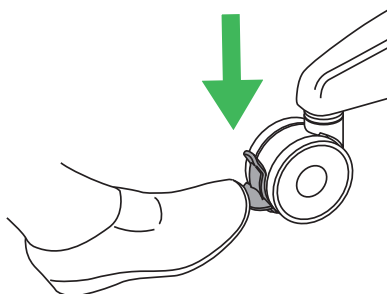


Aktivirajte zavoro.

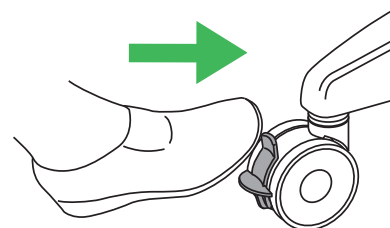


Sprostite zavoro.

Prilagodljiva širina nožic okvirja

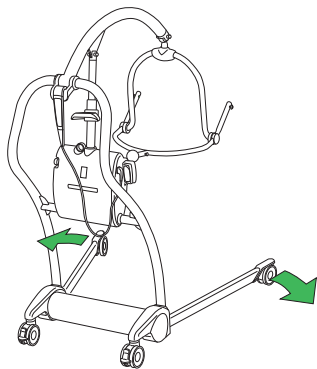



Pritisnite gumb, da odprete noge okvirja.

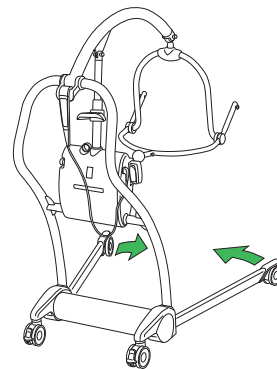



Pritisnite gumb, da zaprete noge okvirja.

Pripenjanje vreče

Vreča z zanko

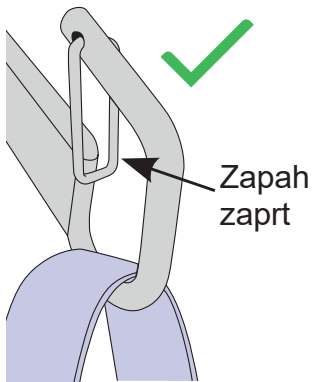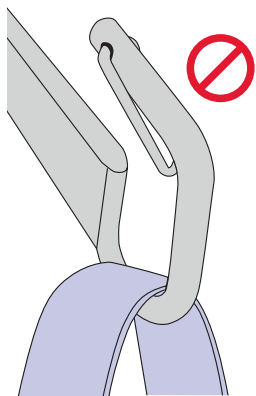


Vreča s sponko

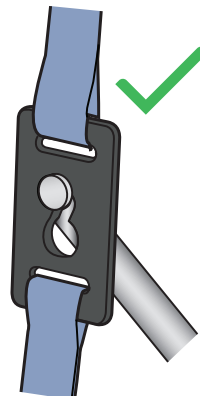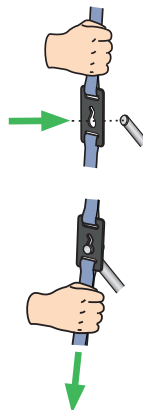



Odpenjanje vreče

Vreča z zanko

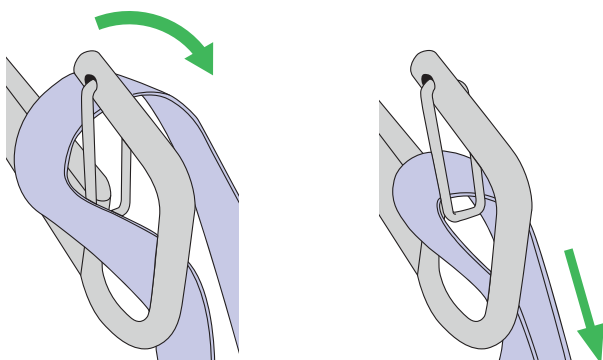

Eno stran zanke povlecite prek kljuke in navzdol.

Vreča s sponko

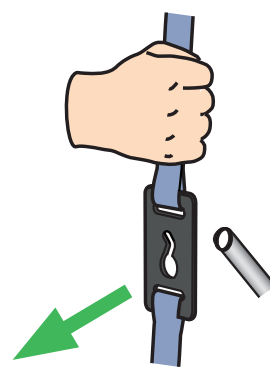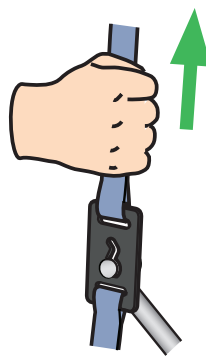

Povlecite pas navzgor in odstranite sponko.