

# Maxi Twin

## Điều khiển bằng tay



Nâng



Hạ



Tư thế nghiêng



Tư thế ngồi




Đóng chân khung gầm




Mở chân khung gầm

## Dừng khẩn cấp

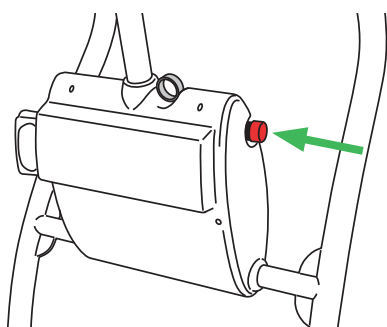


Nút bấm ở bên cạnh nắp bộ truyền động.

## Hạ khẩn cấp

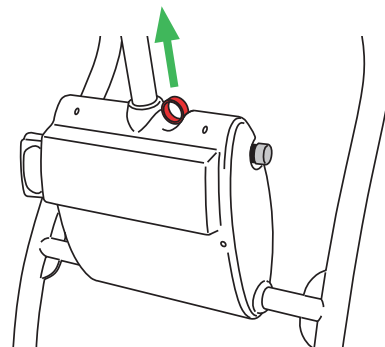


Kéo vòng lên phía trên nắp của bộ truyền động.

## Phanh

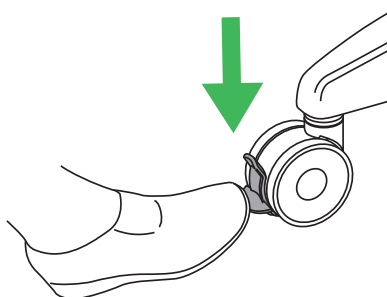


Đẩy bóp phanh.

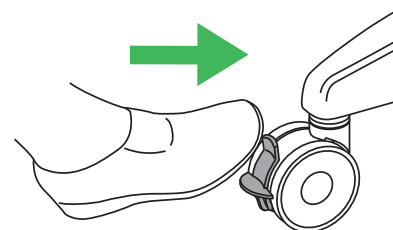


Nhả phanh.

## Chiều rộng có thể điều chỉnh của chân khung gầm

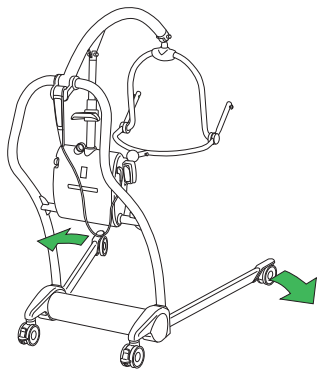



Nhấn nút để mở các chân khung gầm.

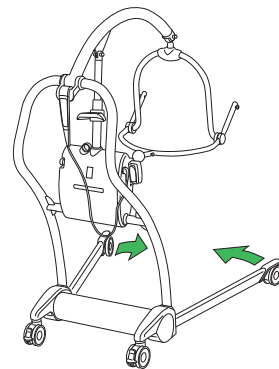



Nhấn nút để đóng các chân khung gầm.

## Gắn cằng treo

### Băng đai có vòng

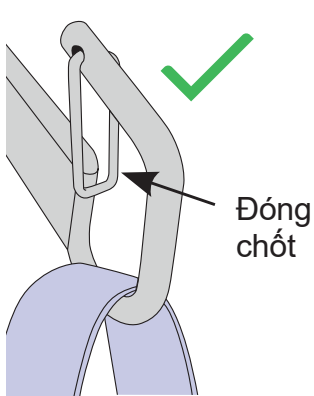
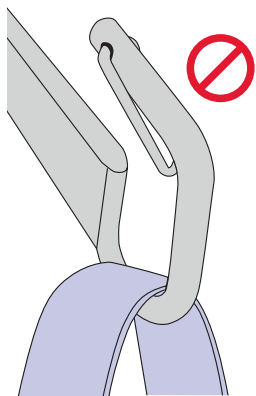


### Băng đai có kẹp

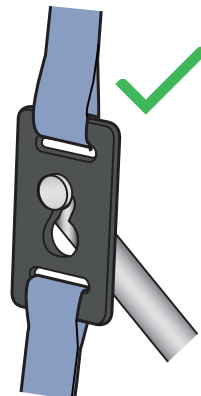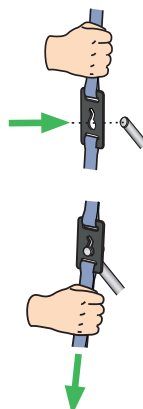



## Tháo cằng treo

### Băng đai có vòng

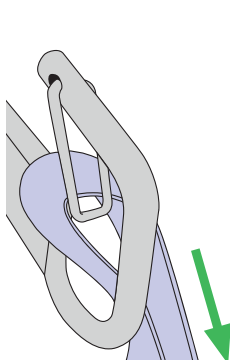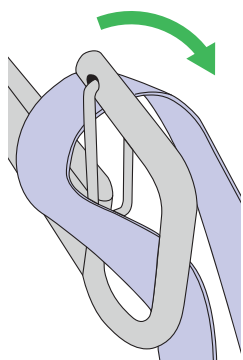

Kéo một bên của vòng qua móc và chốt cố định và kéo xuống.

### Băng đai có kẹp

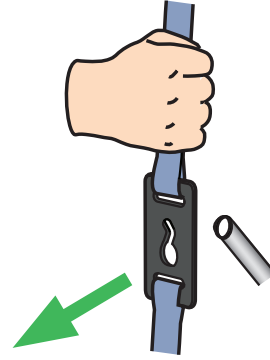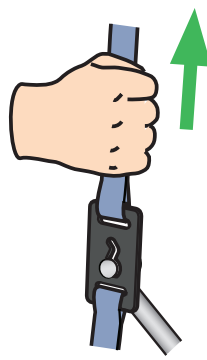

Kéo dây đeo lên và tháo clip.