

# Maxi Twin

## Kézvezérlő



Emelés



Leeresztés



Hátradöntött pozíció



Ülési pozíció




Vázlábak összezárása




Vázlábak szétnyitása

## Vészleállítás

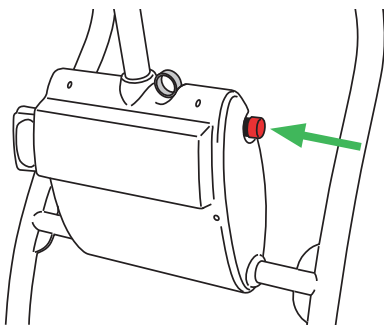


Nyomja meg a gombot az aktivátor burkolatának oldalán.

## Vészhelyzeti leeresztés

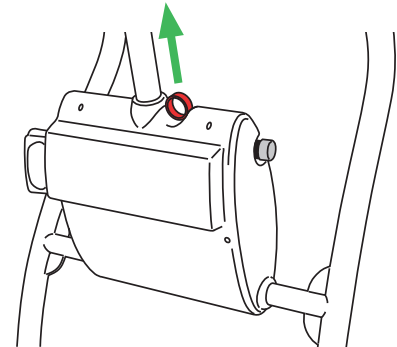


Húzza fel a gyűrűt az aktivátor burkolatának tetején.

## Fékek

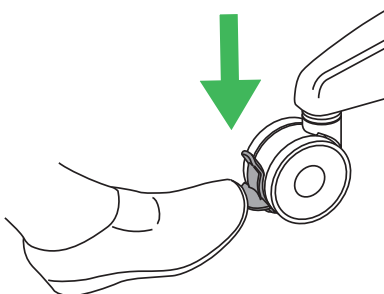


Lefékezés

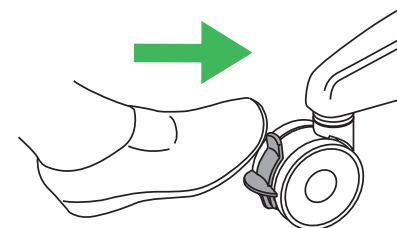


Fékkioldás

## Állítható szélességű vázlábak

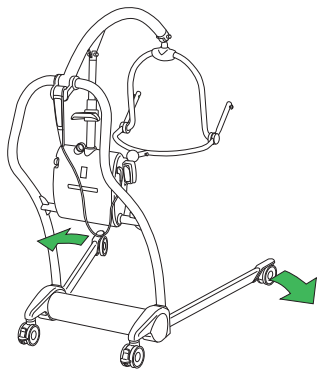



Nyomja meg a gombot a vázlábak szétnyításához.

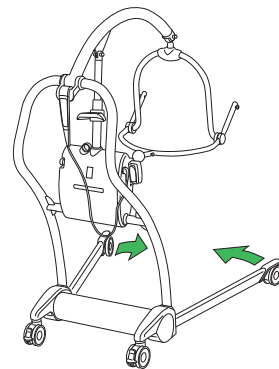



Nyomja meg a gombot a vázlábak összezárásához.

## Heveder rögzítése

### Akasztós heveder

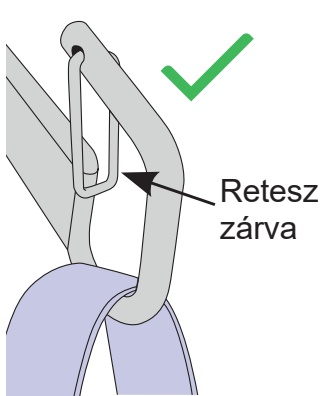
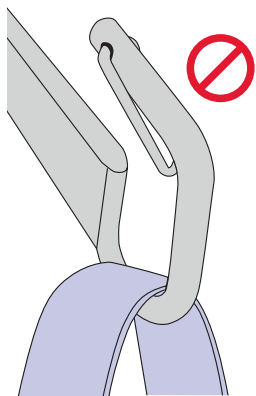


### Kulcslyuklemezkes heveder

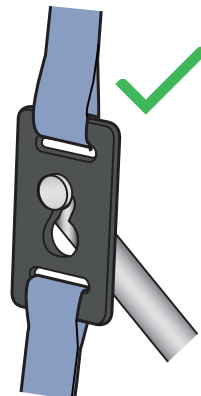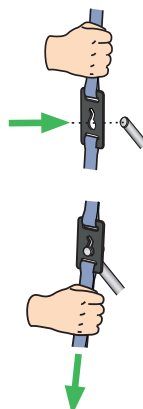



## Heveder leválasztása

### Akasztós heveder

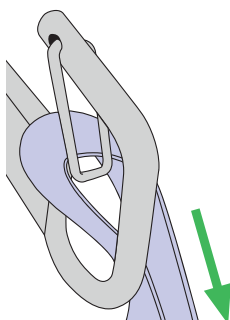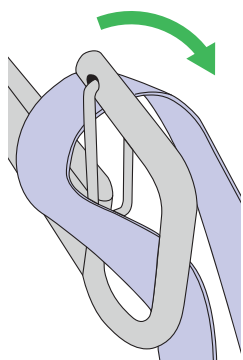

Húzza az akasztó egyik oldalát a horog fölé, és húzza le.

### Kulcslyuklemezkes heveder

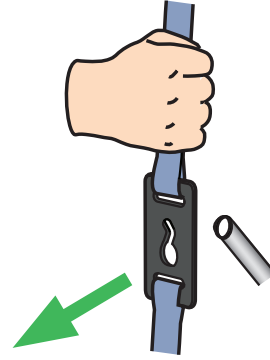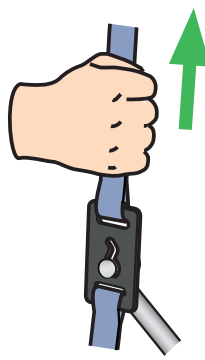

Húzza fel a szíjat, és akassza ki a kulcslyuklemezről.