

Maxi Twin

Käsiohjain



Ylös



Alas



Makuuasentoon



Istuma-asentoon




Sulje alustan jalakset




Avaa alustan jalakset

Hätäpysäytys

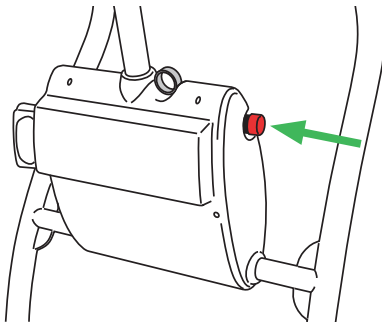


Paina toimilaitteen päällisen sivulla olevaa painiketta.

Hätälasku

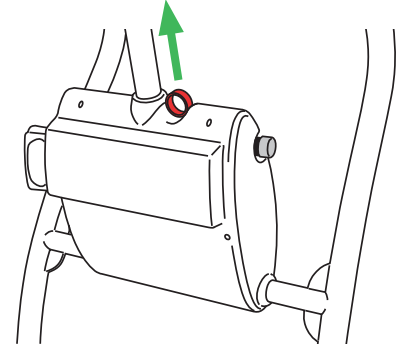


Vedä toimilaitteen päällisen päällä olevaa rengasta ylöspäin.

Jarrut

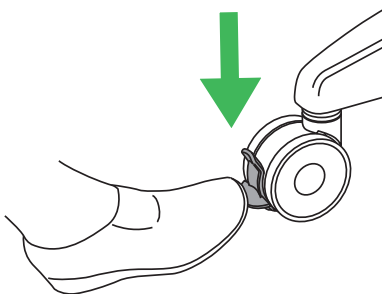


Kytke jarru.

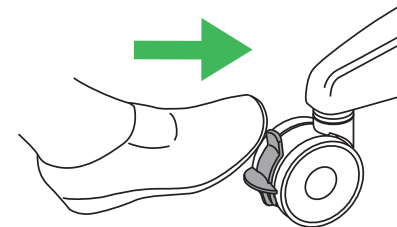


Vapauta jarru.

Säädettävät alustan jalaket

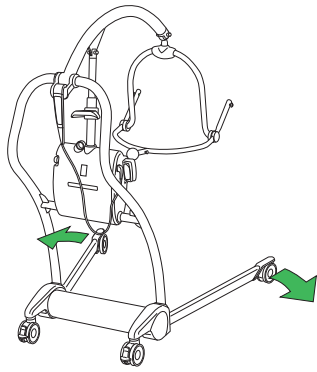



Avaa alustan jalaket painamalla painiketta.

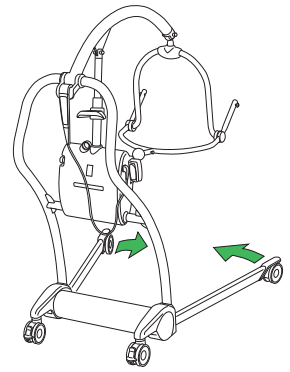



Sulje alustan jalaket painamalla painiketta.

Nostoliinan kiinnittäminen

Lenkinostoliina

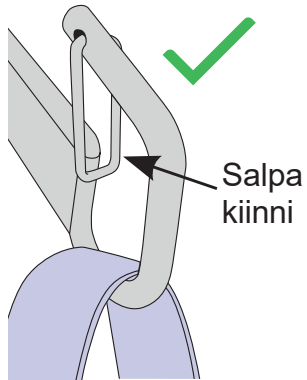
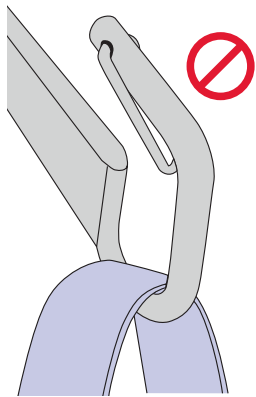


Kiinnityslukolla varustettu nostoliina

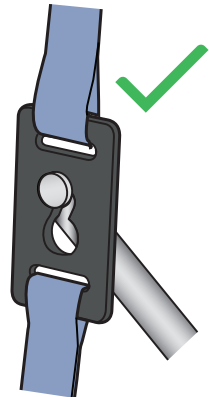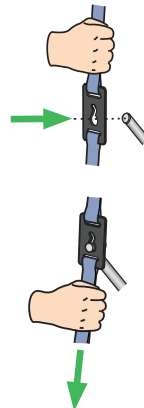



Nostoliinan irrottaminen

Lenkinostoliina

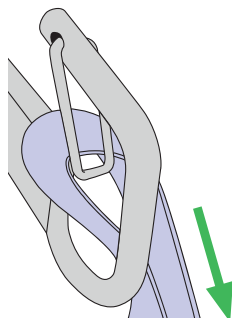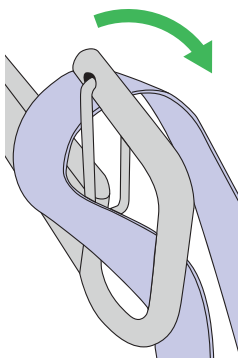

Vedä lenkin toinen puoli koukun yli ja vedä alaspäin.

Kiinnityslukolla varustettu nostoliina

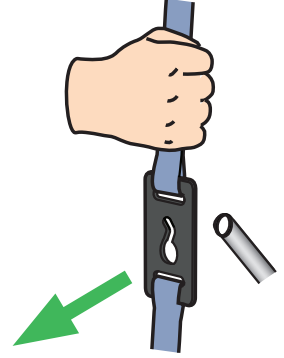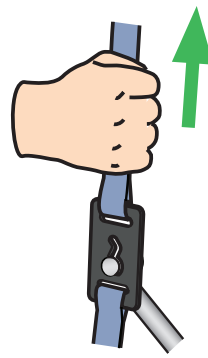

Vedä hihnaa ylöspäin ja irrota kiinnityslukko.