

# Maxi Twin

## Χειριστήριο ελέγχου



Ανυψώστε



Κάθοδος



Κεκλιμένη θέση



Καθιστή θέση




Κλείσιμο ποδιών πλαισίου




Άνοιγμα ποδιών πλαισίου

## Διακοπή έκτακτης ανάγκης

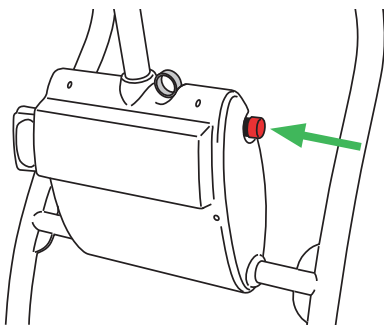


Πατήστε το κουμπί που βρίσκεται στο πλάι του καλύμματος του ενεργοποιητή.

## Χαμήλωμα έκτακτης ανάγκης

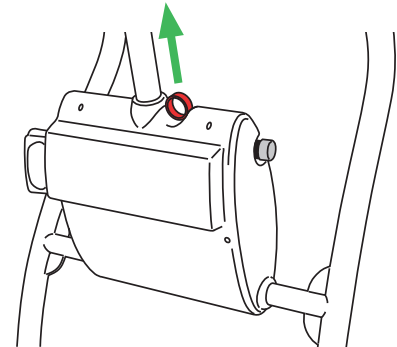


Τραβήξτε προς τα επάνω τον δακτύλιο που βρίσκεται στο κάλυμμα του ενεργοποιητή.

## Φρένα

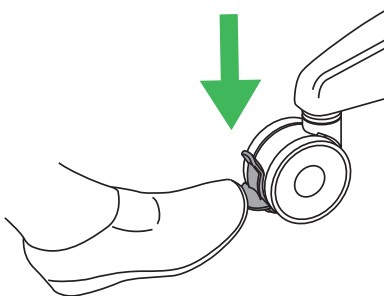


Εφαρμόστε το φρένο.

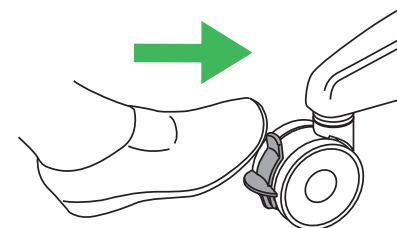


Απελευθερώστε το φρένο.

## Ρύθμιση πλάτους ποδιών πλαισίου

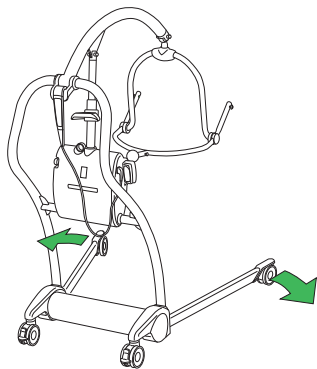



Πατήστε το κουμπί για να ανοίξετε τα πόδια του πλαισίου.

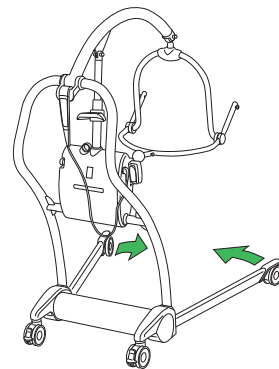



Πατήστε το κουμπί για να κλείσετε τα πόδια του πλαισίου.

## Τοποθέτηση αναρτήρα

### Αναρτήρας με βρόγχους

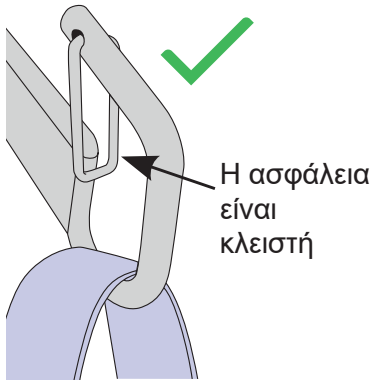
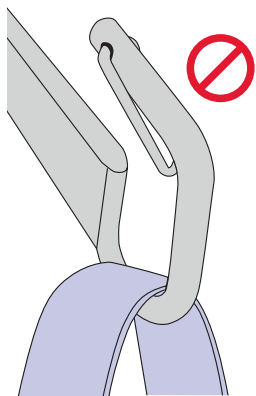


### Αναρτήρας με κλιπ

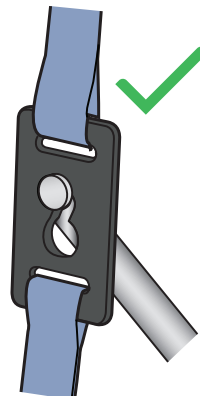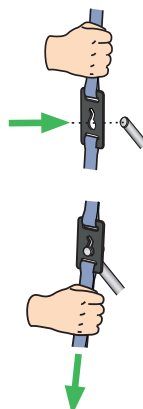



## Αφαίρεση αναρτήρα

### Αναρτήρας με βρόγχους

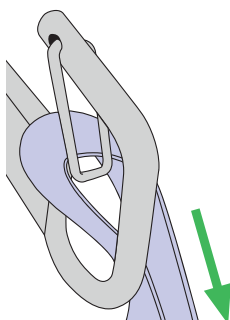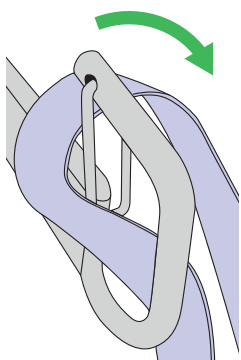

Τραβήξτε προς τα κάτω τη μία πλευρά του βρόγχου επάνω από το άγκιστρο.

### Αναρτήρας με κλιπ

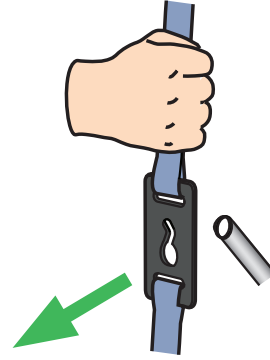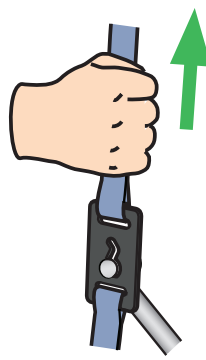

Τραβήξτε προς τα πάνω τον ιμάντα και αφαιρέστε το κλιπ.