

Arjo Liquids Flusher Detergent

Een mild alkalisch reinigingsmiddel voor het geautomatiseerd reinigen van urinalen en ondersteken. Geschikt voor oppervlakken die bestand zijn tegen alkali, zoals roestvrij staal, keramiek, glas en alkalibestendige kunststof.



Gebruiksaanwijzing

Dosering: 2-4 ml/l, afhankelijk van de waterhardheid.
Controleer voor het gebruik de geschiktheid van het materiaal.
Zorg voor volledig naspoelen na gebruik.
Niet combineren met andere chemicaliën.

Technische gegevens

Soortelijk gewicht (20 °C): 1.078 (kenmerkend)
pH als verstrekt (kenmerkend): 12.9
pH bij 0,5% water (kenmerkend): 9.8
Viscositeit 3.7 cSt

Ingrediënten

Bindmiddel, kalkwerend middel
Amfotere oppervlakactieve stof, corrosieremmer

Houdbaarheid

24 maanden in de originele verzegelde verpakking.

Veiligheid en behandeling

Zie het veiligheidsinformatieblad.

Opslagvoorwaarden

Op een koele, droge en vorstvrije plaats bewaren en uit de buurt van zuren en sterke oxidatiemiddelen.
Recht op bewaren in originele verpakking.
Optimale bewaartemperatuur 5-25 °C.

Biologisch afbreekbaar en recyclebaar

Biologisch afbreekbare formulering en recyclebare verpakkingen.
Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor meer informatie.

ORDERINFORMATIE

Taal	5 l
(DE/NL/FR/IT)	504028901
(EN/PL/CZ/FR)	504028902
(PT/GR/TR/ES)	504028903
(EN/CN/RU)	504028904
(SV/DA/NO/EN)	504028905
(JP/KR/AR/EN)	504028908



Het assortiment reinigingsmiddelen van Arjo is ontwikkeld voor en getest en gevalideerd op bedpanspoelers van Arjo om te voldoen aan de ISO 15883-normen voor de doelmatige reiniging van medische apparaten.