


Inserire e disinserire il freno

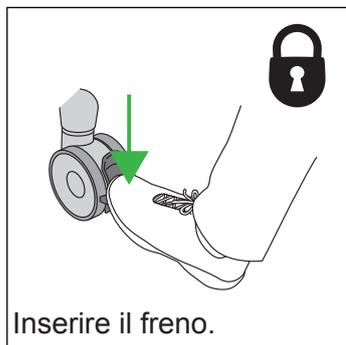

Inserire il freno.



Disinserire il freno.

Dispositivo direzionale




Applicare il dispositivo direzionale.




Disinserire il dispositivo direzionale.

Pannello di controllo

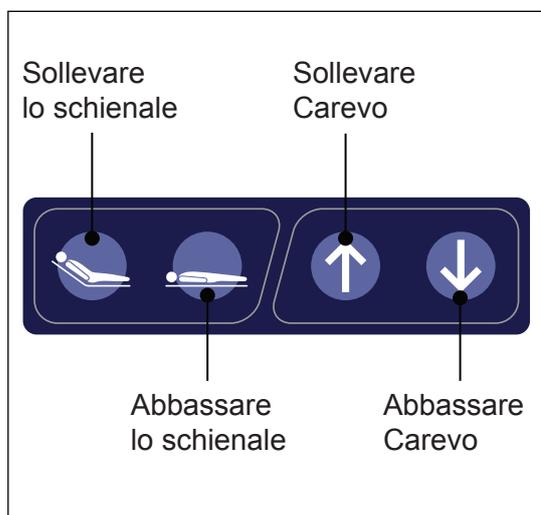

Sponda laterale

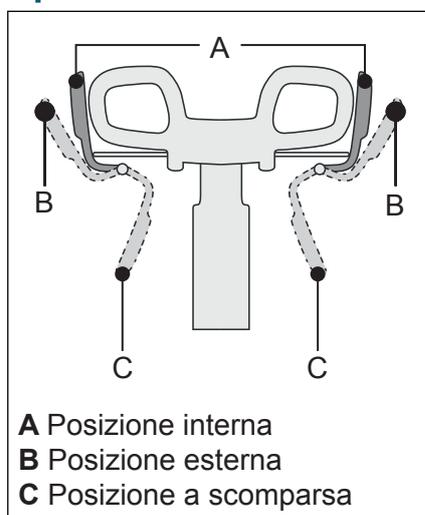


- A Posizione interna
- B Posizione esterna
- C Posizione a scomparsa

Pulsante di arresto di emergenza



Se il pannello di controllo non funziona, premere il pulsante di arresto di emergenza per arrestare qualsiasi movimento.

Inserimento della batteria

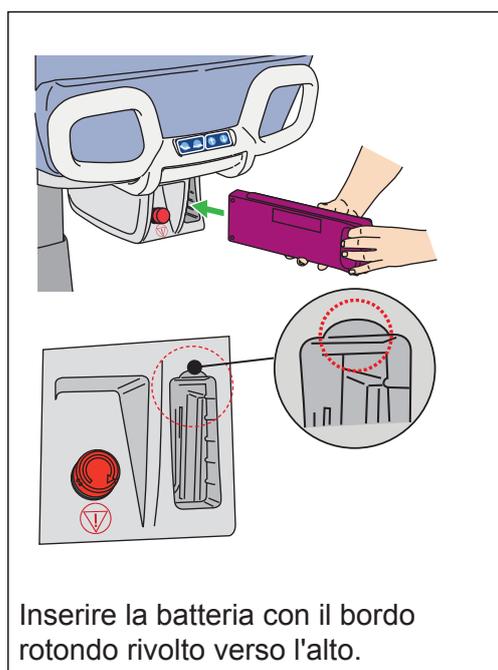

Inserire la batteria con il bordo rotondo rivolto verso l'alto.

Rimozione della batteria



Estrarre la batteria direttamente verso l'esterno.

Impugnature di sostegno




Impugnature di sostegno per il comfort e il supporto del paziente.

Flexi zone



Distribuisce la pressione sulla zona lombare, sul cocchige e sui fianchi del paziente.

Posizione Flexi Zone

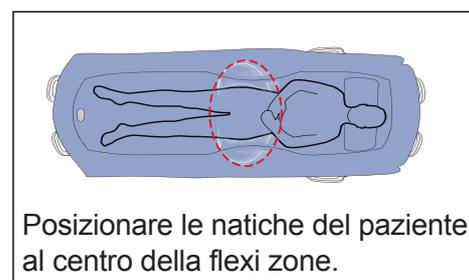

Posizionare le natiche del paziente al centro della flexi zone.