

Tīrīšana


Atļauts izmantot šādus dezinfekcijas līdzekļus:

- Arjo Clean
- Arjo General Purpose Disinfectant
- Arjo Disinfectant Cleanser IV
- Arjo All Purpose Disinfectant
- Arjo CenKleen IV

Piederumi


- Aizsargbrilles
- Aizsargcimdi
- Izsmidzināšanas pudele (ja nav dušas paneļa)
- Dezinfekcijas šķidrums
- Vienreizlietojami dvieļi
- Tīrīšanas birste ar mīkstiem sariem
- Pudeļu birste

1

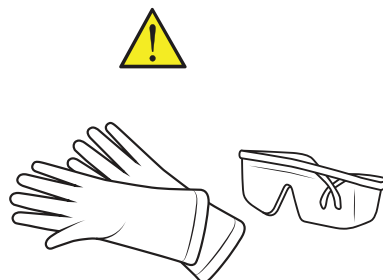


Uzvelciet aizsargcimds un acu aizsarglīdzekļus.

2

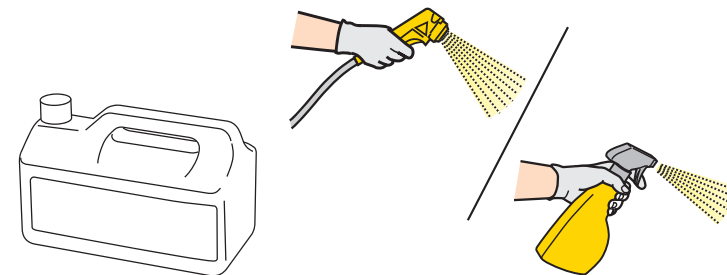


Pārbaudiet, vai dezinfekcijas līdzeklis ir sajaukts atbilstoši:
- dezinfekcijas pudeles etiķetē norādītajam vai
- sajaukšanas proporcijai, kas norādīta dušas paneļa LP

3

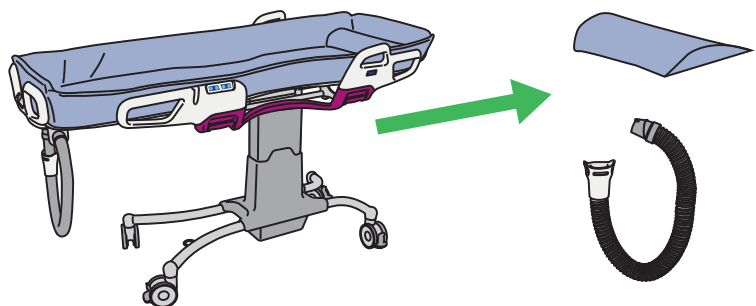


Izņemiet apakšējo drenāžas kanālu un spilvenu.

4

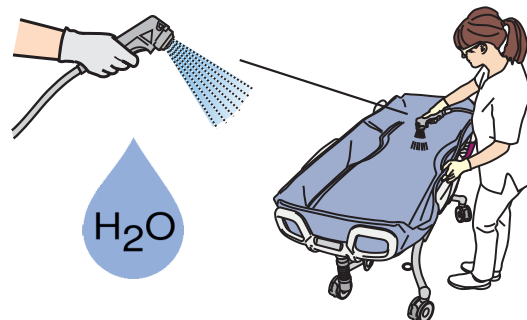

Noskalojiet ar ūdeni. Sāciet no matrača augšējās daļas virzienā uz leju, uz ritenīšu pusi.

5

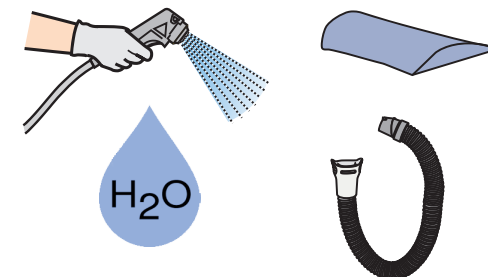


Izskalojiet apakšējo drenāžas kanālu un spilvenu.

Turpinājums nākamajā lappusē

Tīrīšanas procesa turpinājums

6

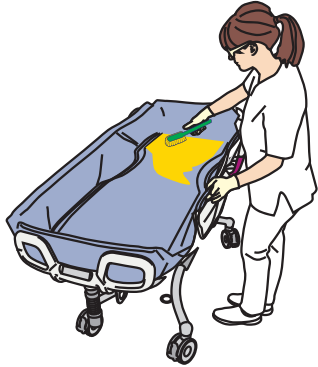


Izmantojiet suku ar mīkstiem sariem un dezinfekcijas līdzekli. Sāciet no matrača augšējās daļas virzienā uz leju, uz ritenīšu pusi. Izmantojiet pudeļu suku, kas izmērcēta dezinfekcijas līdzeklī. Iztīriet augšējo drenāžas kanālu.

7



Notīriet matrača apakšu, balsta plāksnes un augšējā drenāžas kanāla ārpusi.

8

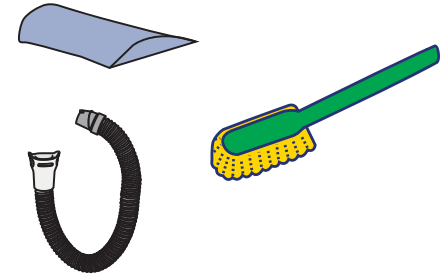

Izmantojiet suku ar mīkstiem sariem. Noberziet ar suku spilvenu un apakšējo drenāžas kanālu atsevišķi. Izvairieties no saskares ar matraci, kamēr nav dezinficēts spilvens.

Dezinficēšana

9




Paceliet matraci un novietojiet to pāri kājgala panelim un sānu balstiem. Matrača apakšējai daļai jābūt vērstai uz augšu. Izsmidziniet dezinfekcijas līdzekli matrača apakšējās daļas.

10



Notīriet matrača apakšējo daļu ar vienreizlietojamo dvieli.

11

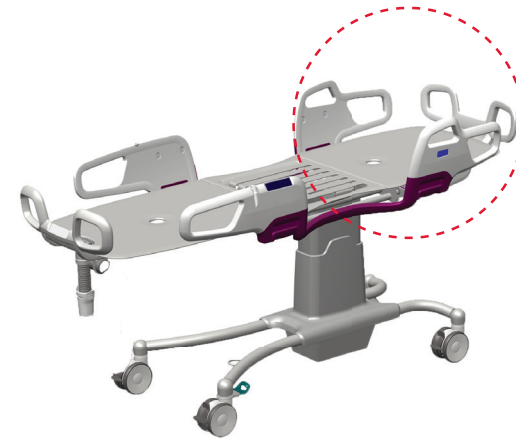


Izsmidziniet dezinfekcijas līdzekli un notīriet šādas galvgaļa daļas: galvgaļa panelis, sānu balsti, atbalsta plāksnes un elastīgā zona.

Turpinājums nākamajā lappusē

Dezinficēšanas procesa turpinājums

12

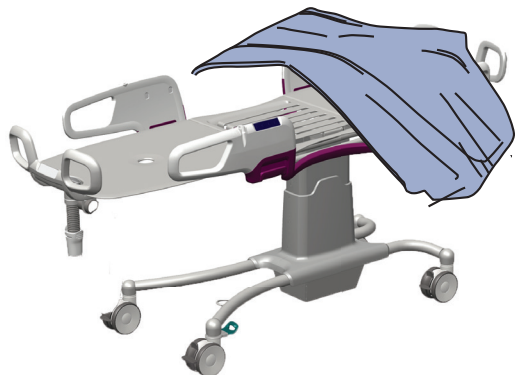


Novietojiet matrača dezinficēto apakšējo daļu pāri dezinficētajam galvgaļa panelim un sānu balstiem. Matrača nedezinficētajai iekšpuses daļai jābūt vērstai uz augšu. Izspiediet uz āru matrača stūru krokas.

13




Izsmidziniet dezinfekcijas līdzekli un notīriet matrača iekšpuses daļu ar vienreizlietojamo dvieli. Iespiediet uz iekšu matrača stūra krokas.

14

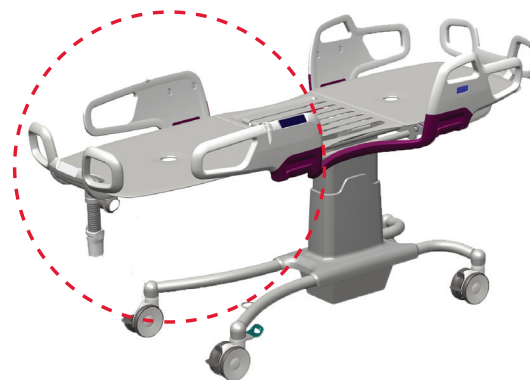


Izsmidziniet dezinfekcijas līdzekli un notīriet šādas kājgaļa daļas: kājgaļa panelis, sānu balsti, atbalsta plāksnes, elastīgā zona un augšējais drenāžas kanāls.

15

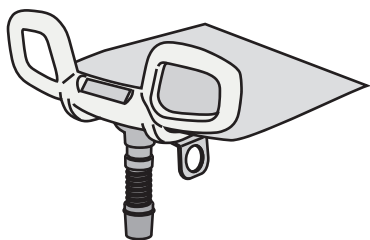

Izsmidziniet dezinfekcijas līdzekli uz augšējā drenāžas kanāla un notīriet to ar pudeļu birsti.

16

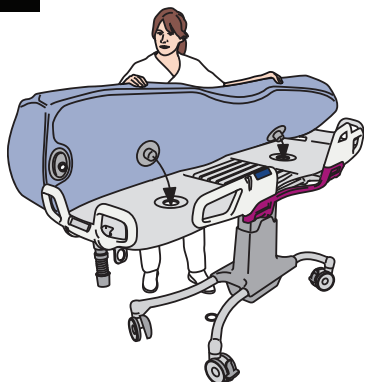

Novietojiet matraci tā sākotnējā pozīcijā.

17




Izsmidziniet dezinfekcijas līdzekli. Sāciet no matrača augšējās daļas virzienā uz leju, uz ritenīšu pusi.

18



Notīriet ar vienreizlietojamo dvieli. Sāciet no matrača augšējās daļas virzienā uz leju, uz ritenīšu pusi.

19

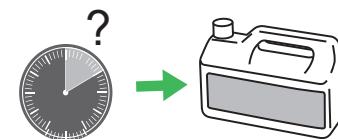


Ievērojiet atbilstošu saskares laiku ar dezinfekcijas līdzekli.

Turpinājums nākamajā lappusē


Dezinficēšanas procesa turpinājums

20

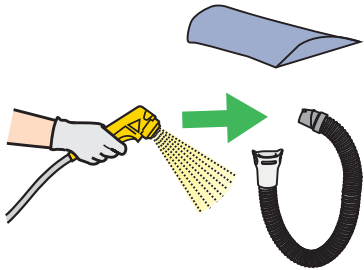


Izsmidziniet dezinfekcijas līdzekli un ar vienreizlietojamo dvieli notīriet spilvenu un atsevišķi apakšējo drenāžas kanālu.

21

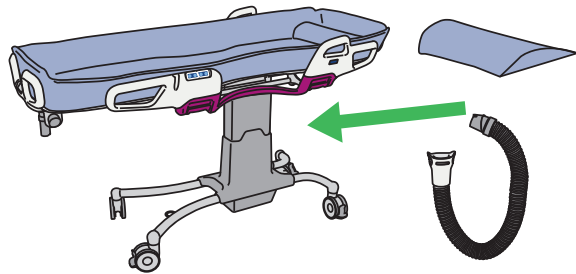

Piestipriniet apakšējo drenāžas kanālu pie augšējā drenāžas kanāla un novietojiet spilvenu uz matrača.

22

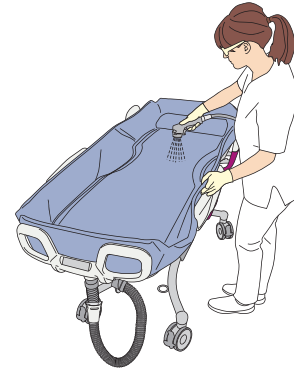

Izskalojiet visas daļas rūpīgi aukstā ūdenī, līdz vairs nav redzamas dezinfekcijas līdzekļa paliekas. Sāciet no matrača augšējās daļas virzienā uz leju, uz ritenīšu pusi. Noskalojiet matrača apakšējo daļu.

23



Kārtīgi noslaukiet katru daļu, izmantojot vienreizējās lietošanas dviļus.

