

Heimil sóttbreinsiefni

- Arjo Clean
- Arjo General Purpose Disinfectant
- Arjo Disinfectant Cleanser IV
- Arjo All Purpose Disinfectant
- Arjo CenKleen IV

Fylgihlutir


- Hlífðargleraugu
- Hlífðarhanskar
- Úðabrúsi (ef sturtuhaus er ekki til staðar)
- Fljótandi sóttbreinsiefni
- Einnota handþurrkur
- Mjúkur hreinsibursti
- Flöskubursti

1




Nota skal hlífðarhanska og augnhlífir.

2

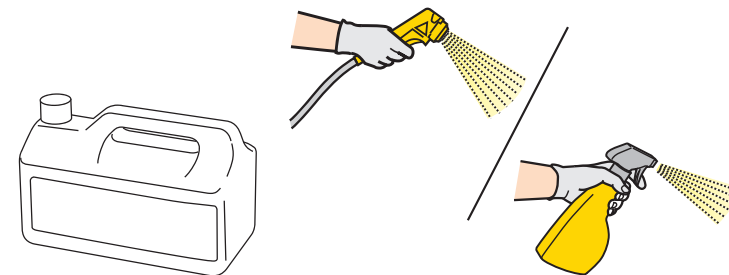

Passaðu að sóttbreinsiefnið sé blandað í samræmi við:
- merkingar á flösku sóttbreinsiefnis eða
- hlutfall blöndu sem er tekið fram í notkunarleiðbeiningum sturtunnar

3

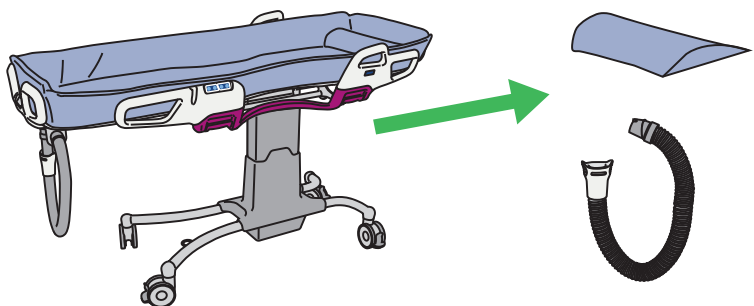


Fjarlægðu neðra frárennslið og koddann.

4

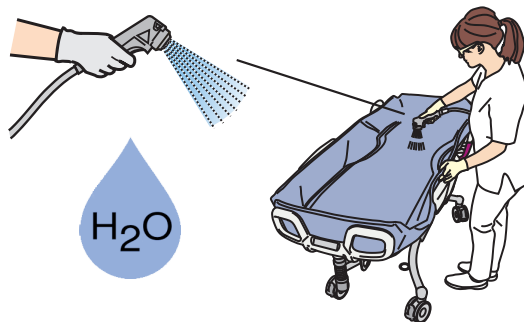

Skolaðu með vatni. Byrjaðu efst á dýnunni og vinndu þig niður að snúningshjólunum.

5

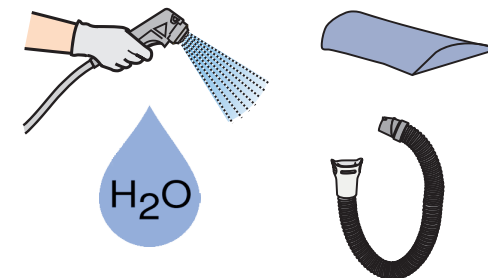


Skolaðu neðra frárennslið og koddann með vatni.

Haltu áfram með skrefin á næstu síðu

Hreinsun haldið áfram

6

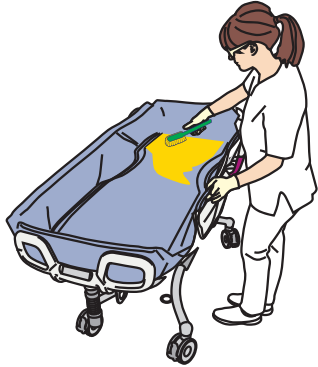


Notaðu mjúkan hreinsibursta með sóttþreinsiefni. Skrúbbaðu frá efri hluta dýnnar og vinndu þig niður að snúningshjólunum. Notaðu flöskubursta, rennbleytan í sóttþreinsiefni. Hreinsaðu efra frárennsli.

7



Þríðu botn dýnnar, stoðplötur og utan á efra frárennslinu.


8

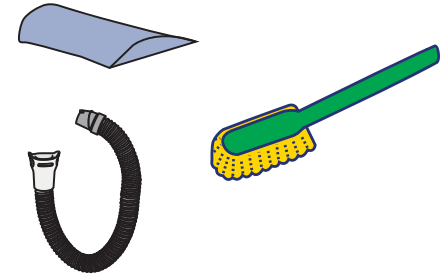

Notaðu mjúkan hreinsibursta. Skrúbbaðu koddann og neðra frárennslið hvort í sínu lagi. Forðastu snertingu við dýnuna þar til koddinn hefur verið sóttþreinsaður.

Sóttþreinsun

9

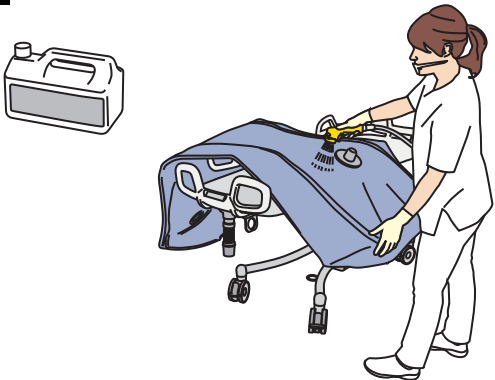


Lyftu upp dýnunni og settu hana ofan á fótgaflinn og hliðarstuðninginn. Bakhlið dýnnar vísar upp. Úðaðu sóttþreinsiefni á bakhlið dýnnar.

10



Þríðu bakhlið dýnnar með einnota klút.

11

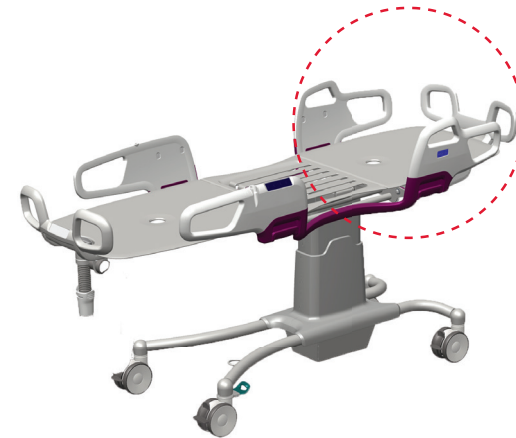


Úðaðu sóttþreinsiefni og hreinsaðu eftirfarandi hluta höfuðendans: höfðagafl, hliðarstuðning, stoðplötu og valsæðið með einnota klút.

Haltu áfram með skrefin á næstu síðu

Sóttgreinsun haldið áfram

12

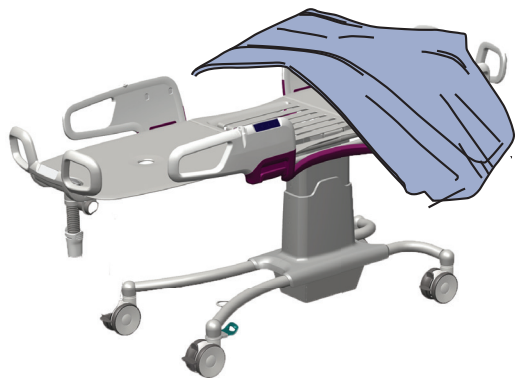


Settu sóttgreinsaða bakhlið dýnnar ofan á sóttgreinsaða höfðagaflinn og hliðarstuðning. Ósóttgreinsuð innanverð hlið dýnnar vísar upp. Ýttu út hornunum á dýnni.

13




Úðaðu sóttgreinsiefni og þrífðu innri hlið dýnnar með einnota klút. Ýttu inn hornunum á dýnni.

14

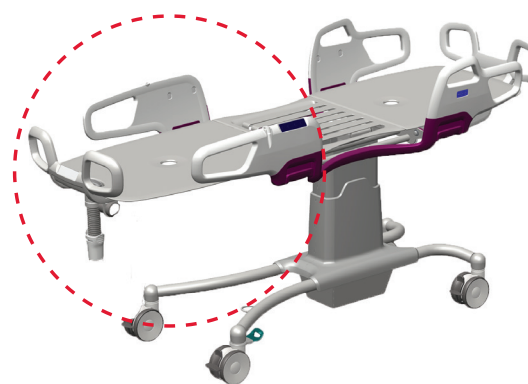


Úðaðu sóttgreinsiefni og hreinsaðu eftirfarandi hluta fótaendans: fótgafl, hliðarstuðning, stoðplötu, valsvæði og efra frárennsli með einnota klút.

15

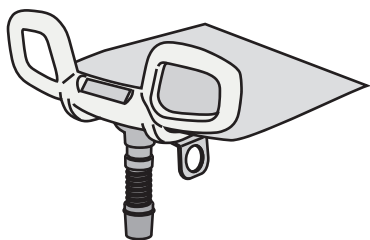

Úðaðu sóttgreinsiefni á efra frárennslið og þrífðu með flöskubursta.

16

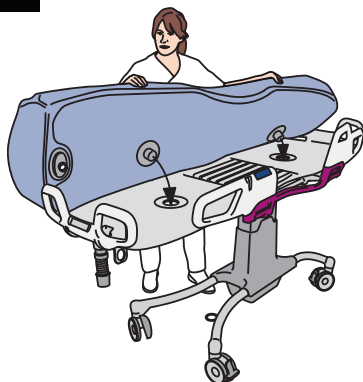

Komdu dýnni fyrir á sínum stað.

17




Úðaðu með sóttgreinsiefni. Byrjaðu efst á dýnni og vinndu þig niður að snúningshjólunum.

18



Þrífðu með einnota klút. Byrjaðu efst á dýnni og vinndu þig niður að snúningshjólunum.

19

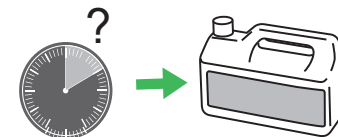


Gerðu ráð fyrir viðeigandi snertitíma fyrir sóttgreinsiefnið.

Haltu áfram með skrefin á næstu síðu


Sóttreinsun haldið áfram

20

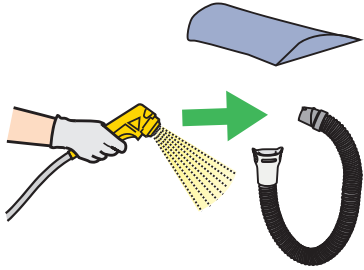


Úðaðu sóttreinsiefni og þrífðu koddann og neðra frárennslið hvort í sínu lagi með einnota klút.

21

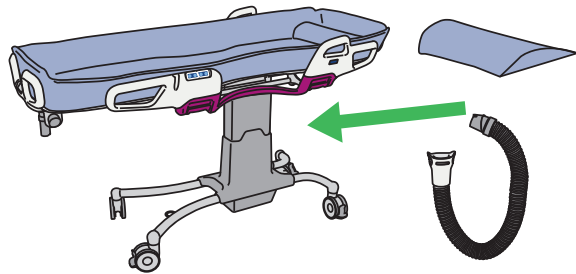

Festu neðra frárennslið við efra frárennslið og settu koddann á dýnuna.

22

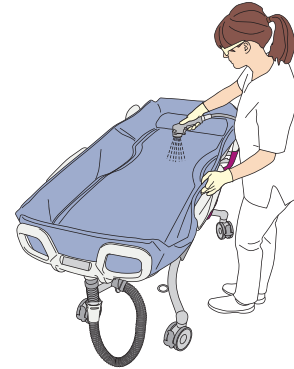

Skolaðu alla hluta með köldu vatni þar til engar leifar eru af sóttreinsiefninu. Byrjaðu efst á dýnunni og vinndu þig niður að snúningshjólunum. Skolaðu undir dýnunni.

23



Þurrkaðu alla hluta með einnota klútum.

