


### Dopuszczalne środki dezynfekcyjne

- Arjo Clean
- Arjo General Purpose Disinfectant
- Arjo Disinfectant Cleanser IV
- Arjo All Purpose Disinfectant
- Arjo CenKleen IV

### Akcesoria


- Okulary ochronne
- Rękawice ochronne
- Butelka z rozpylaczem (jeżeli panel natryskowy nie jest dostępny)
- Płyn dezynfekcyjny
- Ręczniki jednorazowe
- Miękka szczotka z włosia do czyszczenia
- Myjka do butelek

1

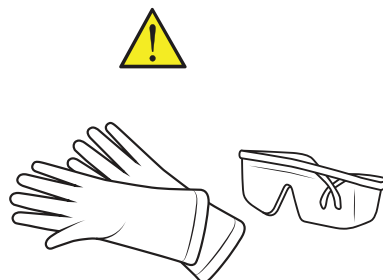

Założyć rękawice i okulary ochronne.


2

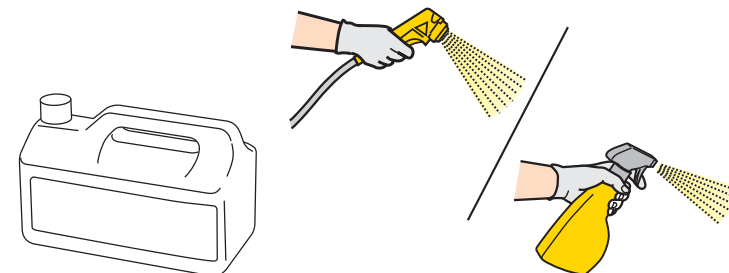

Sprawdzić, czy środek dezynfekcyjny jest wymieszany zgodnie z:


- etykietą butelki środka dezynfekcyjnego lub
- proporcją podaną w instrukcji obsługi panelu przysnicowego

3

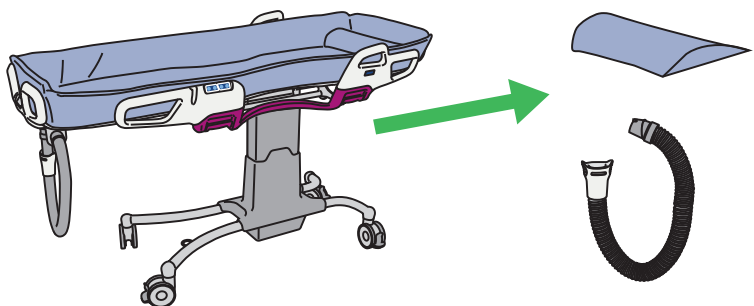


Wyjąć dolny odpływ oraz poduszkę.

4

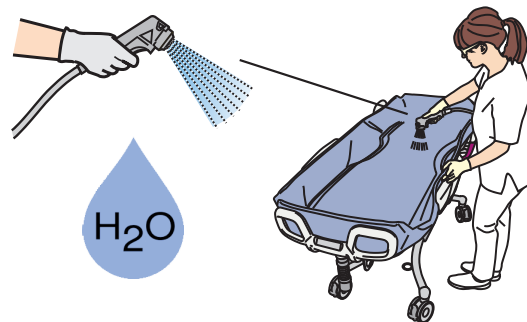

Splukać wodą. Rozpocząć od góry materaca w dół w stronę kótek.

5

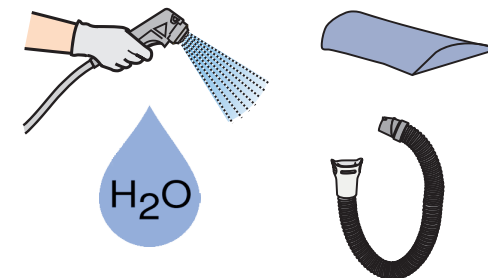


Przepłukać wodą dolny odpływ oraz poduszkę.

*Dalsze kroki na następnej stronie.*

## Czyszczenie — ciąg dalszy

6

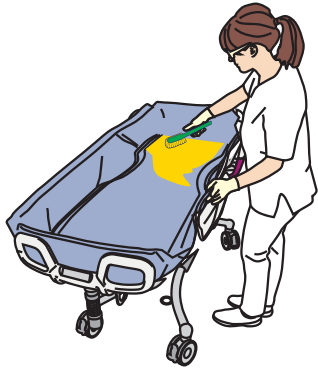


Użyć szczotki z miękkim włosiem oraz środka dezynfekcyjnego. Szorować od góry materaca w dół w stronę kótek. Użyć myjki do butelek zanurzonej w środku dezynfekcyjnym. Wyczyścić górny odpływ.

7



Nie zapomnieć o wyczyszczeniu spodu materaca, płyt wsporczych i zewnętrznej powierzchni odpływu górnego.


8

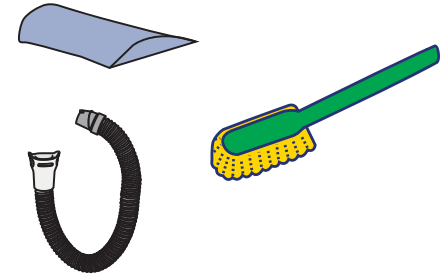

Użyć miękkiej szczotki do czyszczenia. Osobno wyszorować poduszkę oraz dolny odpływ. Unikać kontaktu z matercem do czasu zdezynfekowania poduszki.

## Dezynfekcja

9

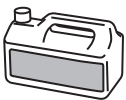


Podnieść materac i umieścić go na poręczach bocznych po stronie stóp. Spodnia część materaca powinna być skierowana do góry. Spryskać spodnią część materaca środkiem dezynfekcyjnym.

10



Wyczyścić spód materaca za pomocą ręcznika jednorazowego.

11

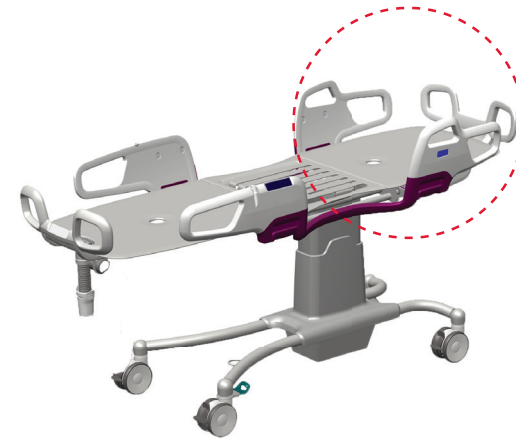


Spryskać środkiem dezynfekcyjnym i wyczyścić następujące części po stronie głowy: panel po stronie głowy, poręcze boczne, płytę wsporczą, strefę flexi.

*Dalsze kroki na następnej stronie.*

## Dezynfekcja — ciąg dalszy

12

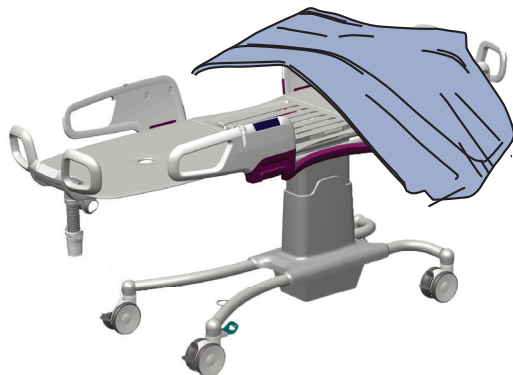


Umieścić zdezynfekowaną spodnią stronę materaca na zdezynfekowanych panelu i poręczach bocznych po stronie głowy. Niezdezynfekowane spodnie część materaca skierowana do góry. Odgiąć na zewnątrz rogi materaca.

13




Spryskać środkiem dezynfekcyjnym wnętrze materaca i wyczyścić za pomocą ręcznika jednorazowego. Zagiąć do wnętrza rogi materaca.

14

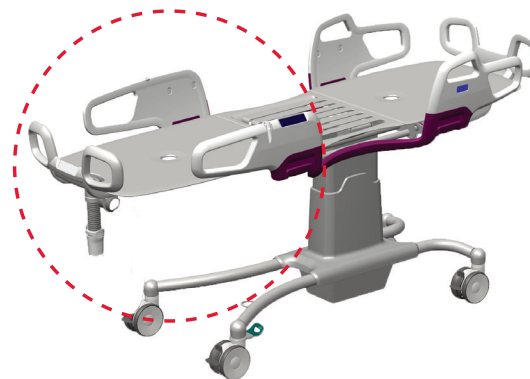


Spryskać środkiem dezynfekcyjnym i wyczyścić następujące części po stronie stóp: panel po stronie stóp, poręcze boczne, płytę wsporcą, strefę flexi i odpływ górny.

15

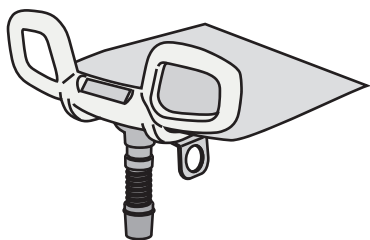

Spryskać górny odpływ środkiem dezynfekcyjnym oraz wyczyścić za pomocą szczotki do butelek.

16

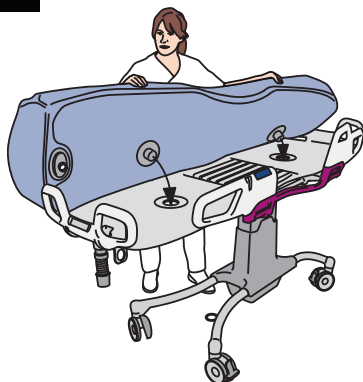

Umieścić materac w jego oryginalnej pozycji.

17




Spryskać środkiem dezynfekcyjnym. Rozpocząć od góry materaca w dół w stronę kółek.

18



Wyczyścić za pomocą ręcznika jednorazowego. Rozpocząć od góry materaca w dół w stronę kółek.

19

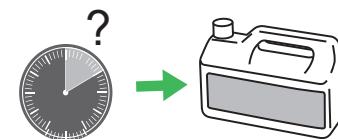


Zapewnić właściwy czas na działanie środka dezynfekcyjnego.

*Dalsze kroki na następnej stronie.*


## Dezynfekcja — ciąg dalszy

20

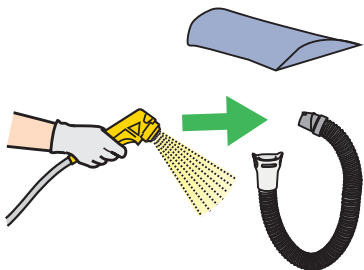


Osobno spryskać środkiem dezynfekcyjnym i wyczyścić za pomocą ręcznika jednorazowego poduszkę oraz odpływ górny.

21

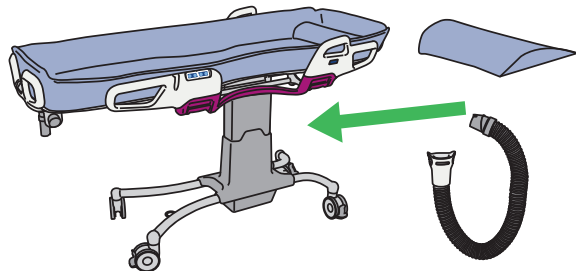

Podłączyć odpływ dolny z górnym i umieścić poduszkę na materacu.

22

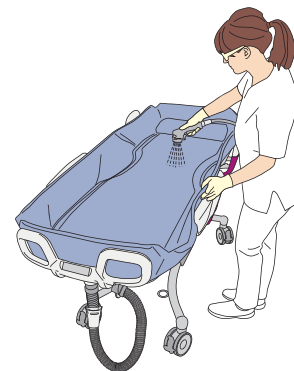

Oplukać wszystkie części zimną wodą do momentu, gdy nie będzie żadnych pozostałości środka dezynfekcyjnego. Rozpocząć od góry materaca w dół w stronę kółek. Spłukać spodnią część materaca.

23



Za pomocą jednorazowego ręcznika wytrzeć wszystkie części do sucha.

