

สารฆ่าเชื้อที่อนุญาต

- Arjo Clean
- Arjo General Purpose Disinfectant
- Arjo Disinfectant Cleanser IV
- Arjo All Purpose Disinfectant
- Arjo CenKleen IV

อุปกรณ์เสริม


- แวนตาป้องกัน
- ถุงมือป้องกัน
- ขวดสเปรย์ (หากไม่มีชุดฝักบัว)
- น้ำยาฆ่าเชื้อ
- ผ้าเช็ดแบบใช้แล้วทิ้ง
- แปรงทำความสะอาดแบบขนนุ่ม
- แปรงล้างขวด

1



สวมถุงมือและแว่นตาป้องกัน


2

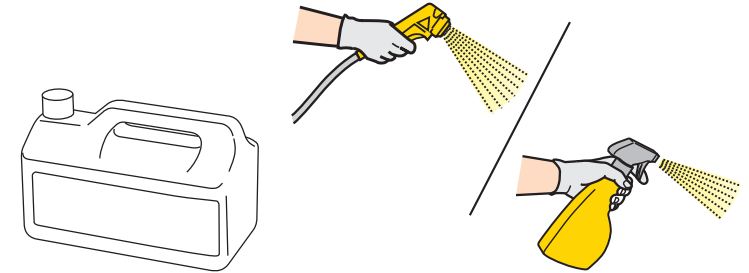

ตรวจสอบว่าผสมสารฆ่าเชื้อตาม:


- ฉลากบนขวดสารฆ่าเชื้อ หรือ
- สัดส่วนผสมที่ระบุใน IFU ของชุดฝักบัว

3

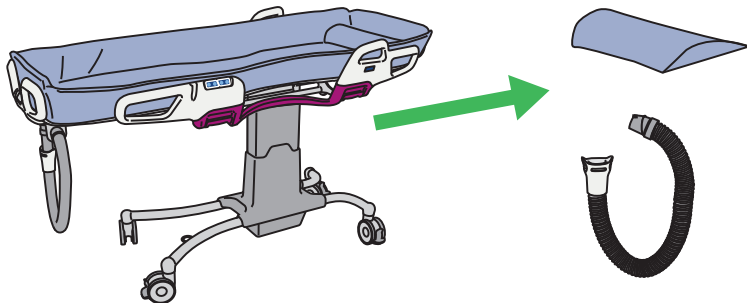


ถอดท่อระบายน้ำส่วนล่างและหมอนออก

4

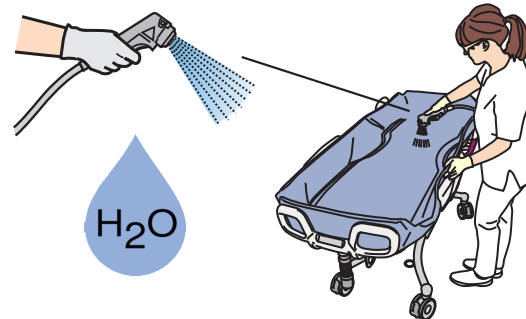

ล้างด้วยน้ำเปล่า
เริ่มจากด้านบนของเบาะลงไปจนถึงล้อเลื่อน

5

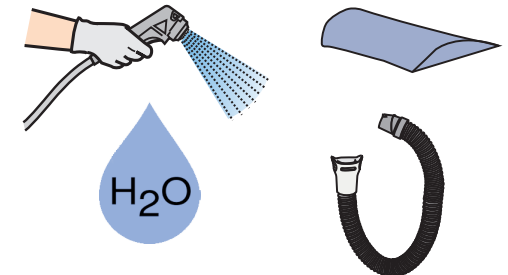


ล้างท่อระบายน้ำส่วนล่างและหมอนด้วยน้ำ

ทำตามขั้นตอนต่างๆ ในหน้าถัดไป

การทำความสะอาด ต่อ

6

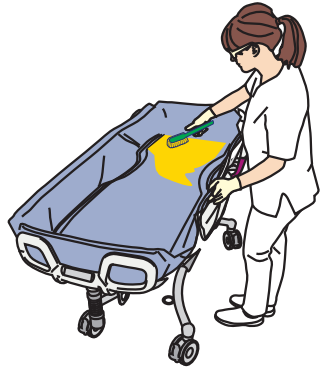


ใช้แปรงทำความสะอาดขนนุ่มกับสารฆ่าเชื้อ
ขัดจากด้านบนของเบาะลงไปจนถึงล้อเลื่อน
ใช้แปรงล้างขวดซุบสารฆ่าเชื้อ
ทำความสะอาดท่อระบายน้ำด้านบน

7



ทำความสะอาดด้านล่างของเบาะ แผ่นรอง
และด้านนอกของท่อระบายน้ำส่วนบน


8

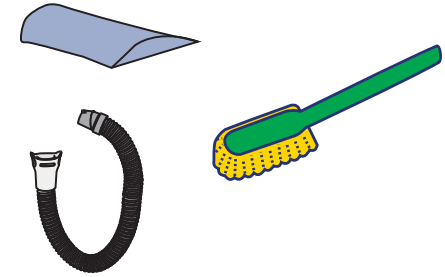

ใช้แปรงทำความสะอาดขนนุ่ม
ขัดหมอนและท่อระบายน้ำส่วนล่างแยกกัน
หลีกเลี่ยงการสัมผัสเบาะจนกว่าหมอนจะได้รับการฆ่าเชื้อ
แล้ว

การฆ่าเชื้อ

9

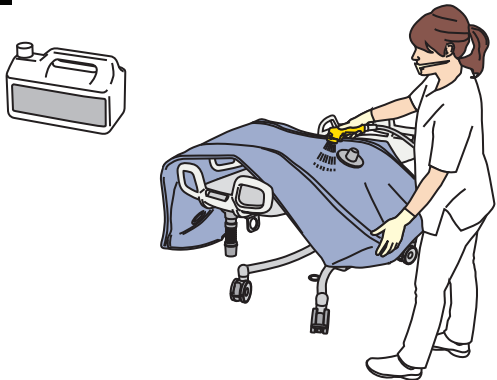


ยกเบาะขึ้นและวางบนแผงวางเท้าและราวด้านข้าง
หงายด้านหลังของเบาะขึ้น
ฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อที่ด้านหลังของเบาะ

10



ทำความสะอาดด้านหลังของเบาะด้วยผ้า
แบบใช้แล้วทิ้ง

11

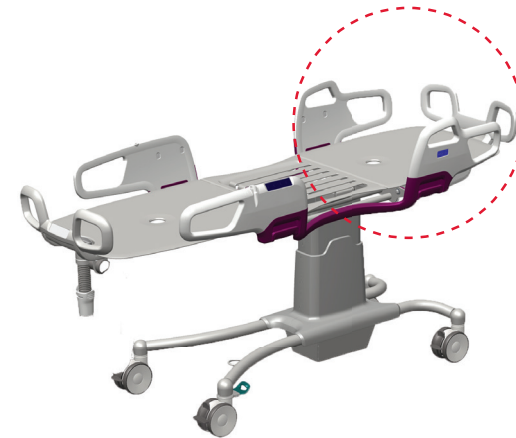


ฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อและทำความสะอาดชิ้นส่วนต่อไปนี้ทีละชิ้นส่วนศีรษะ:
แผงส่วนศีรษะ ราวด้านข้าง แผ่นรอง และ flexi zone ด้วยผ้าแบบใช้แล้วทิ้ง

ต่อด้วยขั้นตอนต่างๆ ในหน้าถัดไป

การฆ่าเชื้อ ต่อ

12

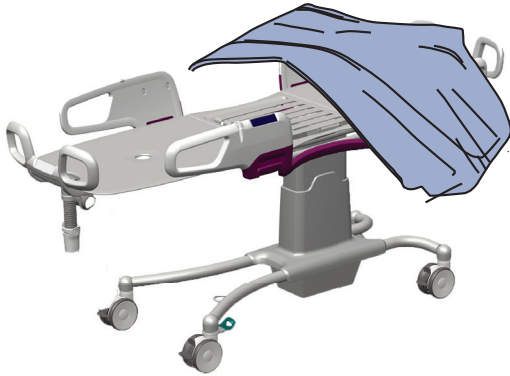


วางด้านหลังเบาะที่ฆ่าเชื้อแล้วบนแผงส่วนศีรษะและราวด้านข้างที่ฆ่าเชื้อแล้ว หายาด้านในเบาะที่ยังไม่ฆ่าเชื้อขึ้นด้านบนที่มุมเบาะเข้า

13




ฉีกฟ้นสารฆ่าเชื้อและทำความสะอาดด้านในเบาะด้วยผ้าแบบใช้แล้วทิ้ง ดันรอยพับที่มุมเบาะเข้า

14

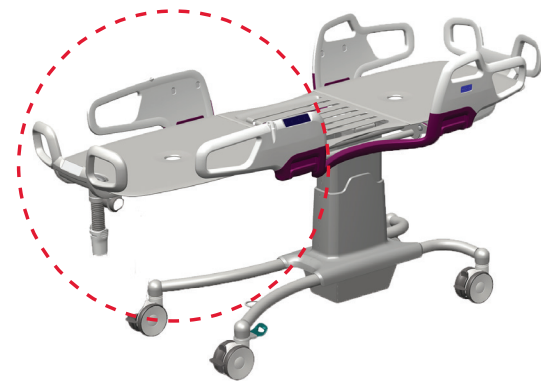


ฉีกฟ้นสารฆ่าเชื้อและทำความสะอาดชิ้นส่วนต่อไปนี้ที่ปลายส่วนวางเท้า: แผงส่วนปลาย ราวด้านข้าง แผ่นรอง flexi zone และท่อระบายน้ำส่วนบนด้วยผ้าแบบใช้แล้วทิ้ง

15

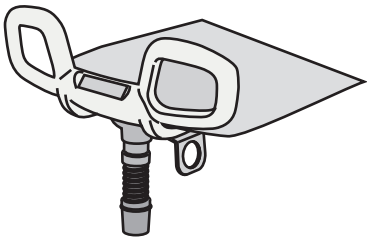

ฉีกฟ้นสารฆ่าเชื้อที่ท่อระบายน้ำส่วนบนแล้วทำความสะอาดด้วยแปรงล้างขวด

16

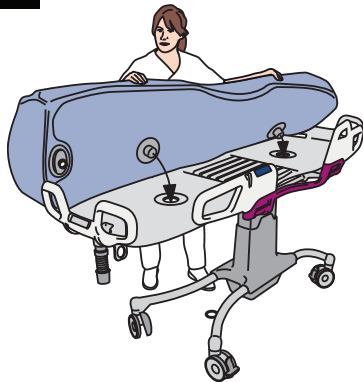

วางเบาะในตำแหน่งเดิม

17




ฉีกฟ้นสารฆ่าเชื้อ เริ่มจากด้านบนของเบาะลงไปจนถึงล้อเลื่อน

18



ทำความสะอาดด้วยผ้าแบบใช้แล้วทิ้ง เริ่มจากด้านบนของเบาะลงไปจนถึงล้อเลื่อน

19

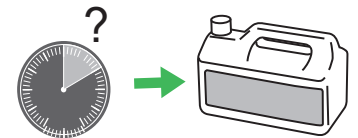


ปล่อยสารฆ่าเชื้อทิ้งไว้ตามเวลาที่เหมาะสม

ต่อด้วยขั้นตอนต่างๆ ในหน้าถัดไป


การฆ่าเชื้อ ต่อ

20

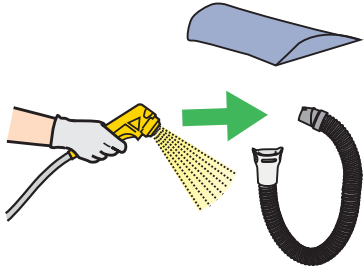


ฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อเพื่อทำความสะอาดหมอนและท่อระบายน้ำส่วนล่างแยกกันด้วยผ้าแบบใช้แล้วทิ้ง

21

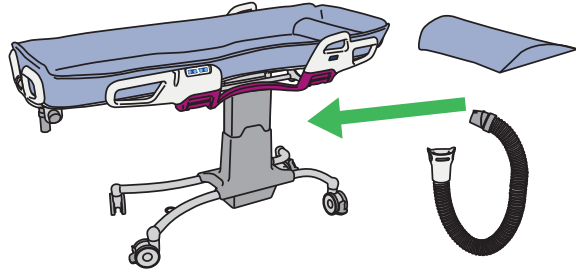

ติดตั้งท่อระบายน้ำส่วนล่างเข้ากับท่อระบายน้ำส่วนบนและวางหมอนบนเบาะ

22

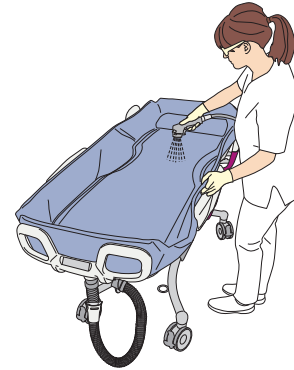

ล้างทุกชิ้นส่วนด้วยน้ำเย็นจนกว่าไม่เห็นร่องรอยสารฆ่าเชื้อ
เริ่มจากด้านบนของเบาะลงไปจนถึงล้อเลื่อน
ล้างด้านล่างเบาะ

23



เช็ดแต่ละชิ้นส่วนให้แห้งสนิทโดยใช้ผ้าแบบใช้แล้วทิ้ง



ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com