

Curățarea


Dezinfectanți permiși

- Arjo Clean
- Arjo General Purpose Disinfectant
- Arjo Disinfectant Cleanser IV
- Arjo All Purpose Disinfectant
- Arjo CenKleen IV

Accesorii


- Ochelari de protecție
- Mănuși de protecție
- Atomizor (dacă nu este disponibil un panou de duș)
- Lichid dezinfectant
- Prosoape de unică folosință
- Perie de curățare cu păr moale
- Perie de sticlă

1

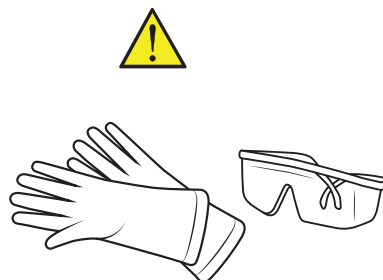

Folosiți mănuși și ochelari de protecție.


2

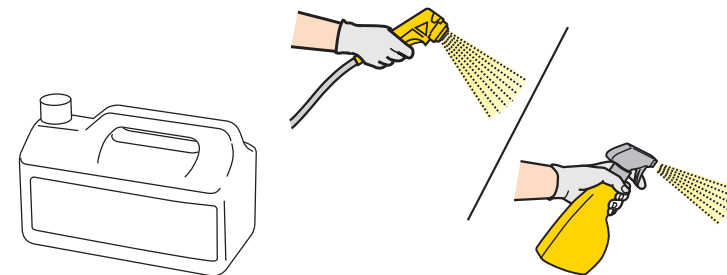

Verificați ca dezinfectantul să fie amestecat în conformitate cu:


- eticheta de pe recipientul cu dezinfectant sau
- raportul de amestec indicat în IDU pentru panoul de duș.

3

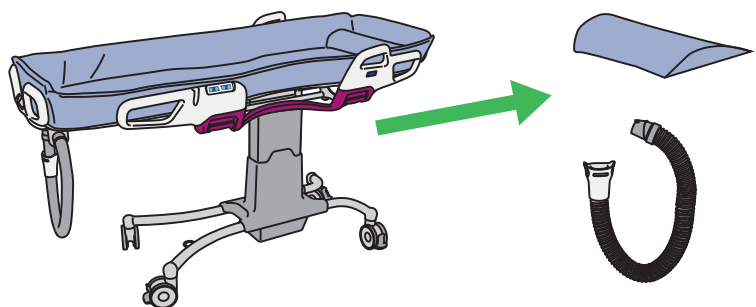


Îndepărtați secțiunea inferioară a scurgerii și perna.

4

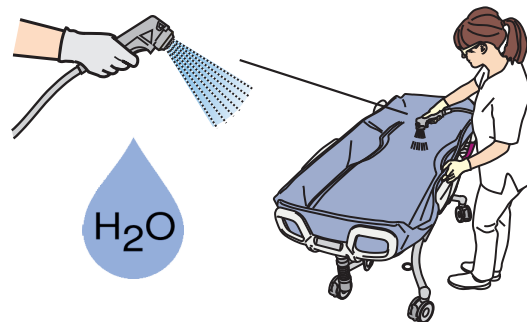

Clătiți cu apă. Începeți dinspre partea superioară a saltelei în jos, către roțile.

5

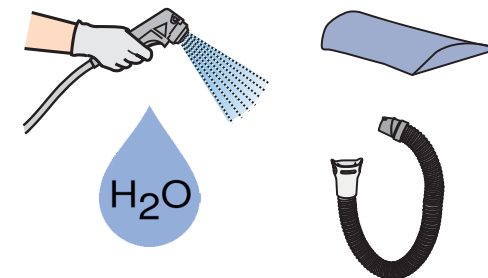


Clătiți cu apă secțiunea inferioară a scurgerii și perna.

Continuați cu pașii prezentați pe pagina următoare.


Curățarea – continuare

6

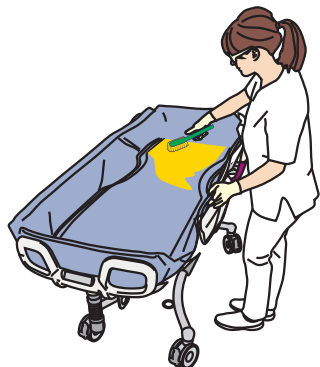


Folosiți o perie de curățare cu păr moale cu dezinfectant. Frecați dinspre partea superioară a saltelei în jos, către roțile. Folosiți o perie pentru sticle înmuiată în dezinfectant. Curățați secțiunea superioară a scurgerii.

7

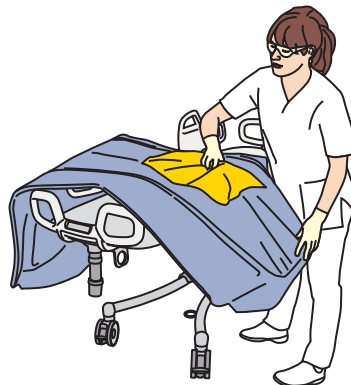

Curățați partea inferioară a saltelei, plăcile de sprijin și partea exterioară a secțiunii superioare a scurgerii.


8

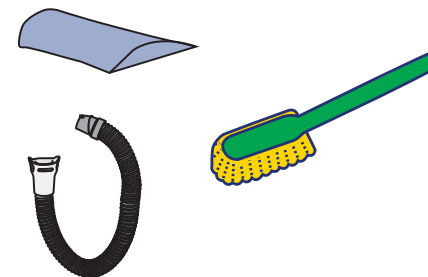

Folosiți o perie de curățare cu păr moale. Frecați separat perna și secțiunea inferioară a scurgerii. Evitați contactul cu salteaua până la dezinfectarea pernei.

Dezinfectarea

9

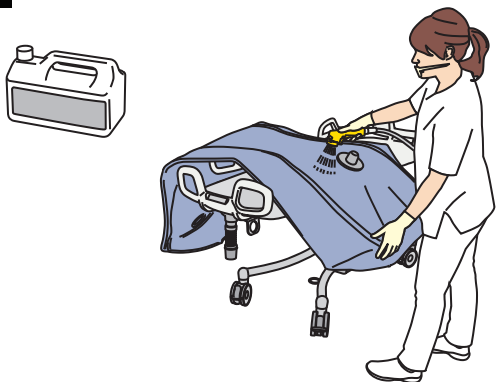


Ridicați și așezați salteaua peste panoul de la picioare și suporturile laterale. Partea inferioară a saltelei trebuie să fie cu fața în sus. Pulverizați dezinfectant pe partea inferioară a saltelei.

10



Curățați partea inferioară a saltelei cu un prosop de unică folosință.

11

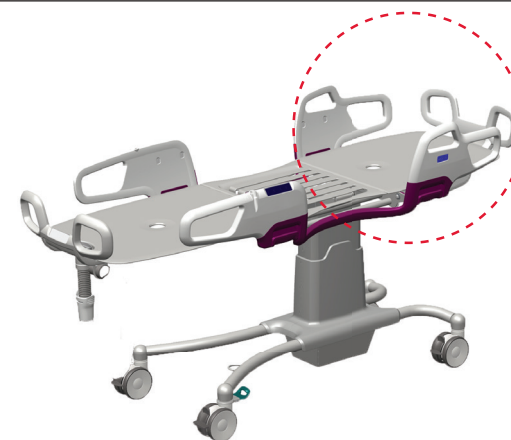


Pulverizați dezinfectant și curățați următoarele părți de la capătul pentru cap: panoul de la cap, suporturile laterale, placa de sprijin și zona flexibilă cu un prosop de unică folosință.

Continuați cu pașii prezentați pe pagina următoare.

Dezinfectarea – continuare

12

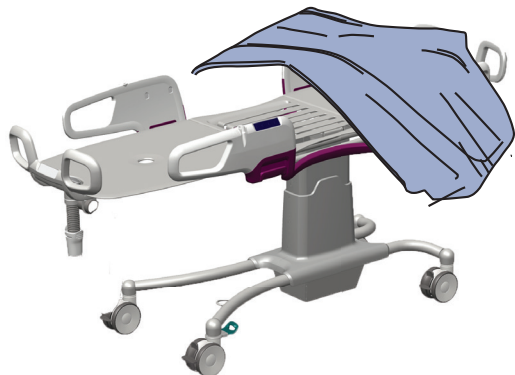


Așezați partea inferioară dezinfectată a saltelei deasupra panoului de la cap și suporturilor laterale dezinfectate. Partea interioară nedezinfectată a saltelei trebuie să fie cu fața în sus. Împingeți în afară pliurile colțurilor saltelei.

13




Pulverizați dezinfectant și curățați interiorul saltelei cu un prosop de unică folosință. Împingeți înăuntru pliurile colțurilor saltelei.

14

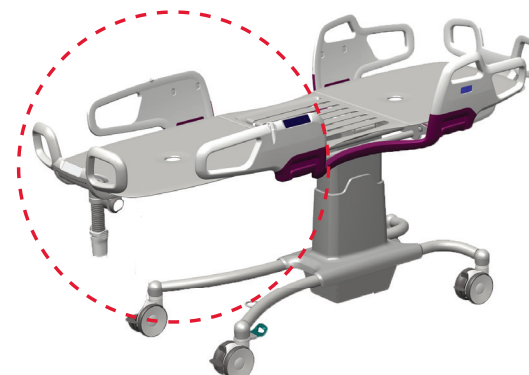


Pulverizați dezinfectant și curățați următoarele părți de la capătul pentru picioare: panoul de la picioare, suporturile laterale, placa de sprijin, zona flexibilă și secțiunea superioară a scurgerii cu un prosop de unică folosință.

15

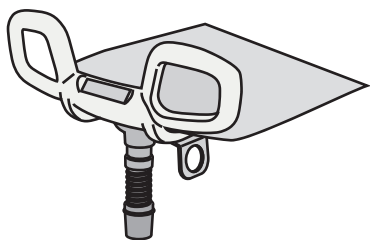

Pulverizați dezinfectant pe secțiunea superioară a scurgerii și curățați-o cu o perie pentru sticle.

16

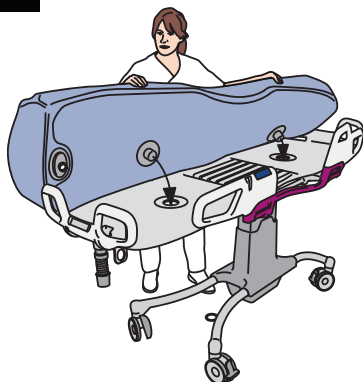

Așezați salteaua în poziția sa inițială.

17




Pulverizați dezinfectant. Începeți dinspre partea superioară a saltelei în jos, către roțile.

18



Curățați cu un prosop de unică folosință. Începeți dinspre partea superioară a saltelei în jos, către roțile.

19

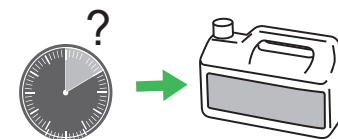


Lăsați să treacă perioada de contact adecvată pentru dezinfectant.

Continuați cu pașii prezentați pe pagina următoare.


Dezinfectarea – continuare

20

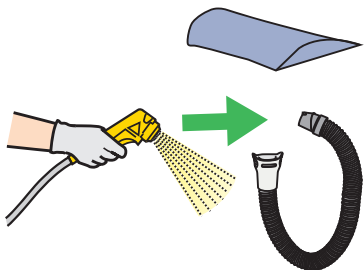


Pulverizați dezinfectant pentru a curăța perna și secțiunea inferioară a scurgerii separat, cu un prosop de unică folosință.

21

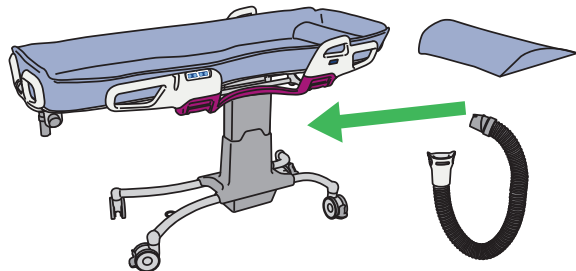

Atașați secțiunea inferioară a scurgerii de secțiunea superioară a scurgerii și așezați perna pe saltea.

22

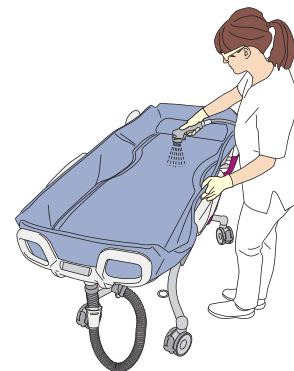

Clătiți toate părțile cu apă rece până când nu se mai observă urme de dezinfectant. Începeți dinspre partea superioară a saltelei în jos, către roțile. Clătiți partea inferioară a saltelei.

23



Ștergeți fiecare parte cu prosoape de unică folosință până la uscare completă.

