

Очистка


Разрешенные дезинфицирующие средства

- Arjo Clean
- Arjo General Purpose Disinfectant
- Arjo Disinfectant Cleanser IV
- Arjo All Purpose Disinfectant
- Arjo CenKleen IV

Дополнительные принадлежности


- Защитные очки
- Защитные перчатки
- Бытовой распылитель (при отсутствии душевой панели)
- Дезинфицирующая жидкость
- Одноразовые полотенца
- Мягкая нейлоновая щетка
- Щетка для мытья бутылок

1

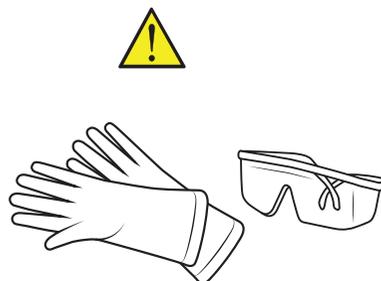


Наденьте защитные перчатки и очки

2

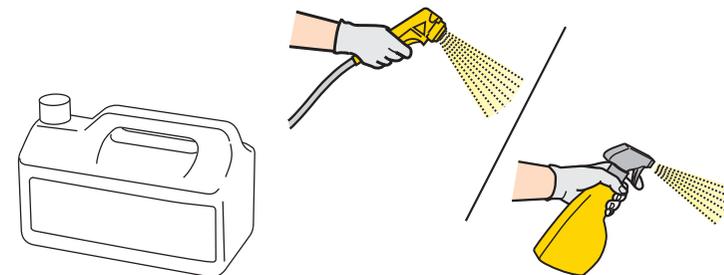


Убедитесь, что дезинфицирующее средство смешано в соответствии с:
– этикеткой на бутылке дезинфицирующего средства или
– соотношением компонентов из инструкции по эксплуатации душевой панели.

3

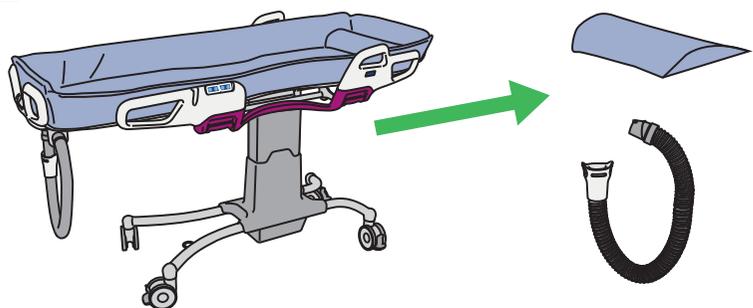


Снимите нижний сливной патрубок и уберите подушку.

4

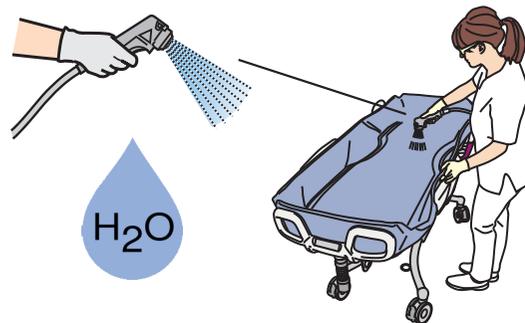

Ополосните протертые поверхности водой. Начните с верхней части матраса, спускаясь вниз к колесам.

5

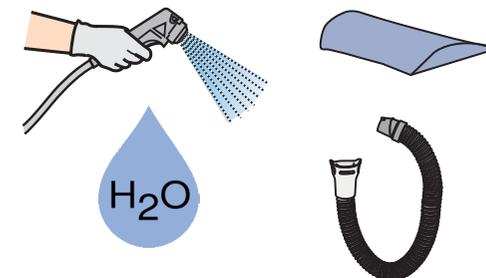

Промойте нижний сливной патрубок и подушку водой.

Продолжение на следующей странице

Очистка (продолжение)

6




Используйте щетку с мягкой щетиной, смоченной дезинфицирующим средством. Начните чистку с верхней части матраса, спускаясь вниз к колесам. Используйте щетку для мытья бутылок, смоченную в дезинфицирующем средстве. Очистите верхнее сливное отверстие.

7



Обработайте нижнюю сторону матраса, опорные пластины и внешнюю сторону верхнего сливного патрубка.

8

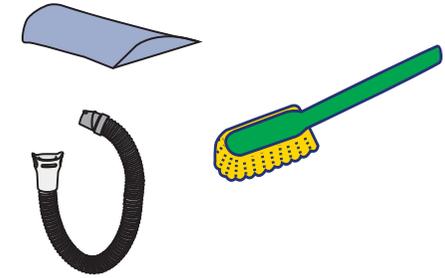

Возьмите щетку с мягкой щетиной. Отдельно очистите щеткой подушку и нижний сливной патрубок. Не допускайте соприкосновения матраса и подушки до ее обработки.

Дезинфекция

9




Снимите матрас с каталки и положите его на ножную панель и боковые ограждения. Нижняя сторона матраса должна быть повернута вверх. Распылите дезинфицирующее средство на нижнюю сторону матраса.

10



Протрите нижнюю поверхность матраса одноразовым полотенцем.

11

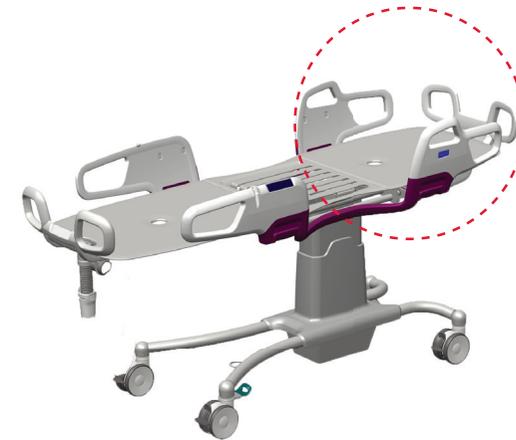


Распылите дезинфицирующее средство и протрите следующие детали головной части каталки: головную панель, боковые ограждения, опорную пластину, зону гибкости.

Продолжение на следующей странице

Дезинфекция (продолжение)

12

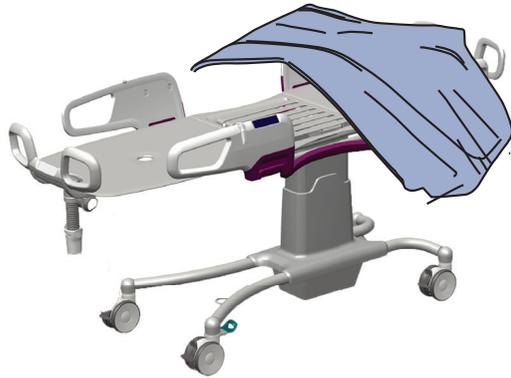


Поместите матрас обработанной нижней стороной на обработанную головную панель и боковые ограждения. Необработанная внутренняя часть матраса должна быть повернута вверх. Разверните угловые складки матраса.

13




Распылите дезинфицирующее средство по внутренней поверхности матраса, затем протрите ее одноразовым полотенцем. Заправьте внутрь угловые складки матраса.

14

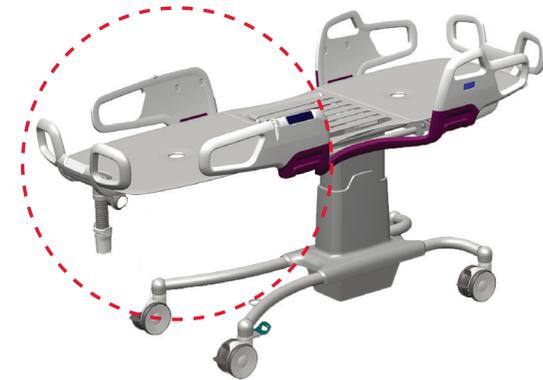


Распылите дезинфицирующее средство и протрите следующие детали ножной части каталки: ножную панель, боковые ограждения, опорную пластину, зону гибкости и верхний сливной патрубок.

15

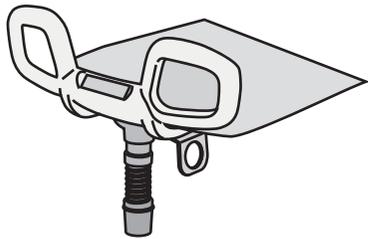

Распылите дезинфицирующее средство на верхний сливной патрубок и очистите его щеткой для мытья бутылок.

16

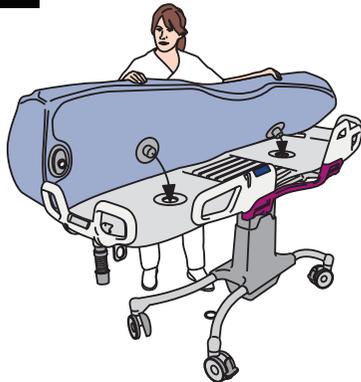

Уложите матрас в исходное положение.

17




Распылите дезинфицирующее средство. Начните с верхней части матраса, спускаясь вниз к колесам.

18



Протрите одноразовым полотенцем. Начните с верхней части матраса, спускаясь вниз к колесам.

19

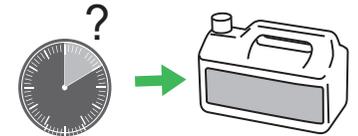


Выдержите время, необходимое для воздействия дезинфицирующего средства.

Продолжение на следующей странице


Дезинфекция (продолжение)

20

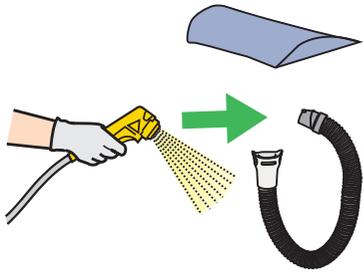

Отдельно обработайте дезинфицирующим средством и протрите одноразовым полотенцем подушку и нижний сливной патрубок.

21

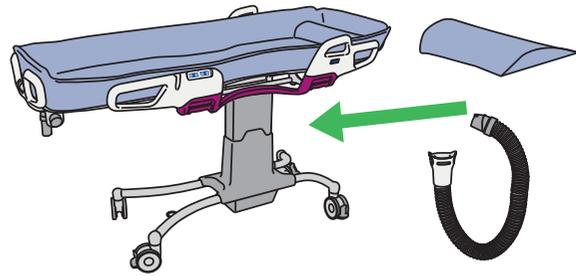

Прикрепите нижний сливной патрубок к верхнему сливному патрубку и положите подушку на матрас.

22



Промойте все детали холодной водой до полного удаления видимых остатков дезинфицирующего средства. Начните с верхней части матраса, спускаясь вниз к колесам. Промойте каталку под матрасом.

23



Вытрите все детали насухо одноразовыми полотенцами.