


تابع الخطوات في الصفحة التالية

٨

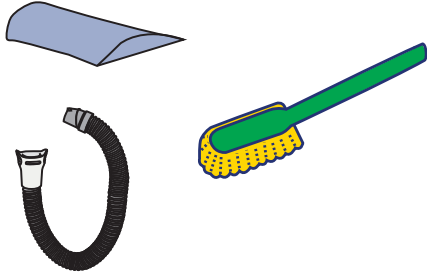


استخدم فرشاة تنظيف ذات شعيرات ناعمة.
افرك الوسادة ومنفذ التصريف السفلي بشكل منفصل.
تجنب ملامسة المرتبة حتى يتم تطهير الوسادة.

٧



نظف الجزء السفلي من المرتبة ولوحات الدعم والجانب الخارجي من
منفذ التصريف العلوي.


٦

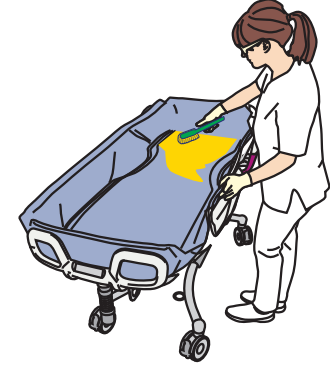

استخدم فرشاة تنظيف ذات شعيرات ناعمة ومطهرًا.
افرك من أعلى المرتبة متحركًا لأسفل باتجاه العجلات.
استخدم فرشاة زجاجات مغمورة في مطهر.
نظف منفذ التصريف العلوي.

التطهير

١١

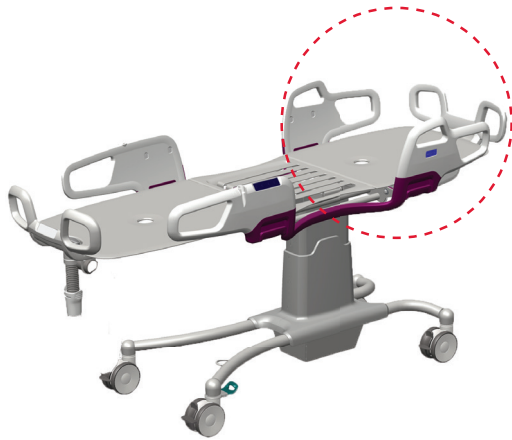

قم بفرش المطهر وتنظيف الأجزاء الأتية عند طرف الرأس: لوحة الرأس والدعامات الجانبية
ولوحة الدعم والمنطقة المرنة باستخدام منشفة معدة للاستخدام مرة واحدة.

١٠



نظف الجانب الخلفي من المرتبة باستخدام منشفة
معددة للاستخدام مرة واحدة.


٩



ارفع المرتبة وضعها على لوحة القدم والدعامات الجانبية.
ضع المرتبة بحيث يكون جانبيها الخلفي متجهًا لأعلى.
قم بفرش المطهر على الجانب الخلفي من المرتبة.

تابع الخطوات في الصفحة التالية

١٢

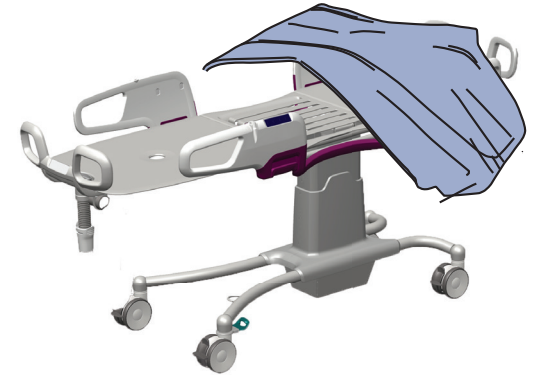


ضع الجانب الخلفي الذي تم تطهيره من المرتبة فوق لوحة الرأس والدعامات الجانبية التي تم تطهيرها. ضع المرتبة بحيث يكون الجزء الداخلي الذي لم يتم تطهيره منها متجهًا لأعلى. ادفع ثنيات زوايا المرتبة للخارج.

١٣




قم برش المطهر وتنظيف الجزء الداخلي من المرتبة باستخدام منشفة معدة للاستخدام مرة واحدة. ادفع ثنيات زوايا المرتبة للداخل.

١٤

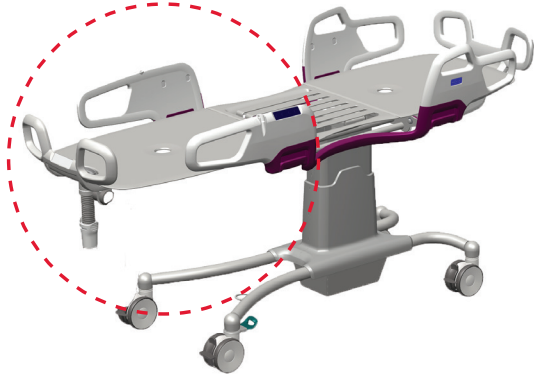


قم برش المطهر وتنظيف الأجزاء الأتية عند طرف القدم: لوحة القدم والدعامات الجانبية ولوحة الدعم والمنطقة المرنة ومنفذ التصريف العلوي باستخدام منشفة معدة للاستخدام مرة واحدة.

١٥

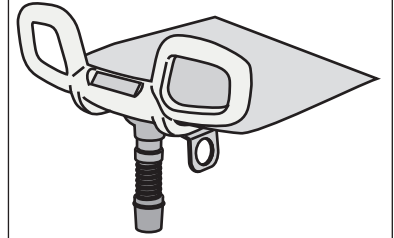

قم برش المطهر على منفذ التصريف العلوي وتنظيفه باستخدام فرشاة الزجاجات.

١٦

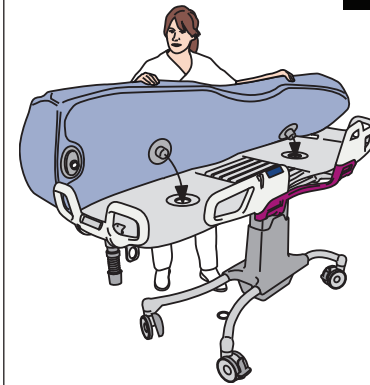

ضع المرتبة في موضعها الأصلي.

١٧




قم برش المطهر. ابدأ من أعلى المرتبة متحركًا لأسفل باتجاه العجلات.

١٨



نظف باستخدام منشفة معدة للاستخدام مرة واحدة. ابدأ من أعلى المرتبة متحركًا لأسفل باتجاه العجلات.

١٩

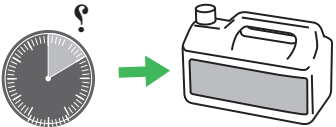

اترك المطهر ملامسًا للسطح وقتًا كافيًا.

تابع الخطوات في الصفحة التالية

