

Почистване


Разрешени дезинфектанти

- Arjo Clean
- Arjo General Purpose Disinfectant
- Arjo Disinfectant Cleanser IV
- Arjo All Purpose Disinfectant
- Arjo CenKleen IV

Акcesoари


- Защитни очила
- Защитни ръкавици
- Спрей бутилка (ако не е достъпен панел за душ)
- Дезинфекционна течност
- Кърпи за еднократна употреба
- Мека четка за почистване
- Четка за бутилка

1

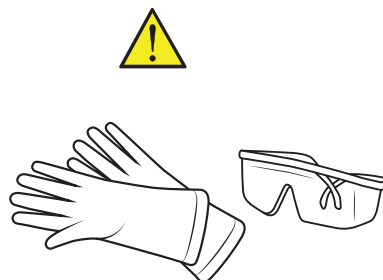


Сложете си предпазни ръкавици и очила.

2

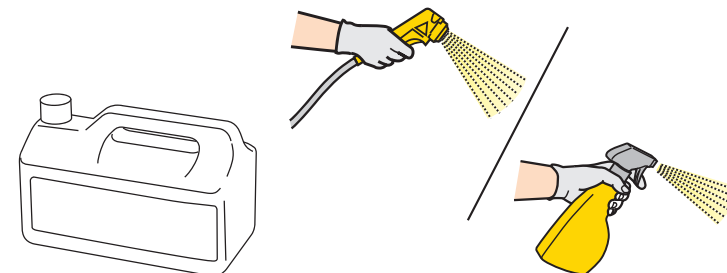


Проверете дали дезинфектантът е смесен в съответствие със:
– етикета на шишето с дезинфектант или
– съотношението за смесване, посочено в ИЗУ на панела за душ

3

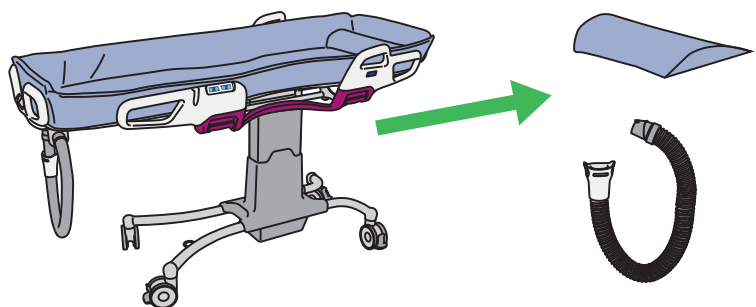


Свалете долния дренаж и възглавницата.

4

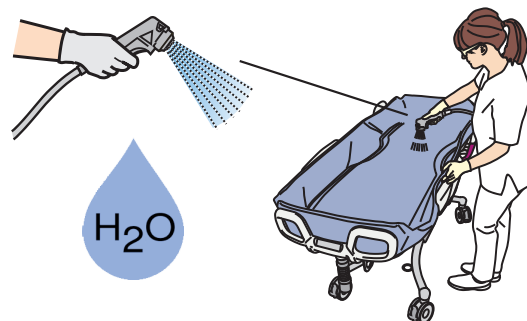

Изплакнете с вода. Започнете от горната част на матрака надолу към колелата.

5

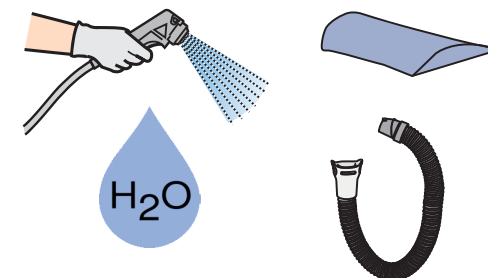


Изплакнете долния дренаж и възглавницата с вода.

Продължете със стъпките на следващата страница

Почистване – продължение

6

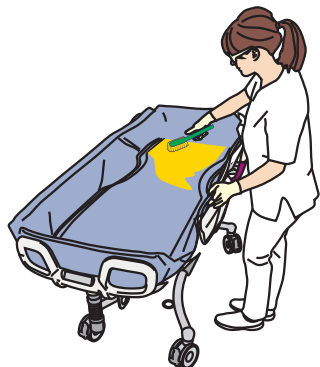


Използвайте четка за почистване с мек косъм и дезинфектант. Търкайте от горната част на матрака надолу към колелата. Използвайте четка за шишета, напоена с дезинфектант. Почистете горния дренаж.

7



Почистете долната страна на матрака, опорните плочи и външната част на горния дренаж.


8

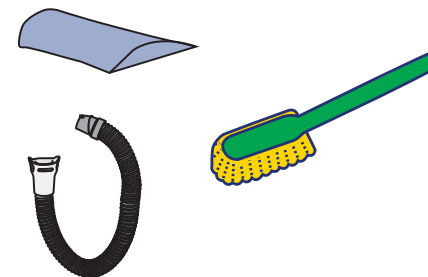

Използвайте четка за почистване с мек косъм. Изтъркайте възглавницата и долния дренаж поотделно. Избягвайте контакт с матрака до дезинфекцирането на възглавницата.

Дезинфекция

9

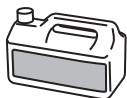


Вдигнете и поставете матрака върху панела за краката и страничните опори. Задната страна на матрака трябва да сочи нагоре. Напръскайте задната страна на матрака с дезинфектант.

10



Почистете задната страна на матрака с кърпа за еднократна употреба.

11

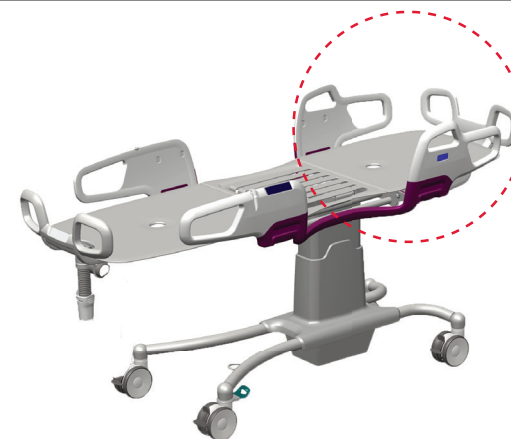


Напръскайте с дезинфектант и почистете следните части при края за главата: панела за главата, страничните опори, опорната плоча и гъбковата зона с кърпа за еднократна употреба.

Продължете със стъпките на следващата страница

Дезинфекция – продължение

12

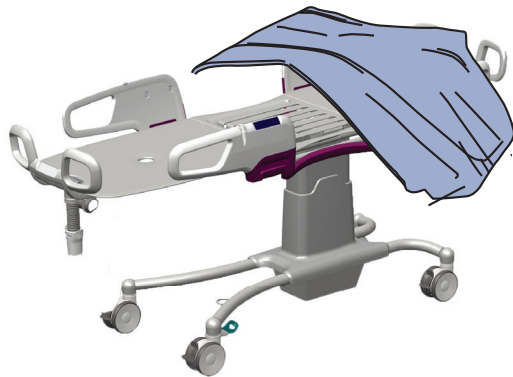


Поставете дезинфекцираната задна страна на матрака върху дезинфекцирания панел за главата и страничните опори. Недезинфекцираната вътрешна страна на матрака трябва да сочи нагоре. Избутайте навън гънките на матрака в ъглите.

13




Напръскайте с дезинфектант и почистете вътрешна страна матрака с кърпа за еднократна употреба. Избутайте навътре гънките на матрака в ъглите.

14

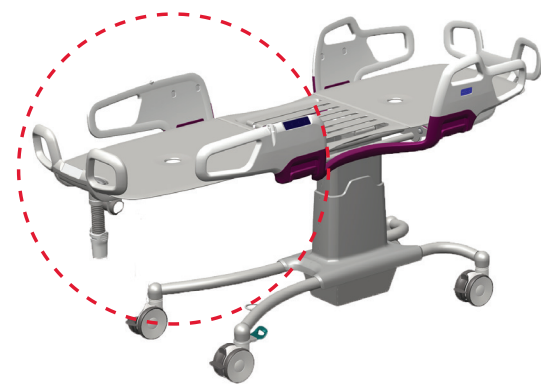


Напръскайте с дезинфектант и почистете следните части при края за краката: панела за краката, страничните опори, опорната плоча, гъвката зона и горния дренаж с кърпа за еднократна употреба.

15

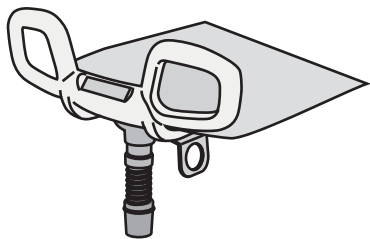

Напръскайте с дезинфектант горния дренаж и го почистете с четка за шишета.

16

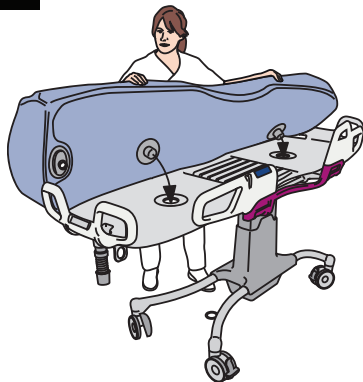

Поставете матрака в първоначалната му позиция.

17




Напръскайте с дезинфектант. Започнете от горната част на матрака надолу към колелата.

18



Почистете с кърпа за еднократна употреба. Започнете от горната част на матрака надолу към колелата.

19

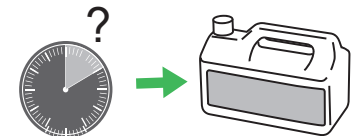


Оставете достатъчно време за контакт с дезинфектанта.

Продължете със стъпките на следващата страница


Дезинфекция – продължение

20

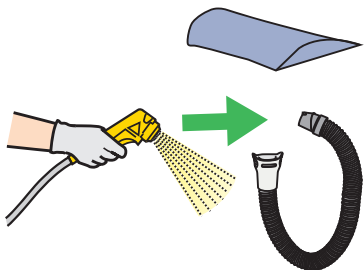


Напръскайте с дезинфектант и почистете възглавницата и долния дренаж поотделно с кърпа за еднократна употреба.

21

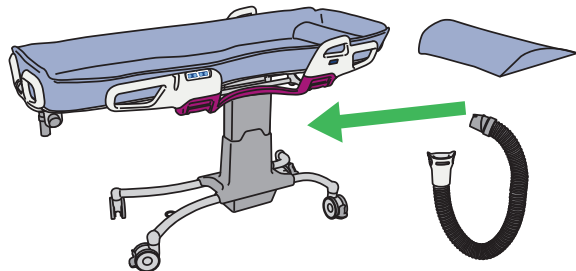

Закачете долния дренаж към горния дренаж и поставете възглавницата на матрака.

22

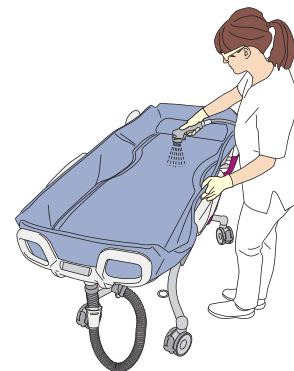

Изплакнете всички части със студена вода, докато изчезнат всички следи от дезинфектанта. Започнете от горната част на матрака надолу към колелата. Изплакнете областта под матрака.

23



Избършете до сухо всички части с кърпи за еднократна употреба.

