


Lubatud desinfitseerimisvahendid

- Arjo Clean
- Arjo General Purpose Disinfectant
- Arjo Disinfectant Cleanser IV
- Arjo All Purpose Disinfectant
- Arjo CenKleen IV

Lisatarvikud


- Kaitseprillid
- Kaitsekindad
- Pihustuspudel (kui dušipaneel puudub)
- Desinfitseerimisvedelik
- Ühekordselt kasutatavad lapid
- Pehme harjastega puhastushari
- Pudelihari

1

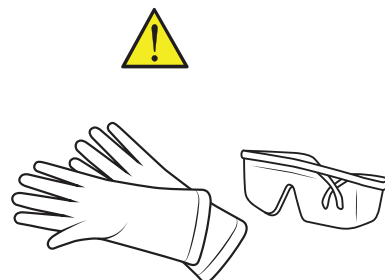


Tõmmake kätte kaitsekindad ja pange pähe kaitseprillid.

2

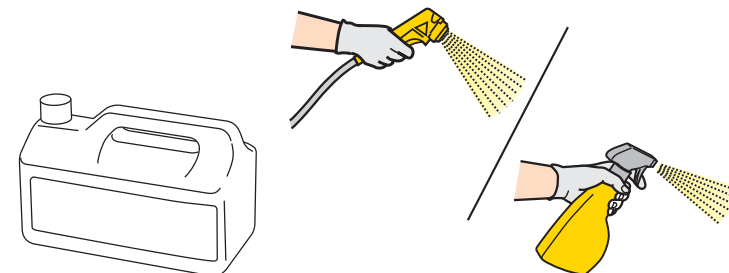


Veenduge, et desinfitseerimisvahend on segatud vastavalt:
- desinfitseerimisvahendi pudeli sildile või
- segamissuhte, mis on toodud Shower Paneli kasutusjuhendis.

3

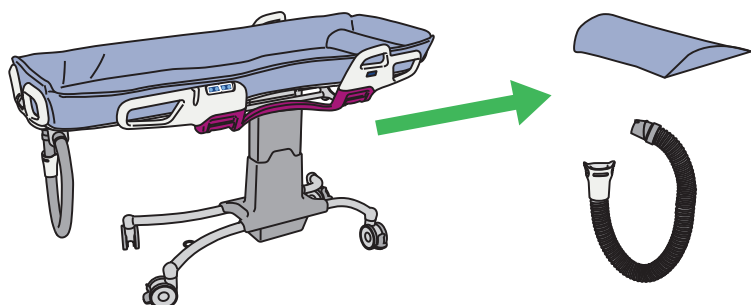


Eemaldage alumine äravool ja padi.

4

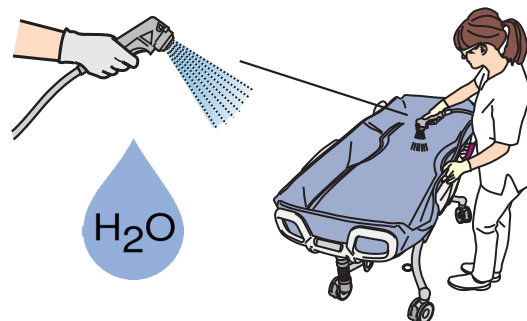

Loputage veega. Alustage madratsi pealt ja liikuge allapoole rataste suunas.

5

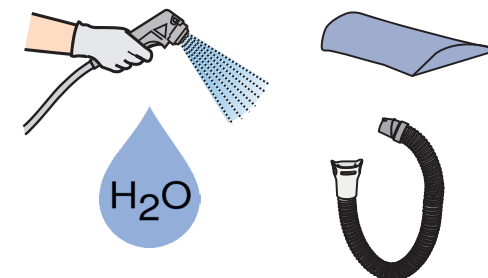


Loputage alumist äravoolu ja patja veega.

Protsessi etapid jätkuvad järgmisel lehel

Puhastamine jätkub

6

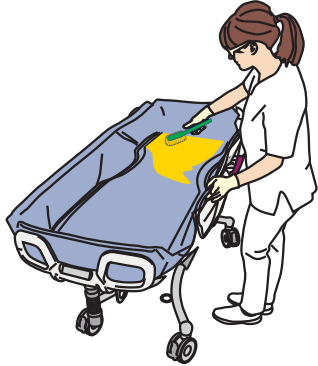


Kasutage pehmete harjastega puhastusharja koos desinfitseerimisvahendiga. Harjake matrassi pealt allapoole rataste suunas liikudes. Kasutage desinfitseerimisvahendisse kastetud pudeliharja. Puhastage ülemine äravool.

7



Puhastage matrassi alumine külg, tugiplaadid ja ülemise äravoolu väliskülg.


8

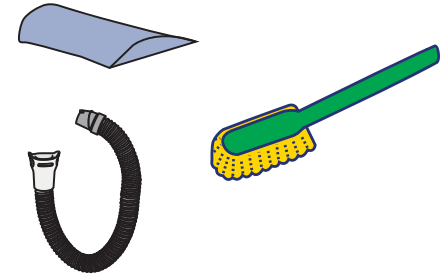

Kasutage pehmete harjastega puhastusharja. Puhastage patja ja alumist äravoolu eraldi. Vältige kokkupuudet matrassiga, kuni padi on desinfitseeritud.

Desinfitseerimine

9

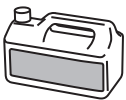


Tõstke matrass üles ja paigutage see üle jalgpaneeli ja külgtugede. Matrassi alumine külg peaks ülespoole jääma. Pihustage desinfitseerimisvahendit matrassi alumisele küljele.

10



Puhastage matrassi alumist poolt ühekordselt kasutatava lapiga.

11

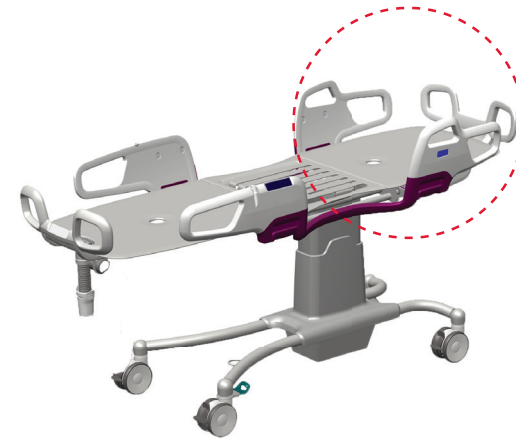


Pihustage desinfitseerimisvahendit ja puhastage peatsis järgmised osad: peapaneel, külgtööd, tugiplaat ja elastne tsoon.

Protsessi etapid jätkuvad järgmisel lehel

Desinfitseerimine jätkub

12

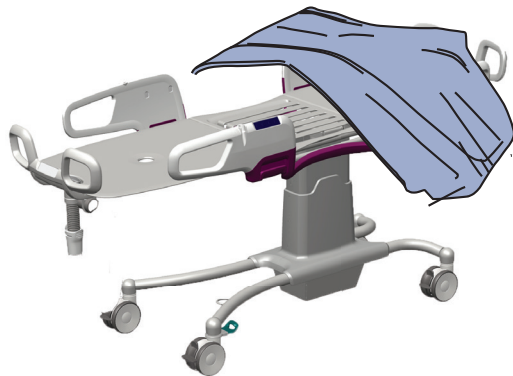


Asetage madratsi desinfitseeritud alumine külg desinfitseeritud peapaneeli ja külgtugede peale. Madratsi desinfitseerimata pealmine pool peaks jääma ülespoole. Suruge madratsi nurgavoldid välja.

13




Pihustage desinfektsioonivahendit ja puhastage madratsi pealmist poolt ühekordselt kasutatava lapiga. Suruge madratsi nurgavoldid sisse.

14

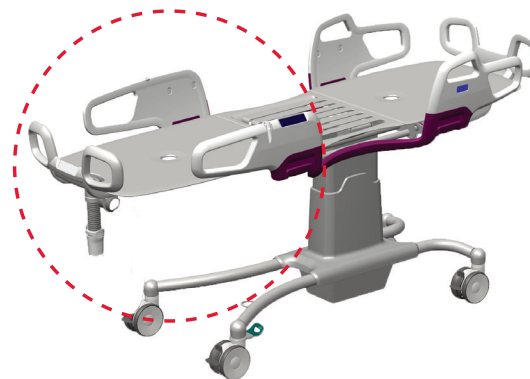


Pihustage desinfektsioonivahendit ja puhastage jalutsis järgmised osad: jalgpaneel, külgtued, tugiplaad, elastne tsoon ja ülemine äravool.

15

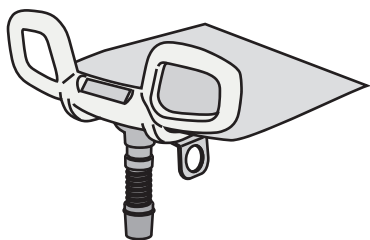


Pihustage desinfektsioonivahendit ülemisele äravoolule ja puhastage seda pudelihaarjaga.

16

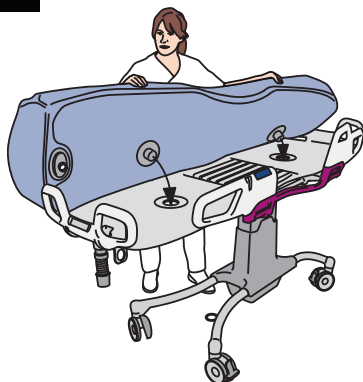

Pange madrats selle algseesse asendisse.

17

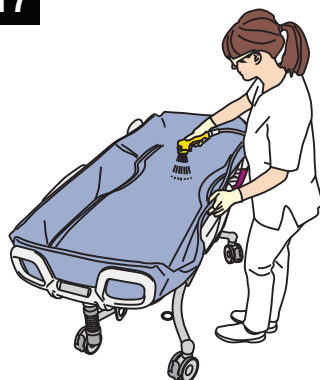


Pihustage desinfektsioonivahendit. Alustage madratsi pealt ja liikuge allapoole rataste suunas.

18



Puhastamiseks kasutage ühekordset lappi. Alustage madratsi pealt ja liikuge allapoole rataste suunas.

19

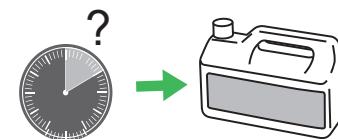


Laske desinfektsioonivahendil piisava aja mõjuda.

Protsessi etapid jätkuvad järgmisel lehel


Desinfitseerimine jätkub

20

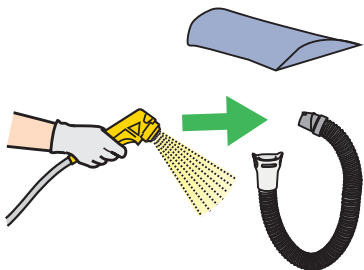


Pihustage desinfektsioonivahendit, et puhastada padi ja alumine äravool eraldi, kasutades selleks ühekordset lappi.

21

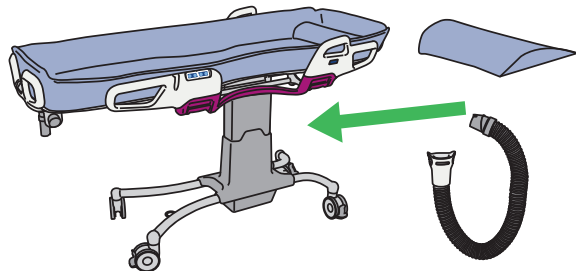

Kinnitage alumine äravool ülemise äravoolu külge ja asetage padi madratsile.

22

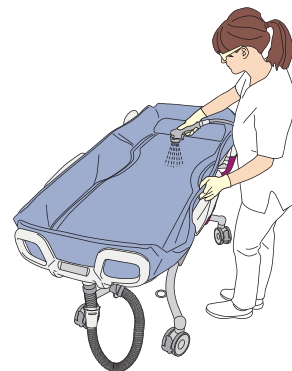

Loputage kõiki osasid külma veega, kuni desinfektsioonivahendi jääke enam ei ole. Alustage madratsi pealt ja liikuge allapoole rataste suunas. Loputage madratsi alt.

23



Pühkige kõik osad täielikult kuivaks, kasutades selleks ühekordseid lappe.

