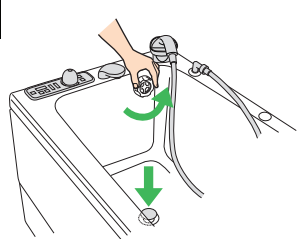


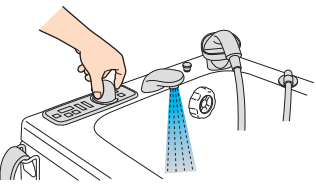
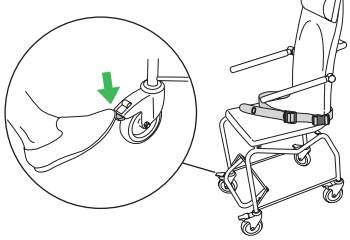
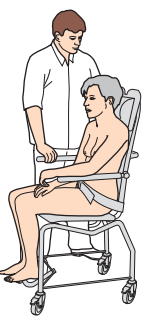
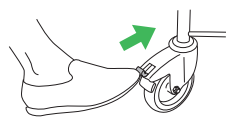
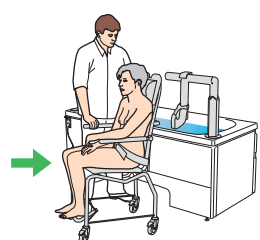




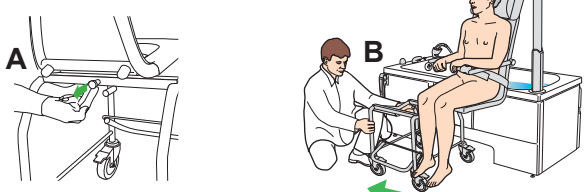


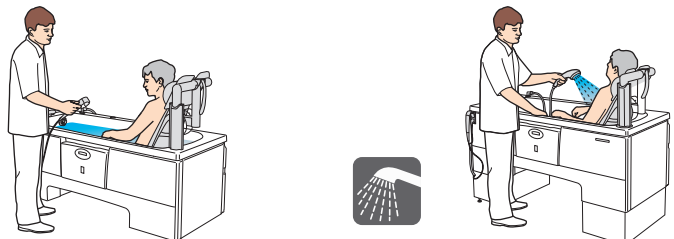
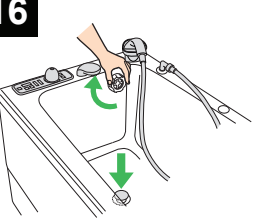


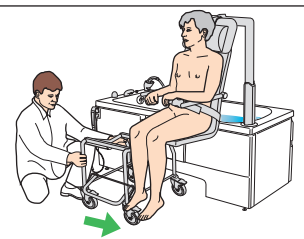

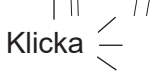

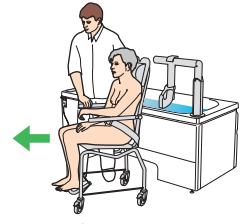


Malibu/Sovereign

Assisterade bad med förflyttningsstol

- 1** 
Stäng avtapningen.
- 2**  
Skållningsrisk
Tryck på knappen för automatisk påfyllning. Känn på vattnet, utan handske på handen. Justera vattentemperaturen vid behov.
- 3** 
Påfyllningen avbryts automatiskt när badkar är fyllt med vatten.
- 4** 
Lås bromsarna.
- 5** 
Placera patienten på förflyttningsstolen. Placera säkerhetsbältet på patienten.
- 6** 
Lossa bromsarna.
- 7** 
Placera förflyttningsstolen bredvid lyftarmen.
- 8** 
Sänk badkaret till dess lägsta nivå.
- 9** 
Tryck på knappen Lyft ut för att föra lyftarmen ut ur badkaret.
- 10** 
Fallrisk
Fäst förflyttningsstolen på lyftarmen.
- 11** 
Klämrisk
Höj lyftarmen genom att trycka ner knappen Lyft in så att förflyttningsstolen låses på lyftarmen och chassit går fritt från golvet.
- 12** 
A: Dra ut den fjäderbelastade spärren (A) medan du skjuter ut chassit från förflyttningsstolen (B).
- 13** 
Klämrisk
Tryck på knappen Lyft in. Stolen roterar då in i badkaret. Hjälp patienten att röra benen.
- 14** 
Justera badkarets höjd enligt vårdpersonalens behov.
- 15** 
Bada och duscha patienten.

Avsluta badet

- 16** 
Öppna avtapningen.
- 17** 
Sänk badkaret till dess lägsta nivå.
- 18** 
Klämrisk
Tryck på knappen Lyft ut. Stolen roterar då ut ur badkaret. Hjälp patienten att röra benen.
- 19** 
Sänk ned stolen, men lämna tillräckligt med utrymme för att skjuta in chassit i skenorna under stolen.
- 20** 
Fallrisk
Klicka 
Bromsarna måste vara upplåsta. Den fjäderbelastade spärren måste klicka på plats. Det hjulförsedda chassit måste vara ordentligt fäst.
- 21** 
Fallrisk
Tryck på knappen Lyft ut för att sänka stolen till golvet. Avbryt sänkningen när det hjulförsedda chassit vidrör golvet. Lyft säkerhetsspärren på lyftarmen (A) och fortsätt därefter med sänkningen (B).
- 22** 
Se till att stolen är fullständigt frikopplad före förflyttning.