



Malibu/Sovereign

Nødstop

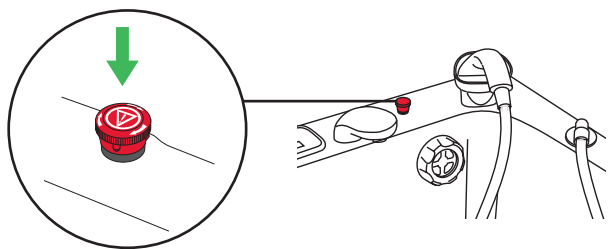

Tryk på knappen for at afbryde alle funktioner.
Drej den med uret for at udløse den.


Plejemodtagerspærring

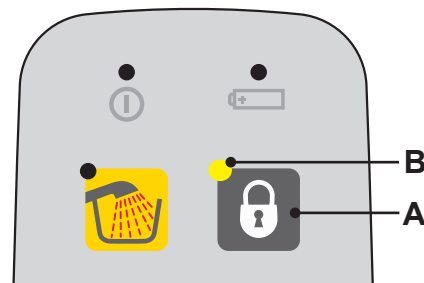

Tryk og hold knappen (A) til plejemodtagerspærring nede i 3 sekunder for at deaktivere alle panel- og fjernstyringsknapper. Plejemodtagerspærring er indikeret med en gul lysdiode (B).


Tryk og hold knappen nede i 3 sekunder for at genaktivere alle funktioner.

Håndbetjening – Løft ind

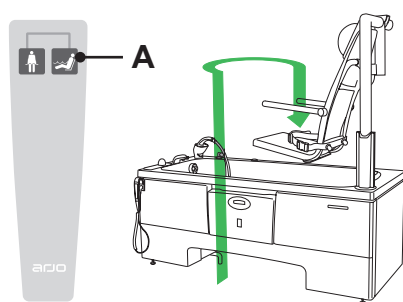

Tryk og hold knappen Løft ind (A). Løftearmen foretager en fuldstændig bevægelsessekvens; fra udgangsstillingen uden for badekarret op over kanten af badekarret og ned i badekarret.


Håndbetjening – Løft ud

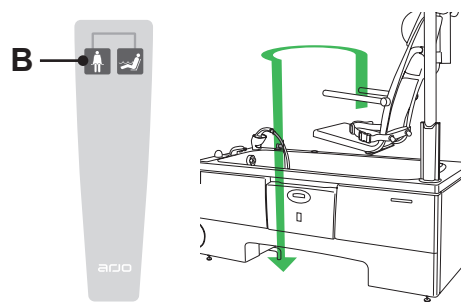

Tryk og hold knappen Løft ud (B). Sekvensen udføres i modsat rækkefølge.

Badekarret skal være i den laveste position.


Temperaturdisplay

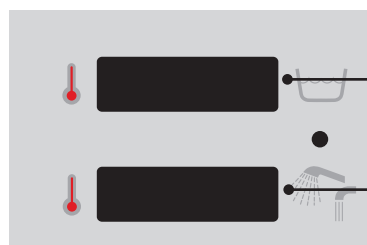

Viser den aktuelle vandtemperatur i badekarret.

Viser temperaturen for det aktuelle fyldnings- eller brusevand.

Skoldningsbeskyttelse

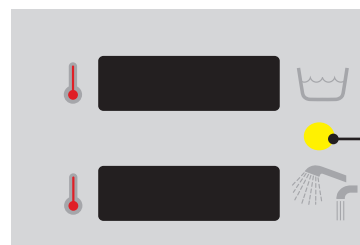

Den elektroniske skoldningsbeskyttelse slukker for vandet, hvis et farligt temperaturniveau registreres.

Lysdioden imellem skærmene lyser, hvis der måles en temperatur over eller lig med 45 °C (113 °F) efter 10 sekunder.

Autofyld




Autofyld-funktionen har et forudindstillet vandniveau.

- Aktivér funktionen ved at trykke på knappen Autofyld.
- Funktionen standser automatisk, når fyldeniveauet er opnået.
- Tryk på knappen Autofyld igen, og opfyldningen fortsætter i yderligere 60 sekunder.

Autoskyl


Autoskyl-funktionen forebygger stillestående vand i brusesystemet.

Autoskyl-funktionen vil starte 30 timer efter sidste anvendelse af badekarret og derefter hver 24. time, hvis badekarret ikke benyttes.

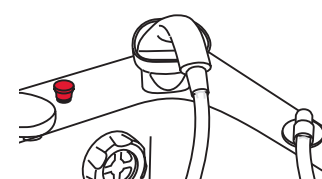


For at forebygge vandspild skal håndbruseren anbringes i holderen efter hver brug.

Luftspasystem (ekstraudstyr)

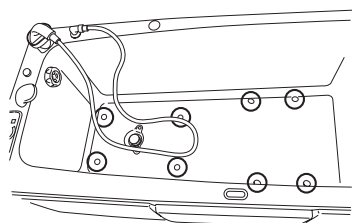


Massageeffekten opnås ved at indsprøjte luft igennem luftdyser i badevandet. Den anbefalede maksimale behandling med luftspasystemet er 15 minutter.

1

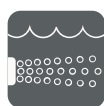


Når du trykker på tænd/sluk-knappen til luftspasystemet, starter luftblæseren på den mindste hastighed.

2

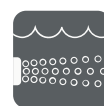

Luftstrålens intensitet øges ved at trykke på knappen igen.



3

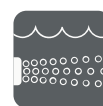





Tryk på TÆND/SLUK-knappen igen for at standse luftspasystemet.

Malibu/Sovereign

Sikkerhedssele

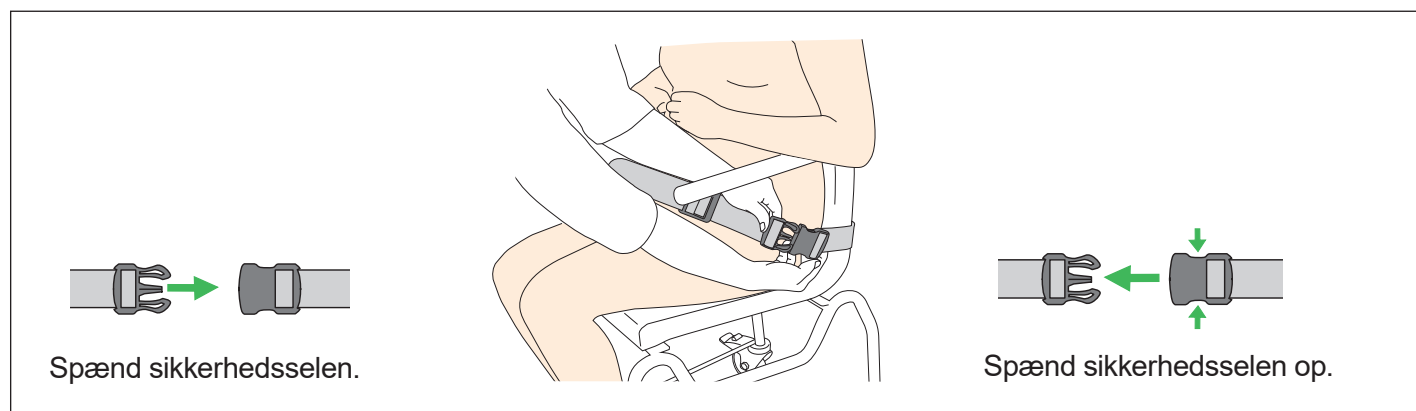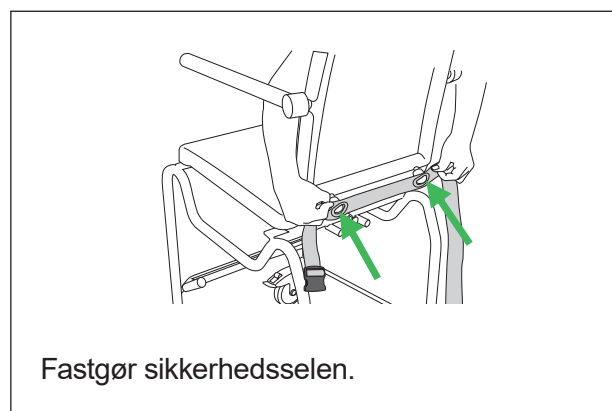

Tilpas sikkerhedssele

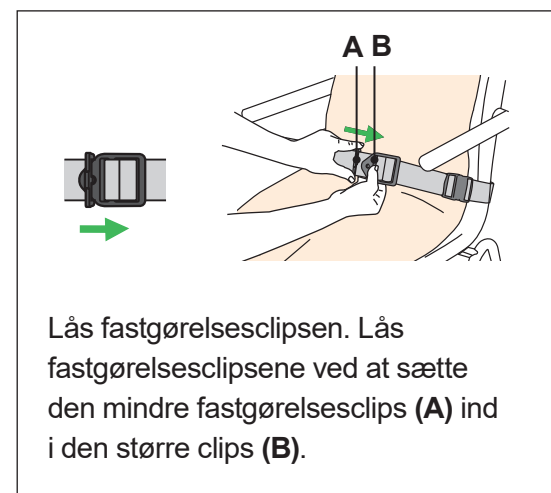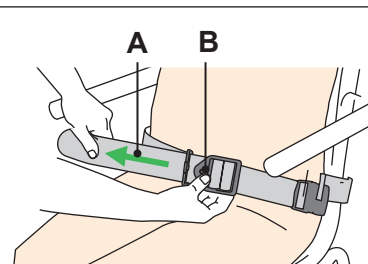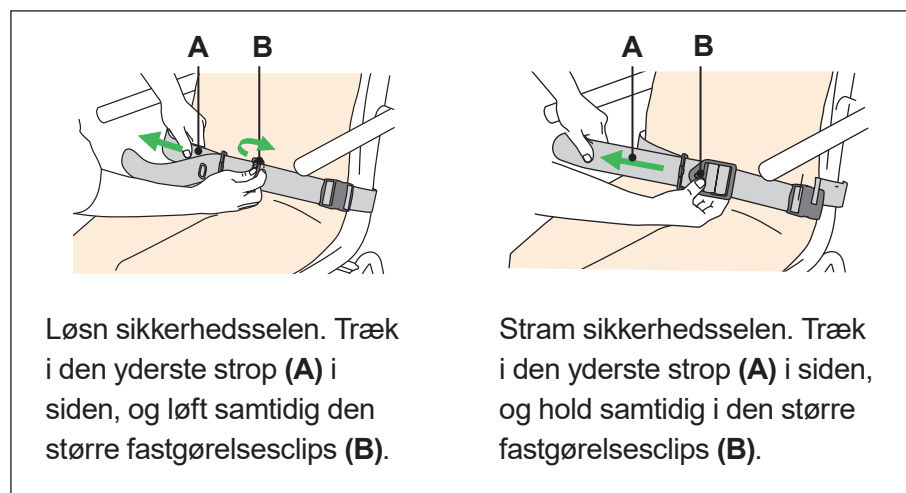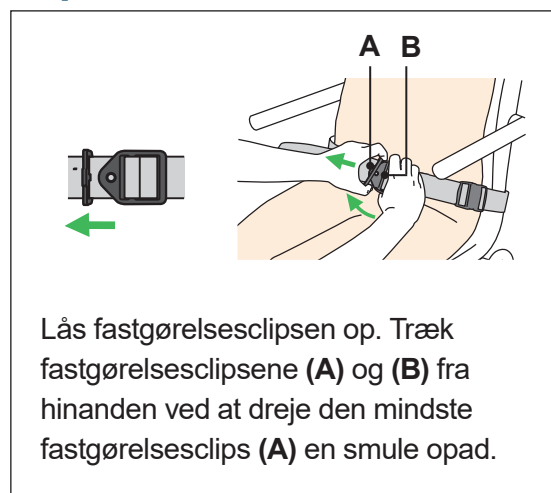


Montering af sæde



Afmontering af sæde



Montering af armlæn

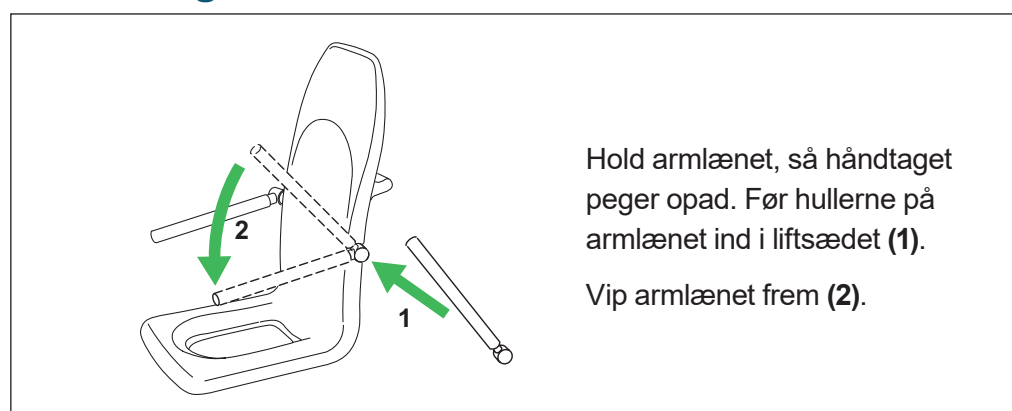

Fjern armlæn

