


# Malibu/Sovereign



## Parada de emergencia

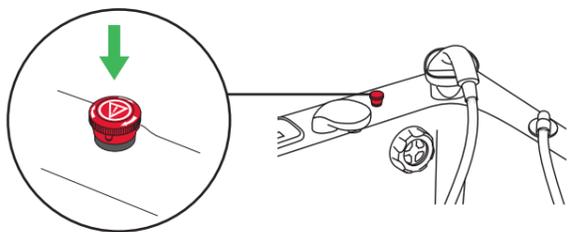

Pulse el botón para detener todas las funciones.  
Gírelo en el sentido de las agujas del reloj para liberarlo.


## Bloqueo del paciente



Mantenga pulsado el botón de bloqueo del paciente (**A**) durante 3 segundos para desactivar todos los botones del panel y del control remoto. El bloqueo del paciente se indica con un LED amarillo (**B**).


Para volver a activar todas las funciones, mantenga pulsado el botón durante 3 segundos

## Mando de control: entrada en la bañera

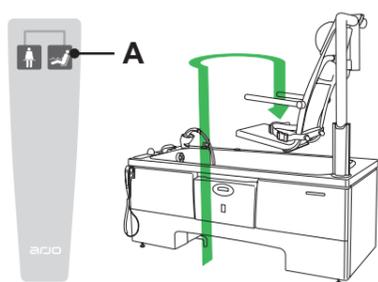

Mantenga pulsado el botón de introducción en la bañera (**A**). El brazo elevador realizará una secuencia completa de movimiento: desde el exterior de la bañera, pasará por encima del borde de esta y se introducirá en la misma.


## Mando de control: salida de la bañera

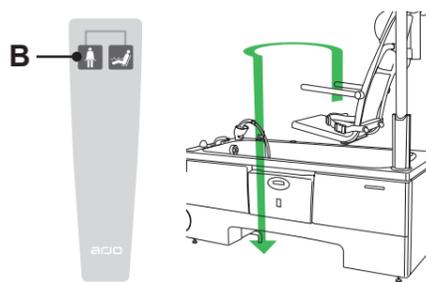

Mantenga pulsado el botón de extracción de la bañera (**B**). La secuencia se realizará en el orden inverso.


La bañera debe estar en su posición más baja.

## Indicador de temperatura

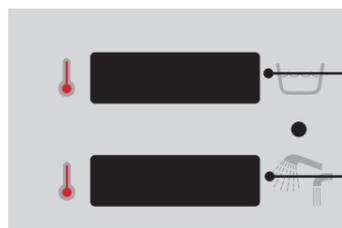

Muestra la temperatura actual del agua de la bañera.  
Indica la temperatura del agua de llenado o de la ducha activadas.

## Protección contra quemaduras

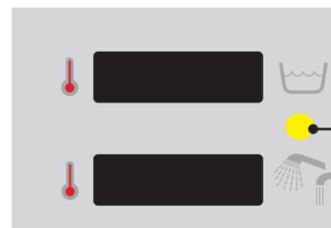

La protección contra quemaduras detiene el agua si se detecta un nivel de temperatura peligroso.

El LED situado entre las pantallas se enciende si se detecta una temperatura superior o igual a 45 °C (113 °F) pasados 10 segundos.

## Llenado automático



La función de llenado automático tiene un nivel de agua predeterminado.

- Para activarla pulse el botón de llenado automático.
- Cuando se alcanza el nivel de llenado, se para por sí sola.
- Si vuelve a pulsar el botón de llenado automático, continuará llenándose durante 60 segundos.

## Descarga automática


La función de descarga automática evita que quede agua estancada en el sistema de la ducha.

La función de descarga automática se inicia 30 horas después del último uso de la bañera y cada 24 horas si no se utiliza la bañera.



Para evitar derrames de agua, el cabezal de ducha debe colocarse en su soporte después de cada uso.

## Sistema Air spa (función opcional)

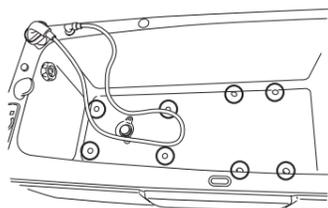

El efecto de masaje se obtiene inyectando aire a través de toberas en el agua de baño. El tratamiento máximo recomendado con el sistema Air Spa es de 15 minutos.

1



Pulse el botón de encendido/apagado del sistema Air Spa y el ventilador se encenderá a velocidad mínima.

2



Si se vuelve a pulsar el botón, aumentará la intensidad del aire.



3







Vuelva a pulsar el botón de encendido/apagado del sistema Air spa para detenerlo.

# Malibu/Sovereign


## Correa de seguridad

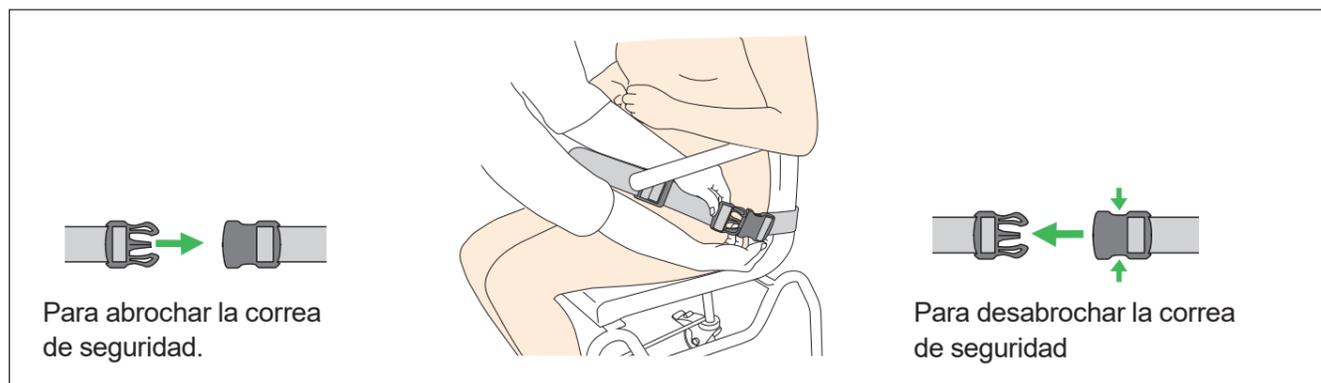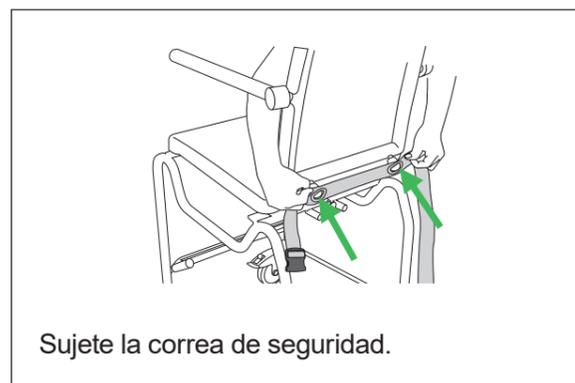

## Ajuste la correa de seguridad

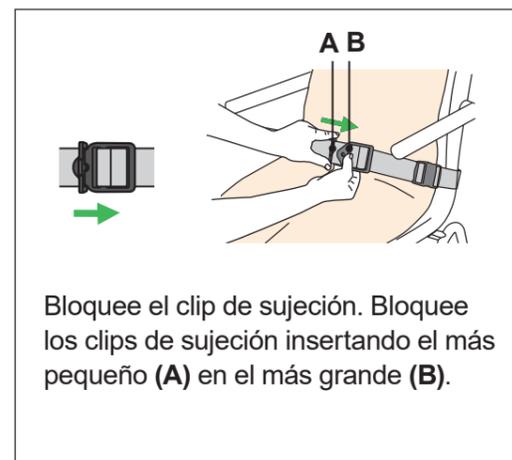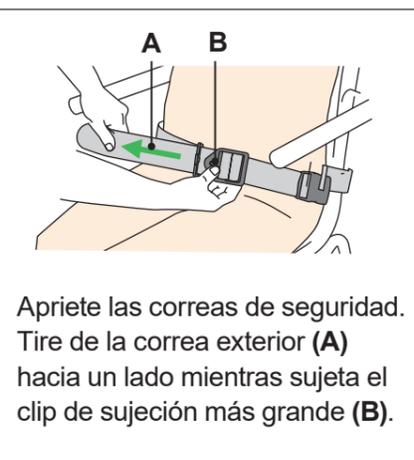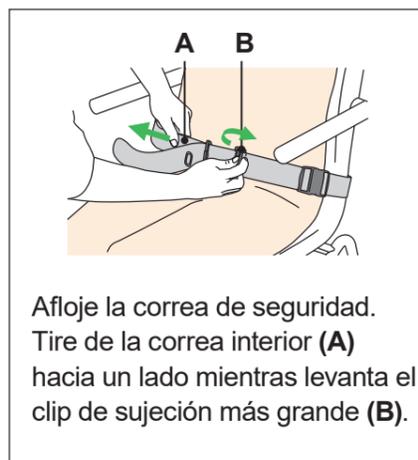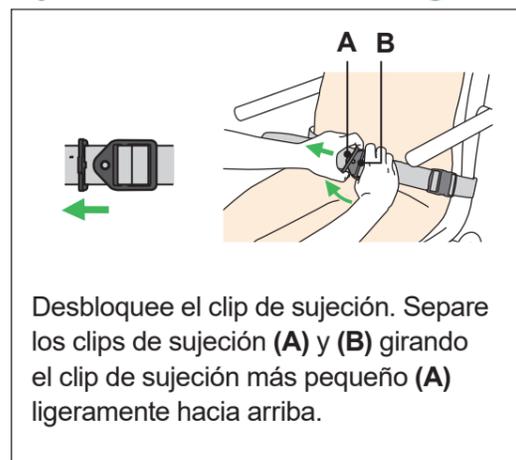


## Colocación del asiento

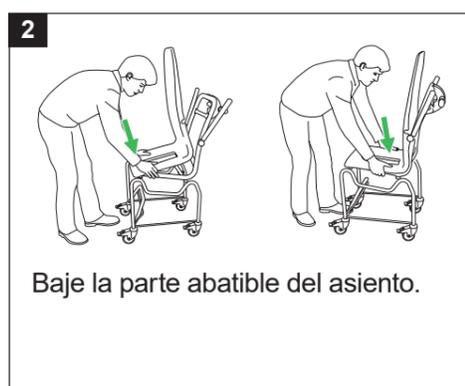

## Retirada del asiento



## Fijación del reposabrazos

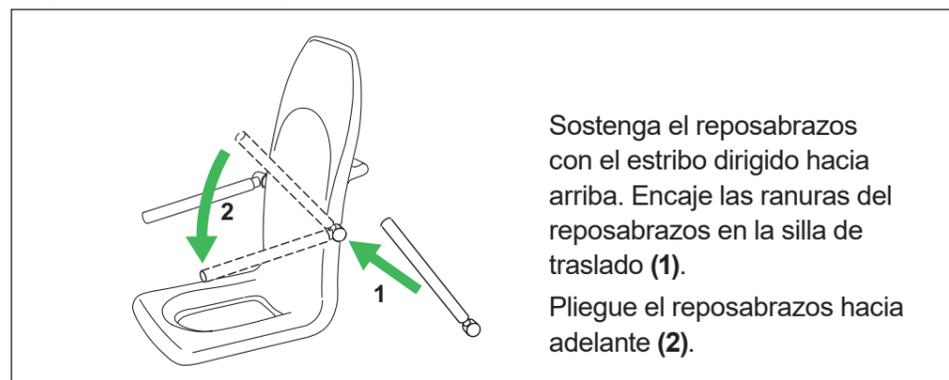

## Extracción del reposabrazos

