


Maxi Twin


Di chuyển khỏi ghế

1

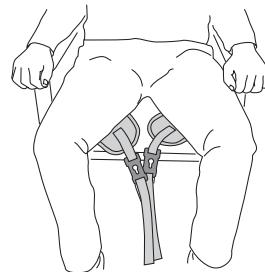

Đặt bộ dây móc treo quanh bệnh nhân để bao phủ phần lưng dưới bệnh nhân và đệm đỡ đầu bao phủ phía sau đầu. Kéo dây đai chân và cố định dưới đùi.


2

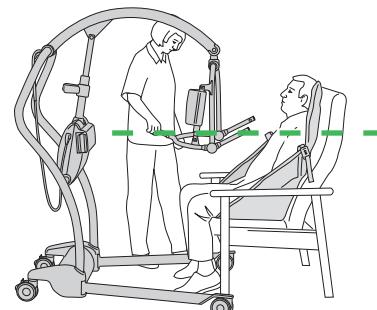

Đặt khung nâng ở phía trước bệnh nhân.
Nếu cần, mở chân khung nâng.
Điều chỉnh xà ngang ở độ cao của vai.


3

Băng đai có vòng

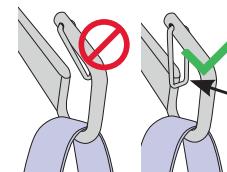


Đóng chốt

Băng đai có kẹp

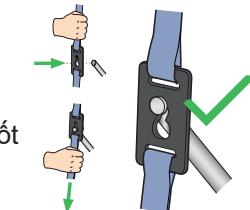

Gắn chốt gắn kẹp hoặc vòng đeo vào các điểm thích hợp trên thanh giằng.

4

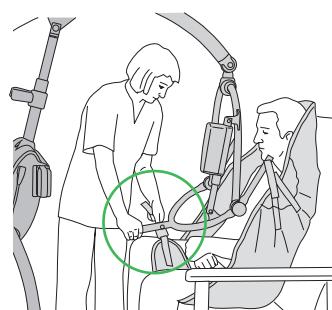

Đối với xe nâng dùng thanh chia tải DPS:
Nhấn xuống trên tay cầm định vị và gắn các kẹp dây đeo chân.

5



Rủi ro
té ngã



Rủi ro
bị vướng

Đảm bảo không cài phanh.
Đảm bảo dây đeo được cài chắc
chắn trước khi nâng bệnh nhân.



Sử dụng điều khiển cầm tay để nâng bệnh nhân,
điều chỉnh vị trí tay cầm cho đến khi bệnh nhân
dựa vào dây đeo.

Tiếp tục các bước ở trang tiếp theo




Di chuyển khỏi ghế (tiếp theo)

6




Đóng chân khung và di chuyển bệnh nhân.

7

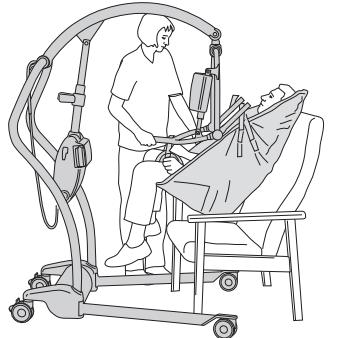

Hạ thấp bệnh nhân và điều chỉnh vị trí tay cầm để đưa họ vào vị trí thích hợp.


8

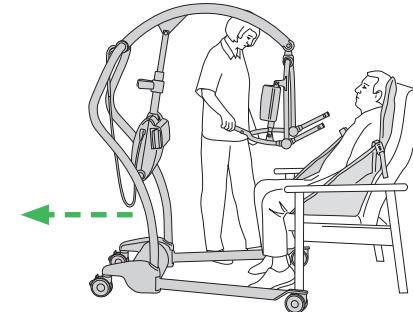

Tháo băng treo cổ định khôi thanh căng ngang.
Tháo xe nâng, đảm bảo chân và cơ thể của
bệnh nhân nằm trên bộ nâng.
Tháo dây đeo ra khỏi bệnh nhân.

Di chuyển từ giường

1

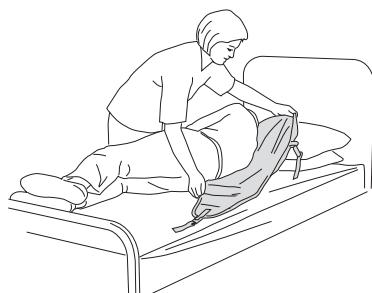


Lăn bệnh nhân về phía bạn. Gấp băng đai làm đôi và đặt băng đai sau lưng bệnh nhân.

2



Định vị bộ dây móc treo sao cho bệnh nhân
được lăn trở lại vị trí trung tâm trên bộ dây
móc treo.

3

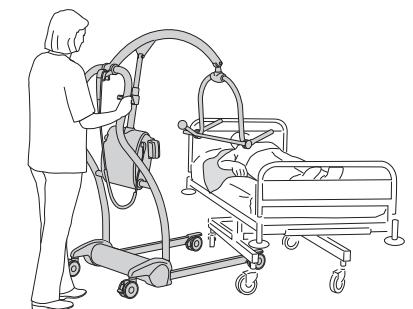


Tiến tới giường với mặt mở của thanh chia
tải hướng về phía ngực của bệnh nhân.

Tiếp tục các bước ở trang tiếp theo

Di chuyển khỏi ghế (tiếp theo)


4

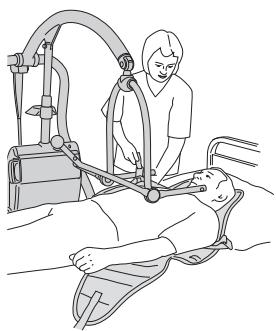

Định vị thanh chia tải ngay phía trên bệnh nhân. Nghiêng thanh chia tải cho đến khi chốt gắn dây đeo vai có thể kết nối với băng đai.


5

Băng đai có vòng

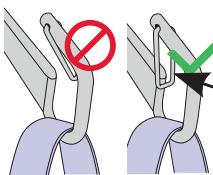

Đóng chốt

Băng đai có kẹp

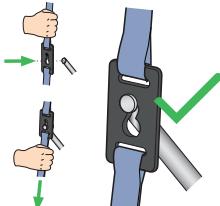

Gắn chốt gắn kẹp hoặc vòng đeo vào các điểm thích hợp trên thanh giằng.

6



Đối với xe nâng dùng thanh chia tải DPS:
Các dây đai chân phải được đặt dưới đùi.
Nhấn xuống trên tay cầm định vị và gắn
các kẹp dây đeo chân.


7



Rủi ro té ngã




Rủi ro bị vướng

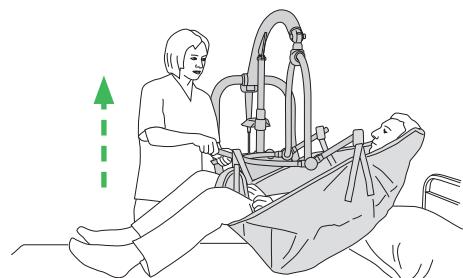

Đảm bảo không cài phanh. Đảm bảo dây đeo được cài chắc chắn trước khi nâng bệnh nhân.


Sử dụng điều khiển cầm tay để nâng bệnh nhân và điều chỉnh bệnh nhân vào vị trí thoải mái. Di chuyển bệnh nhân

8

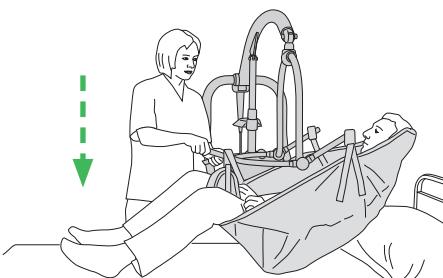

Khi quay trở lại giường: Sử dụng tay cầm nâng của băng đai để đặt bệnh nhân lên giường. Không kéo băng đai. Sử dụng điều khiển cầm tay để hạ thấp bệnh nhân.

9

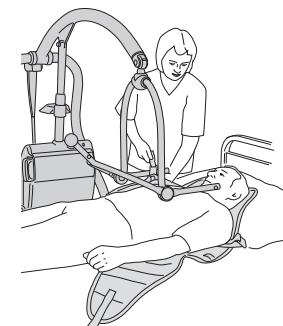

Tháo băng treo cổ định khỏi thanh căng ngang.
Tháo xe nâng, đảm bảo chân và cơ thể của bệnh nhân nằm trên bộ nâng.
Tháo dây đeo ra khỏi bệnh nhân.

