



העברה מכיסא

1

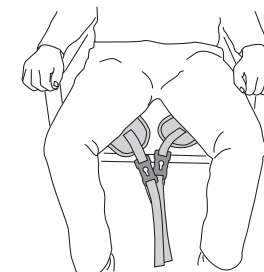

כרוך את המתלה סביב המטופל כך שיתמוך בחלק הגב התחתון והמשענת לראש תתמוך בחלק האחורי של הראש. פתח את החלקים המיועדים לרגליים ומקם אותם מתחת לכל ירך.

2

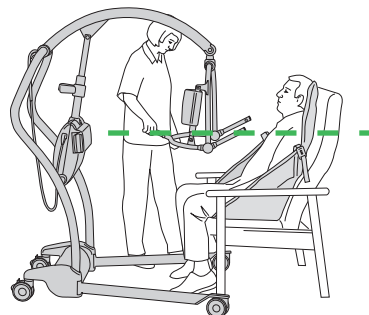


מקם את המנוף אל מול המטופל. פתח את רגלי השלדה בעת הצורך. כוון את זרוע ההרמה לגובה הכתפיים.

3

מתלה תפס

מתלה לולאה

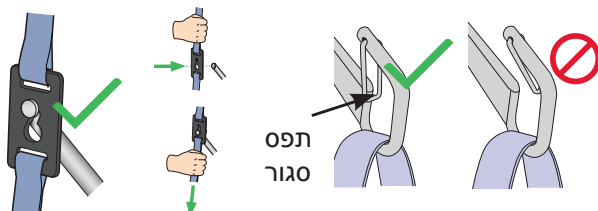


חבר את התפסים או הלולאות לחיבור של המתלה למיקום מים המיועדים לכך בזרוע ההרמה.

4



במתלים עם זרוע הרמה DPS: לחץ על ידית המיקום וחבר את התפסים של רצועת הרגל.

5

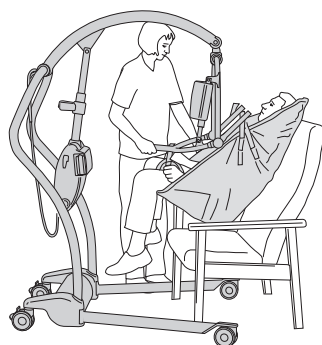

הרם את המטופל בעזרת השלט הידני, כוון את ידית המיקום עד למצב שבו המטופל נמצא במצב שכיבה במתלה.



סכנת לכידה




סכנת נפילה

ודא שהבלמים משוחררים. ודא שהמתלה מחובר היטב לפני שתרים את המטופל.

המשך לבצע את הפעולות המפורטות בעמוד הבא


העברה מכיסא (המשך)

6

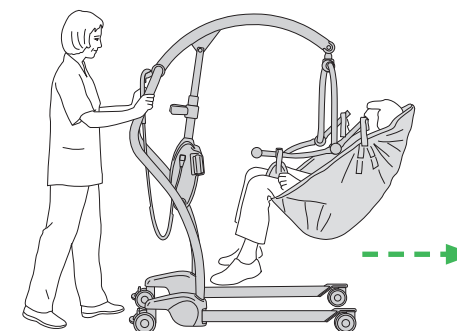


סגור את רגלי השלדה ושנע את המטופל.

7

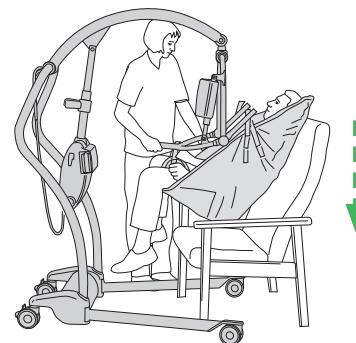


הנמך את המטופל וכוון את ידיית המיקום על מנת להביא את המטופל למצב המבוקש.

8

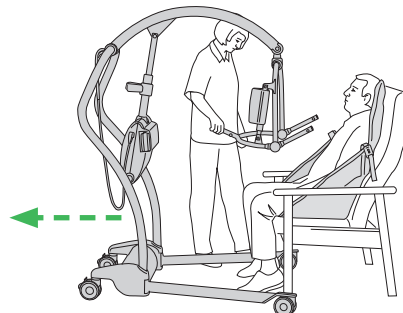

נתק את המתלה מזרוע ההרמה.
הזז את המנוף וודא שגופו ורגליו של המטופל רחוקים מהמנוף.
נתק את המנוף מהמטופל.

1

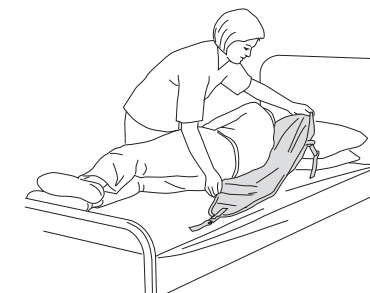


גלגל את המטופל לעברך. קפל את המתלה באמצע והנח אותו מאחורי הגב של המטופל.

2



מקם את המתלה כך שניתן יהיה לגלגל את המטופל מחלקו המרכזי של המתלה.


3

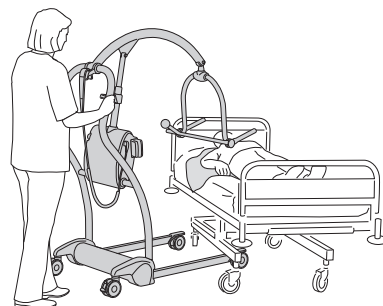

התקרב אל המיטה בצידה הפתוח של זרוע ההרמה הפונה לכיוון ראשו של המטופל.


המשך לבצע את הפעולות המפורטות בעמוד הבא

4

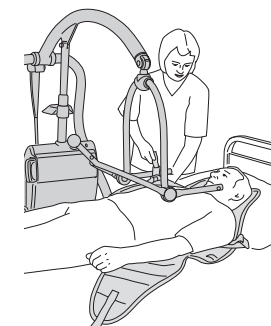

מקם את זרוע ההרמה ממש מעל המטופל. הטה את זרוע ההרמה עד שניתן יהיה לחבר את המתלה לחורי החיבור לכתפיים.

5

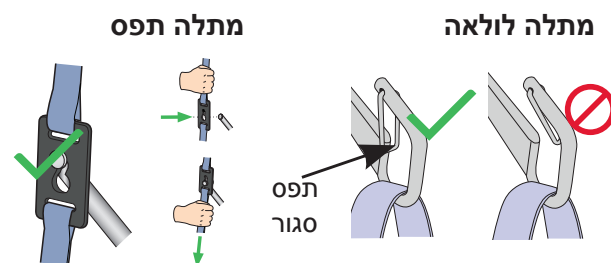


חבר את התפסים או הלולאות לחיבור של המתלה למיקום מים המיועדים לכך בזרוע ההרמה.

6



במתלים עם זרוע הרמה DPS: יש למקם את החלקים המיועדים לרגליים מתחת לירך. לחץ על ידיית המיקום וחבר את התפסים של רצועת הרגל.


7

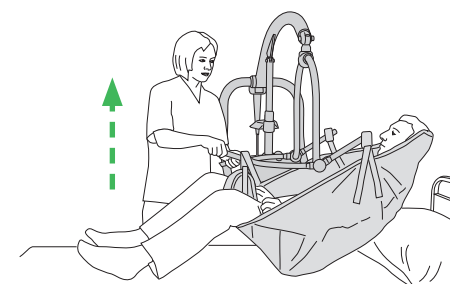

ודא שהבלמים משוחררים. ודא שהמתלה מחובר היטב לפני שתרים את המטופל.


הרם את המטופל בעזרת השלט הידני וכונן את המטופל למצב נוח. העבר את המטופל.

8

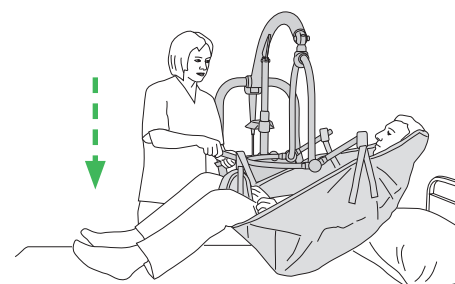

בעת חזרה למיטה: השתמש בידיית ההרמה של המתלה כדי להעביר את המטופל למיטה. אל תמשיך את המתלה. השתמש בשלט הידני כדי להנמיך את המטופל.

9

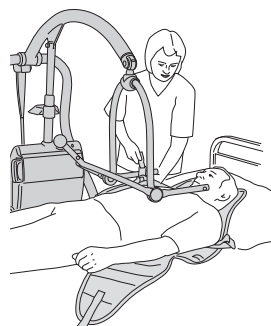

נתק את המתלה מזרוע ההרמה. הזז את המנוף וודא שגופו ורגליו של המטופל רחוקים מהמנוף. הסר את המתלה מהמטופל.