


Maxi Twin


Μεταφορά από καρέκλα

1

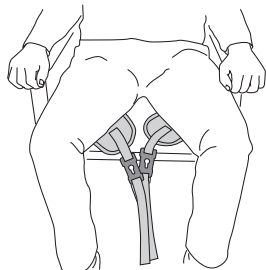

Τοποθετήστε τον αναρτήρα γύρω από τον ασθενή ώστε να καλύπτει τη μέση του και το στήριγμα κεφαλής να καλύπτει το πίσω μέρος της κεφαλής. Τραβήξτε κάθε τμήμα ποδιού και τοποθετήστε το κάτω από κάθε μηρό.

2

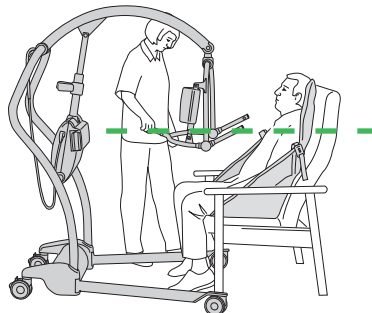


Τοποθετήστε τον ανυψωτήρα μπροστά από τον ασθενή. Αν χρειαστεί, ανοίξτε τα πόδια του πλαισίου. Ρυθμίστε τη ράβδο επέκτασης στο ύψος των ώμων.

3


Αναρτήρας με βρόγχους

Αναρτήρας με κλιπ

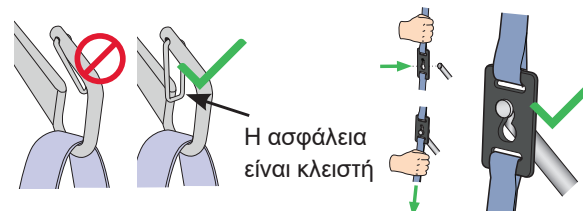

Προσαρτήστε τα κλιπ ή τους βρόγχους του αναρτήρα στα κατάλληλα σημεία της ράβδου επέκτασης.

4

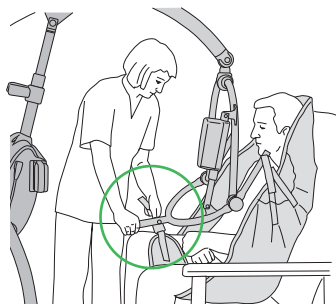

Για ανυψωτήρες με ράβδο επέκτασης DPS: Πιέστε προς τα κάτω τη λαβή τοποθέτησης και συνδέστε τα κλιπ του μάντα ποδιών.

5



Κίνδυνος
πτώσης



Κίνδυνος
εγκλωβισμού

Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν εφαρμοστεί τα φρένα. Πριν από την ανύψωση του ασθενούς, βεβαιωθείτε ότι ο αναρτήρας είναι ασφαλισμένος.




Χρησιμοποιώντας το χειριστήριο ελέγχου, ανυψώστε τον ασθενή και προσαρμόστε τη λαβή τοποθέτησης μέχρι ο ασθενής να είναι ξαπλωμένος στον αναρτήρα.

Συνεχίστε με τα βήματα της επόμενης σελίδας.


Μεταφορά από καρέκλα (συνέχεια)

6

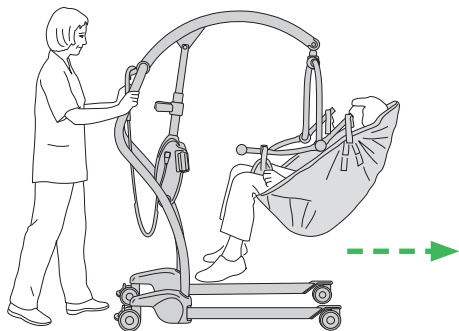


Κλείστε τα πόδια του πλαισίου και μεταφέρετε τον ασθενή.

7

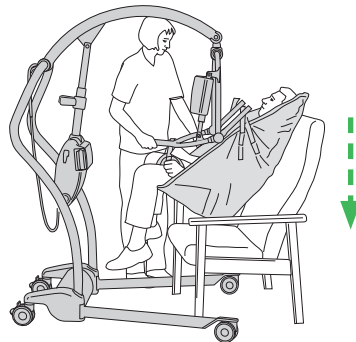

Χαμηλώστε τον ασθενή και ρυθμίστε τη λαβή τοποθέτησης για να τον φέρετε σε κατάλληλη θέση.


8

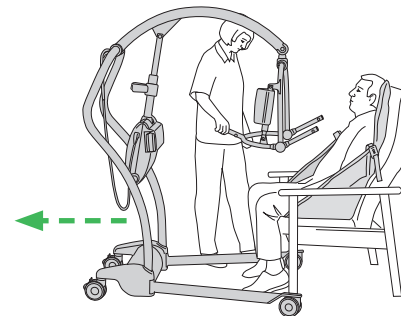

Αποσπάστε τον αναρτήρα από τη ράβδο επέκτασης. Αφαιρέστε τον ανυψωτήρα, διασφαλίζοντας ότι τα πόδια και το σώμα του ασθενούς βρίσκονται σε απόσταση από τον ανυψωτήρα. Απομακρύνετε τον αναρτήρα από τον ασθενή.


Μεταφορά από την κλίνη

1

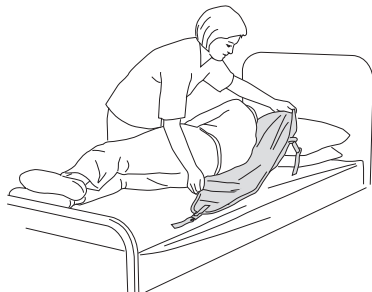


Γυρίστε τον ασθενή προς εσάς. Διπλώστε τον αναρτήρα στη μέση και τοποθετήστε τον πίσω από την πλάτη του ασθενούς.

2

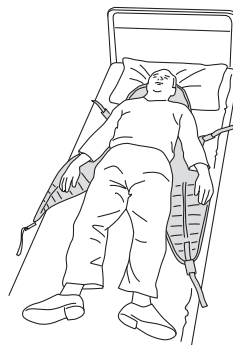

Τοποθετήστε τον αναρτήρα ώστε ο ασθενής να куλίσει ξανά στη θέση του στο κέντρο του αναρτήρα.

3

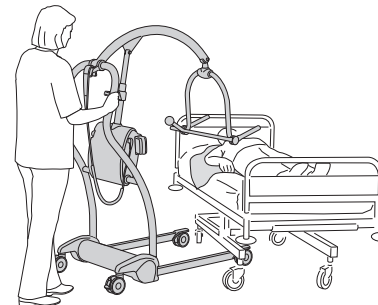


Προσεγγίστε την κλίνη με την ανοικτή πλευρά της ράβδου επέκτασης προς το στήθος του ασθενούς.

Συνεχίστε με τα βήματα της επόμενης σελίδας.

Μεταφορά από κλίνη (συνέχεια)


4

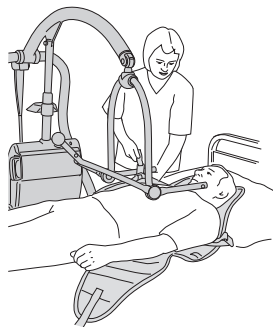


Τοποθετήστε τη ράβδο επέκτασης μπροστά ακριβώς από τον ασθενή. Γείρετε τη ράβδο επέκτασης μέχρι οι προεξοχές σύνδεσης των ώμων να μπορούν να συνδεθούν στον αναρτήρα.

5

Αναρτήρας με βρόγχους

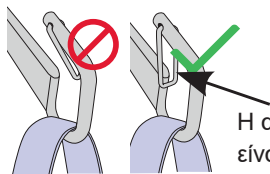

Αναρτήρας με κλιπ

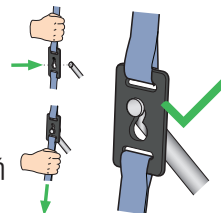

Προσαρτήστε τα κλιπ ή τους βρόγχους του αναρτήρα στα κατάλληλα σημεία της ράβδου επέκτασης.

6



Για ανυψωτήρες με ράβδο επέκτασης DPS: Τα τμήματα ποδιών πρέπει να τοποθετηθούν κάτω από τους μηρούς. Πιέστε προς τα κάτω τη λαβή τοποθέτησης και συνδέστε τα κλιπ του ιμάντα ποδιών.


7



Κίνδυνος
πτώσης




Κίνδυνος
εγκλωβισμού

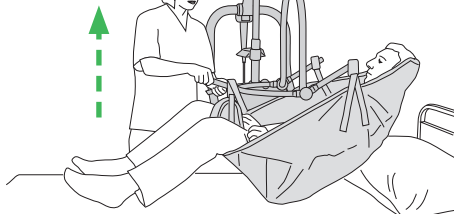

Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν εφαρμοστεί τα φρένα. Πριν από την ανύψωση του ασθενούς, βεβαιωθείτε ότι ο αναρτήρας είναι ασφαλισμένος.


Ανυψώστε τον ασθενή με το χειριστήριο ελέγχου και προσαρμόστε τον ασθενή σε άνετη θέση. Μεταφορά ασθενή.

8

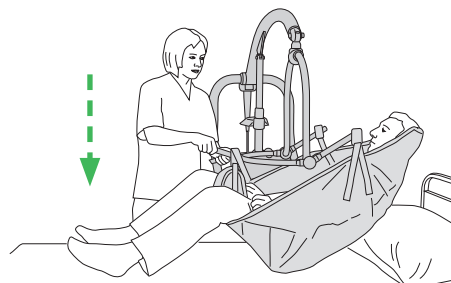

Κατά την επανατοποθέτηση σε κλίνη: Χρησιμοποιήστε τις λαβές του αναρτήρα για να τοποθετήσετε τον ασθενή επάνω από την κλίνη. Μην τραβάτε τον αναρτήρα. Χρησιμοποιήστε το χειριστήριο ελέγχου για να χαμηλώσετε τον ασθενή.

9

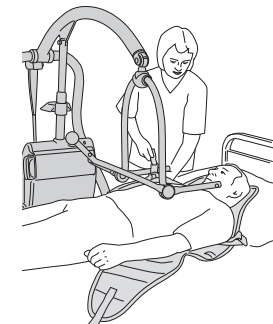

Αποσπάστε τον αναρτήρα από τη ράβδο επέκτασης. Αφαιρέστε τον ανυψωτήρα, διασφαλίζοντας ότι τα πόδια και το σώμα του ασθενούς βρίσκονται σε απόσταση από τον ανυψωτήρα. Απομακρύνετε τον αναρτήρα από τον ασθενή.

