


# Maxi Twin


## Trasferimento dalla sedia

1

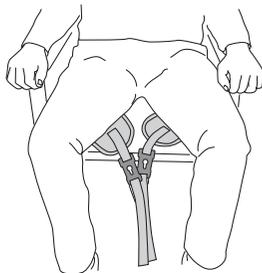

Posizionare il corsetto intorno al paziente in modo che copra la zona lombare e che il supporto si trovi dietro la testa. Tirare le sezioni delle gambe e sistemarle sotto le cosce.


2

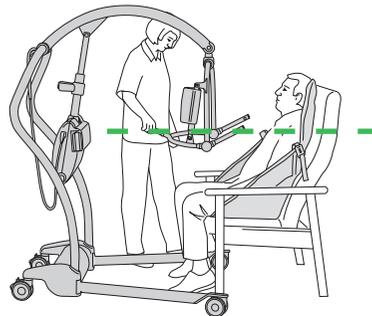


Posizionare il sollevapazienti davanti al paziente. Se necessario, aprire le gambe dello chassis. Regolare la barra di sollevamento all'altezza delle spalle.

3

Corsetto ad asola

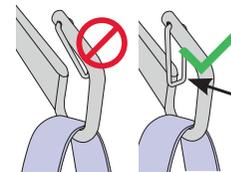

Corsetto a clip

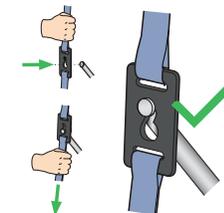

Chiusura chiusa

Fissare i ganci o le asole di attacco del corsetto ai punti appropriati sulla barra di sollevamento.

4



Per sollevapazienti con barra di sollevamento con Sistema di Posizionamento Dinamico (DPS) abbassare la maniglia di posizionamento e attaccare le clip delle cinghie che supportano le gambe.

5



Rischio di caduta



Rischio di intrappolamento

Accertarsi che i freni non siano inseriti. Accertarsi che il corsetto sia ben fissato prima di sollevare il paziente.




Sollevare il paziente usando la pulsantiera di controllo, regolare la maniglia di posizionamento fino a quando il paziente risulta in posizione reclinata nel corsetto.

*continua alla pagina successiva*


## Trasferimento dalla sedia (continua)

6

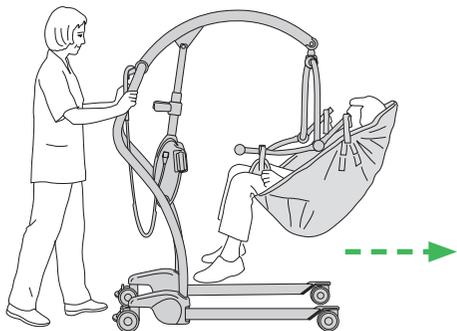


Chiudere le gambe dello chassis e trasportare il paziente.

7

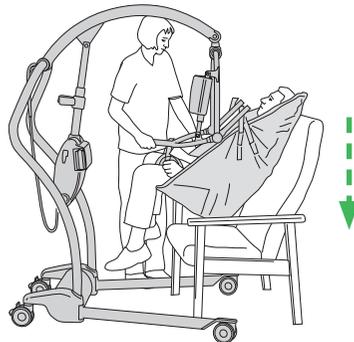

Abbassare il paziente e regolare la maniglia di posizionamento per raggiungere una posizione adeguata.


8

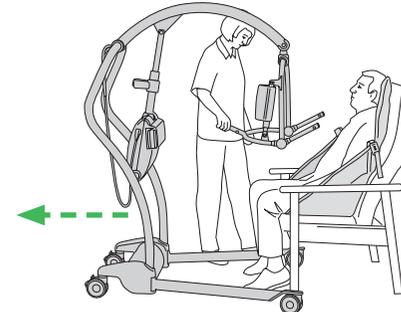

Rimuovere il corsetto dalla barra di sollevamento. Allontanare il sollevapazienti, verificando che i piedi e la testa del paziente siano lontani dal dispositivo. Sfilare il corsetto dal paziente.

## Trasferimento dal letto

1

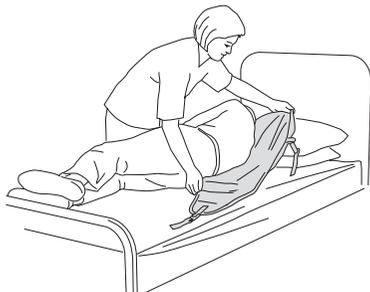


Ruotare il paziente verso di sé. Piegare il corsetto a metà e posizionarlo dietro la schiena del paziente.

2



Posizionare il corsetto in modo tale che, una volta ruotato, il paziente sia al centro del corsetto.

3

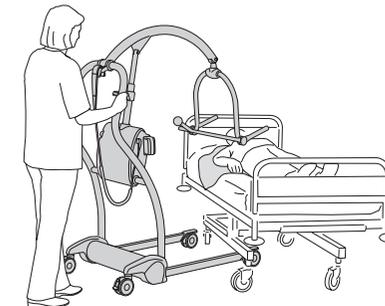


Avvicinarsi al letto con il lato aperto della barra di sollevamento verso il torace del paziente.

*continua alla pagina successiva*

## Trasferimento dal letto (continua)


4

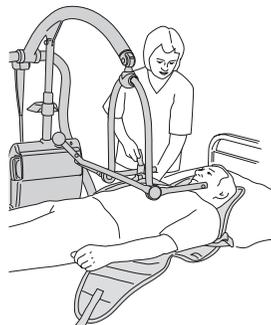

Posizionare la barra di sollevamento appena sopra il paziente. Inclinare la barra di sollevamento fino ad agganciare i pomelli di attacco delle spalle al corsetto.


5

Corsetto ad asola

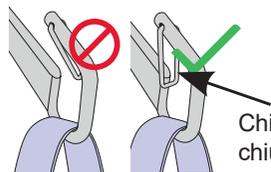

Chiusura chiusa

Corsetto a clip

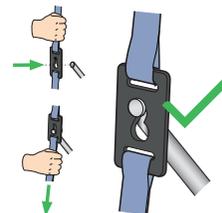

Fissare i ganci o le asole di attacco del corsetto ai punti appropriati sulla barra di sollevamento.

6



Per sollevare pazienti con barra di sollevamento con Sistema di Posizionamento Dinamico (DPS): Portare le sezioni delle gambe sotto le cosce. Abbassare la maniglia di posizionamento e attaccare le clip delle cinghie che supportano le gambe.


7



Rischio di caduta




Rischio di intrappolamento

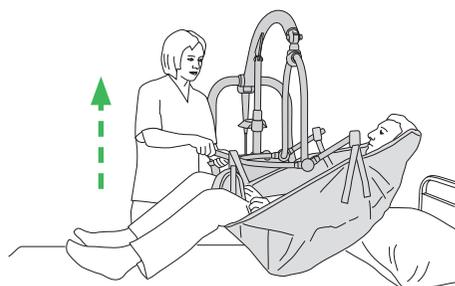

Accertarsi che i freni non siano inseriti. Accertarsi che il corsetto sia ben fissato prima di sollevare il paziente.


Sollevare il paziente con la pulsantiera di controllo e sistemare il paziente in una posizione comoda. Trasferire il paziente.

8

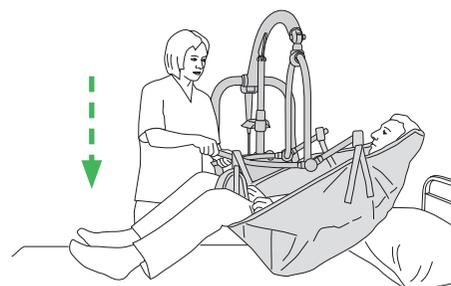

Al momento di tornare verso il letto: utilizzare le maniglie di sollevamento del corsetto per posizionare il paziente sopra il letto. Non tirare il corsetto. Usare la pulsantiera di controllo per abbassare il paziente.

9

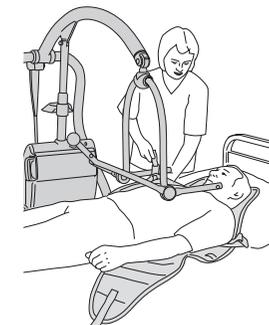

Rimuovere il corsetto dalla barra di sollevamento. Allontanare il sollevapazienti, verificando che i piedi e la testa del paziente siano lontani dal dispositivo. Sfilare il corsetto dal paziente.