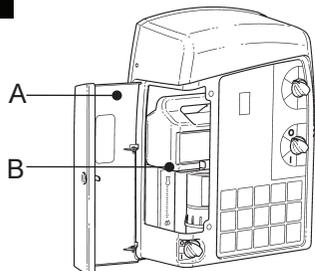
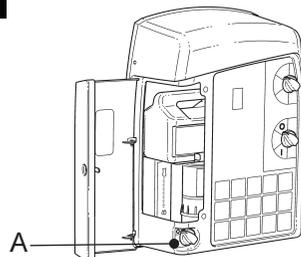
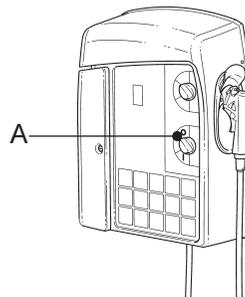


Impostare la concentrazione di disinfezione**1**

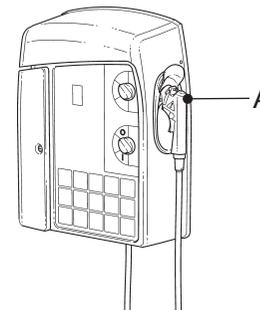
Sbloccare e aprire la porta (A).
Verificare che sul ripiano interno (B) sia presente una bottiglia di detergente o disinfettante.

2

Aprire l'alimentazione dell'acqua (A).

3

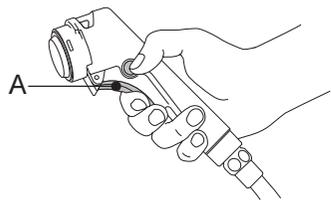
Accendere l'unità (A).

4

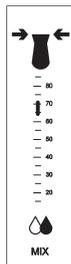
Rimuovere l'erogatore dal suo supporto. Dirigerlo lontano da sé.

5

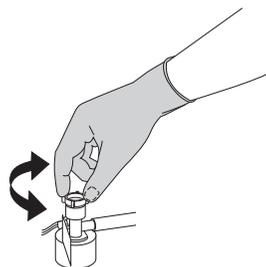
Portare il selettore di funzione su disinfezione (A).
Giallo = disinfettare.

6

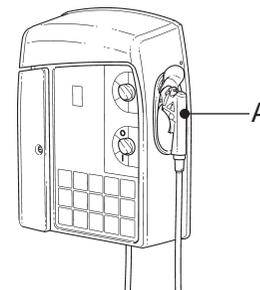
Premere il grilletto sull'erogatore (A).

7

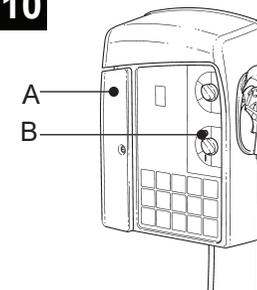
Controllare il valore del liquido nelle impostazioni del flussometro. All'avvio della disinfezione, accertarsi che la miscela sia corretta. (Vedere le Istruzioni per l'uso (IFU) di MultiClean.)

8

Per regolare la miscela: utilizzare la vite di regolazione sul raccordo del flacone; in senso orario per ridurre, in senso antiorario per aumentare.

9

Ricollocare l'erogatore nel suo supporto (A).

10

Chiudere e bloccare lo sportello (A).
Spegner l'unità (B).

Pulizia e disinfezione: sistemi per il bagno e prodotti per la doccia



Rischio di lesioni
NON utilizzare
come doccia
per il paziente.

1



Attivare l'impostazione di disinfezione. Prendere l'erogatore e puntarlo in direzione del prodotto. Accendere l'unità. Nel caso di una vasca: chiudere lo scarico.

2



Nel caso di vasca con idromassaggio: collocare la doccetta di disinfezione nella porta di iniezione. Tenere premuto il grilletto. Dalle bocchette dell'aria/ugelli deve fuoriuscire il disinfettante per almeno 30 secondi.

3



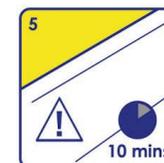
Spruzzare il disinfettante su tutte le superfici interne della vasca o su tutte le superfici del prodotto per doccia, nonché su tutti i lati degli accessori.

4



Strofinare con cura tutte le superfici disinfettate.

5



Attendere un tempo di contatto adeguato attenendosi alle istruzioni del disinfettante. Pulire tutte le altre parti e accessori con un panno imbevuto di soluzione disinfettante.

6



Attivare l'impostazione risciacquo.
Nel caso di una vasca: aprire lo scarico. Eliminare dalla vasca la soluzione disinfettante residua.

7



Nel caso di vasca con idromassaggio: collocare l'erogatore nella porta di iniezione. Tenere premuto il grilletto. L'acqua deve fuoriuscire da tutte le bocchette per l'aria/ugelli.

8



Risciacquare tutte le parti. Accertarsi che dal sistema per il bagno o prodotto per la doccia sia rimossa ogni traccia di disinfettante.

9



Nel caso di vasca con idromassaggio: attivare ed eseguire l'idromassaggio per 30 secondi per rimuovere dal sistema eventuale acqua residua.

10



Dopo l'ultima disinfezione della giornata, asciugare il prodotto per il bagno o per la doccia e gli accessori. Spegnerne l'unità MultiClean. Chiudere l'alimentazione dell'acqua.