


MultiClean

Nastavte koncentraci dezinfekce




1

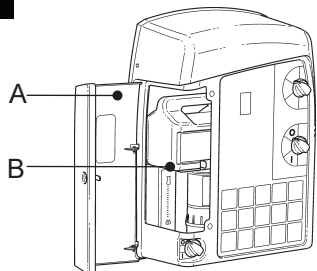


Odemkněte a otevřete dvířka (A). Zkontrolujte, zda je na polici uvnitř láhev s čistícím nebo dezinfekčním prostředkem (B).

2

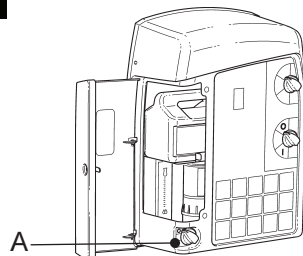


Otevřete přívod vody (A).

3

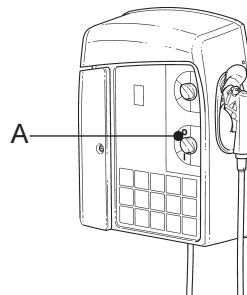

Zapněte jednotku (A).

4

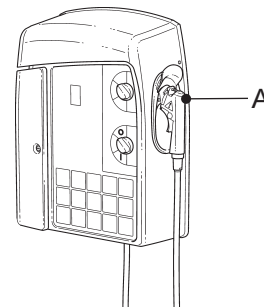


Vyjměte z držáku rozprašovací rukojeť. Namiřte ji směrem od sebe.

5




Otočte volič funkcí do polohy pro dezinfekci (A). Žlutá = dezinfekce.

6

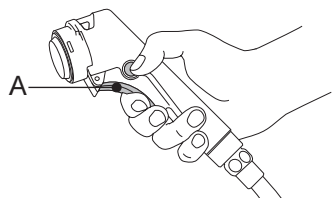


Stiskněte spoušť na rozprašovací rukojeti (A).

7

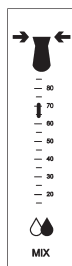


Zkontrolujte hodnotu kapaliny v nastavení průtokoměru. Před zahájením dezinfekce se ujistěte, že je směsný poměr správný. (Viz návod MultiClean.)

8

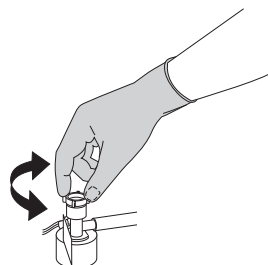


Pro úpravu směsného poměru: použijte seřizovací šroub na přípojce láhve – otáčením šroubu ve směru chodu hodinových ručiček se hodnota sníží, proti směru chodu hodinových ručiček se zvýší.

9

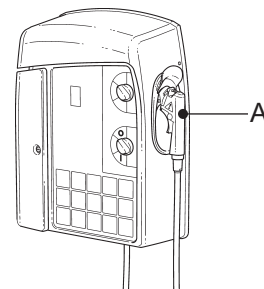

Rozprašovací rukojeť vložte zpět do držáku (A).


10

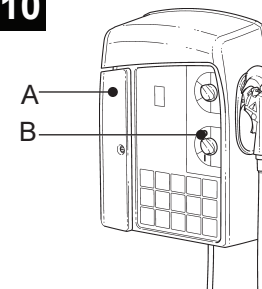


Zavřete a uzamkněte dvířka (A). Vypněte jednotku (B).

Čištění a dezinfekce – vany a sprchová zařízení




Nebezpečí úrazu
NEPOUŽÍVEJTE
ke sprchování
pacientů/klientů.

1

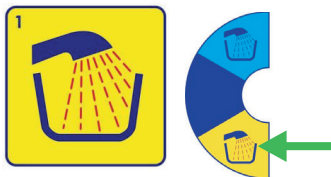


Aktivujte nastavení dezinfekce.
Uchopte rozprašovací rukojeť
a namířte ji na zařízení.
Zapněte jednotku.
Při čištění vany: uzavřete odtok.

2



Při čištění vany s perličkou:
rozprašovací dezinfekční rukojeť
zasuňte do vstřikovacího otvoru.
Stiskněte a přidržte spoušť.
Dezinfekční prostředek musí
proudit ze všech trysek
nejméně 30 sekund.

3

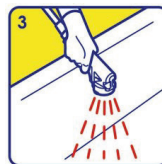


Dezinfekční prostředek
nastříkejte na vnitřní povrchy
vany a sprchového zařízení
a také na všechny povrchy
příslušenství.

4



Všechny
dezinfikované
povrchy důkladně
vydrhněte.

5

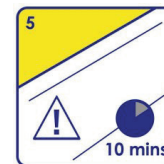

Dezinfekční prostředek nechte
působit po dobu uvedenou
v jeho návodu. Všechny
plochy a příslušenství otřete
hadříkem namočeným
v dezinfekčním roztoku.


6



Aktivujte nastavení oplachování.

Při čištění vany: otevřete odtok.
Nechte z vany odtéct zbytek
dezinfekčního roztoku.

7

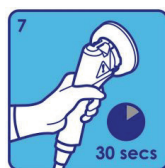


Při čištění vany s perličkou:
rozprašovací rukojeť zasuněte
do vstřikovacího otvoru. Stiskněte
a přidržte spoušť. Voda musí
proudit ze všech trysek.

8




Důkladně opláchněte veškeré
součásti zařízení. Ujistěte se,
že z vany nebo sprchového
zařízení byl odstraněn veškerý
dezinfekční prostředek.

9

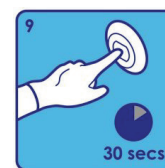

Při čištění vany s perličkou:
aktivujte perličku a nechte ji běžet
30 sekund, aby byla ze systému
odstraněna veškerá voda.

10

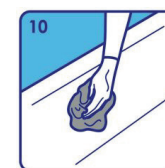

Po poslední dezinfekci v daném
dni vanu nebo sprchové zařízení
a jeho příslušenství osušte.
Jednotku MultiClean vypněte.
Uzavřete přívod vody.

