


Disinfezione con unità di disinfezione

Rimuovere i residui visibili

1

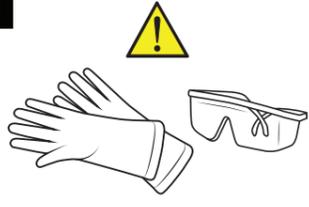


Indossare guanti e occhiali protettivi

2

Disattivare tutte le funzioni. Assicurarsi che la sedia di trasferimento si trovi all'interno della vasca.

3

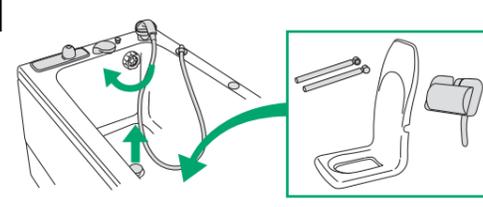

Aprire lo scarico. Rimuovere e collocare tutti gli accessori sul fondo della vasca.


4

Risciacquare con acqua la vasca, il braccio di sollevamento, la sedia di trasferimento, le parti non fissate e tutte le superfici degli accessori.



Pulire

5

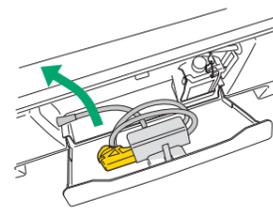

Estrarre la doccetta di disinfezione.


6



Premere il pulsante di disinfezione per 5 secondi.


7

Se la vasca dispone di un sistema di idromassaggio: verrà avviata la disinfezione automatica. La durata approssimativa della disinfezione automatica è di 3-4 minuti. Dopo 30 secondi dall'inizio della disinfezione automatica è possibile utilizzare la doccetta di disinfezione.

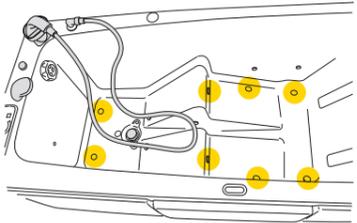

8

Spruzzare il disinfettante nella vasca finché il flussometro (A) non mostra il corretto rapporto di miscelazione indicato dalle Istruzioni per l'uso. Regolare se necessario (B). Temperatura di miscelazione 20 °C (68 °F).

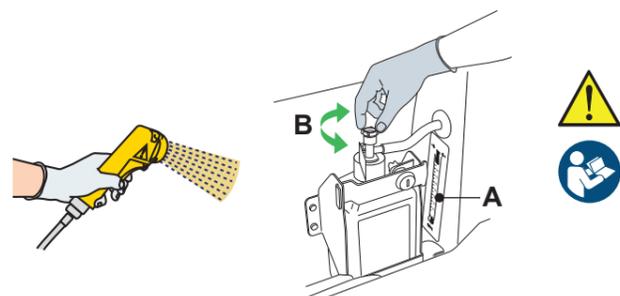

9




Spruzzare il disinfettante nello scarico. Strofinare lo scarico con una spazzola. Chiudere lo scarico.

10

Spruzzare il disinfettante su tutte le superfici interne della vasca, sul braccio di sollevamento, sulla sedia di trasferimento, sulle parti non fissate e su tutte le superfici degli accessori.



11

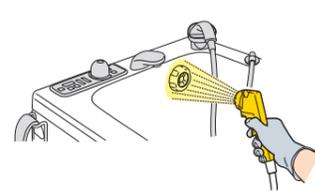

Pulire anche lo scarico di troppo pieno.

12




Strofinare con cura tutte le superfici interne della vasca, il braccio di sollevamento, la sedia di trasferimento, le parti non fissate gli accessori.

13



Aprire lo scarico. Sciacquare tutte le parti con abbondante acqua a una temperatura di 25 °C (77 °F).

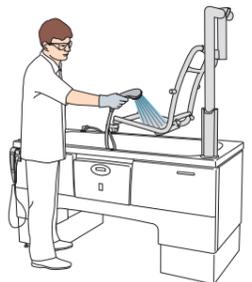

14



Immergere un panno nel disinfettante. Passare il panno su tutte le superfici di contatto rimanenti, come l'esterno della vasca, la pulsantiera di controllo e lo chassis a ruote.

15



Inumidire un nuovo panno con acqua e rimuovere il disinfettante. Risciacquare occasionalmente il panno in acqua corrente.

Disinfettare

16



Spruzzare il disinfettante nello scarico. Chiudere lo scarico.

17

Spruzzare il disinfettante su tutte le superfici interne della vasca, sul braccio di sollevamento, sulla sedia di trasferimento, sulle parti non fissate e su tutte le superfici degli accessori.



18



Immergere un panno nel disinfettante. Passare il panno su tutte le superfici di contatto rimanenti, come l'esterno della vasca, la pulsantiera di controllo e lo chassis a ruote.

continua alla pagina successiva

Disinfezione con unità di disinfezione (continua)

19

Attendere un tempo di contatto adeguato attenendosi alle istruzioni del disinfettante.


20




Premere il pulsante di disinfezione per 5 secondi per interrompere il ciclo di disinfezione.

21

Se la vasca dispone di un sistema di idromassaggio: premere il pulsante di disinfezione per abbreviare la sequenza del ciclo di disinfezione automatica. La durata viene ridotta fino a 35 secondi. Il LED inizierà a lampeggiare. A questo punto inizierà una sequenza di risciacquo e asciugatura del sistema idromassaggio e una volta ultimato, la disinfezione automatica si ferma e il LED si spegne.

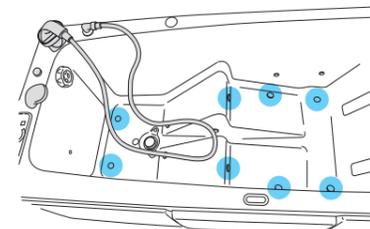

22

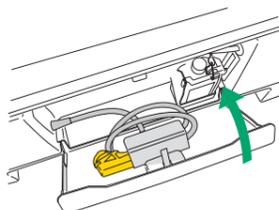

Rimettere la doccetta di disinfezione nel relativo supporto. Chiudere la cover.


23

Attendere un tempo di contatto adeguato attenendosi alle istruzioni del disinfettante.

24



Aprire lo scarico. Sciacquare tutte le parti con acqua a una temperatura di 25 °C (77 °F).

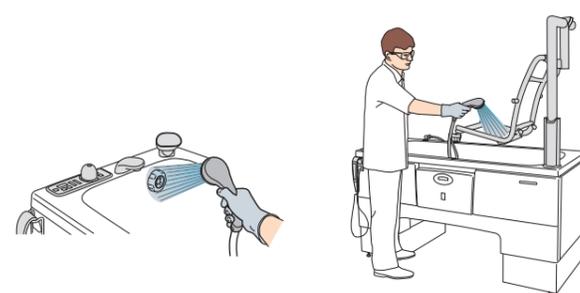


25



Inumidire un nuovo panno con acqua e rimuovere il disinfettante. Risciacquare occasionalmente il panno in acqua corrente.


26

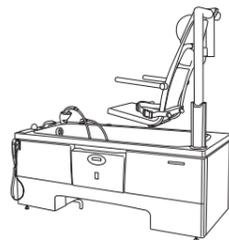

Lasciare asciugare all'aria.

27

Fissare gli appoggia braccio e il sedile. Accertarsi che il sedile sia agganciato. Fissare il poggiatesta, la cintura di sicurezza e gli altri accessori.

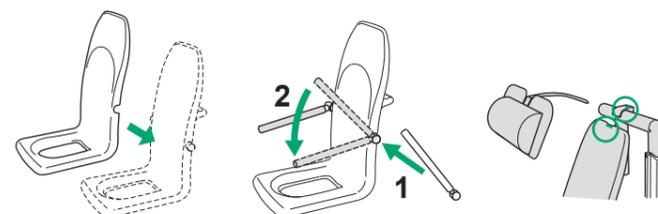


Disinfezione con flacone spray

Rimuovere i residui visibili

1  Indossare guanti e occhiali protettivi

2 Disattivare tutte le funzioni. Assicurarsi che la sedia di trasferimento si trovi all'interno della vasca.

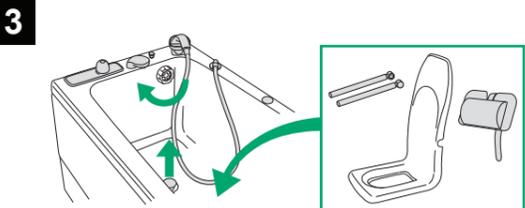
3  Aprire lo scarico. Rimuovere e collocare tutti gli accessori sul fondo della vasca.

4  Risciacquare con acqua la vasca, il braccio di sollevamento, la sedia di trasferimento, le parti non fissate e tutte le superfici degli accessori.

Pulire

5  Spruzzare il disinfettante nello scarico. Strofinare lo scarico con una spazzola. Chiudere lo scarico.

6  Spruzzare il disinfettante su tutte le superfici interne della vasca, sul braccio di sollevamento, sulla sedia di trasferimento, sulle parti non fissate e su tutte le superfici degli accessori.

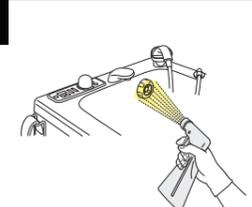7  Pulire anche lo scarico di troppo pieno.

8  Strofinare con cura tutte le superfici interne della vasca, il braccio di sollevamento, la sedia di trasferimento, le parti non fissate gli accessori.

9   Aprire lo scarico. Sciacquare tutte le parti con abbondante acqua a una temperatura di 25 °C (77 °F).


10  Immergere un panno nel disinfettante. Passare il panno su tutte le superfici di contatto rimanenti, come l'esterno della vasca, la pulsantiera di controllo e lo chassis a ruote.

11  Inumidire un nuovo panno con acqua e rimuovere il disinfettante. Risciacquare occasionalmente il panno in acqua corrente.


Disinfettare

12  Spruzzare il disinfettante nello scarico. Chiudere lo scarico.

13  Spruzzare il disinfettante su tutte le superfici interne della vasca, sul braccio di sollevamento, sulla sedia di trasferimento, sulle parti non fissate e su tutte le superfici degli accessori.

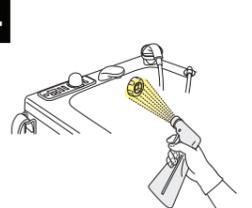14  Pulire anche lo scarico di troppo pieno.


15 Attendere un tempo di contatto adeguato attenendosi alle istruzioni del disinfettante.

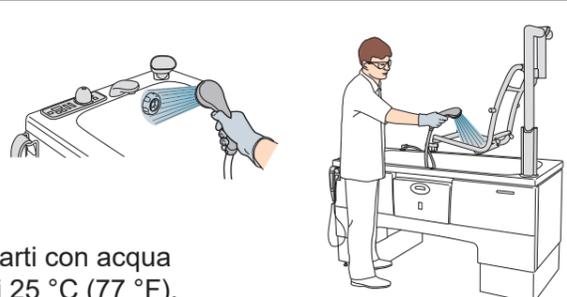
16   Aprire lo scarico. Sciacquare tutte le parti con acqua a una temperatura di 25 °C (77 °F).

17  Immergere un panno nel disinfettante. Passare il panno su tutte le superfici di contatto rimanenti, come l'esterno della vasca, la pulsantiera di controllo e lo chassis a ruote.

18 Attendere un tempo di contatto adeguato attenendosi alle istruzioni del disinfettante.

19  Inumidire un nuovo panno con acqua e rimuovere il disinfettante. Risciacquare occasionalmente il panno in acqua corrente.

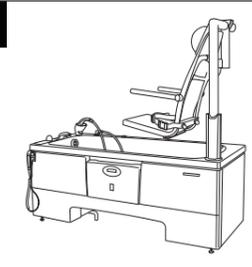20  Lasciare asciugare all'aria.

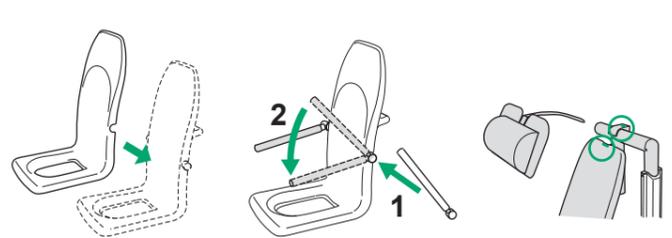21  Fissare gli appoggia braccio e il sedile. Accertarsi che il sedile sia agganciato. Fissare il poggiatesta, la cintura di sicurezza e gli altri accessori.