

Maxi Sky 440

Прехвърляне на пациент




1



Поставете slingа около пациента. При sling с опора на главата се уверете, че той е изтеглен към върха на главата на пациента.


2

Натиснете бутона „НАДОЛУ“ на ръчната контрола, за да развиете ремъка, като поддържате натягането на ремъка с другата ръка.

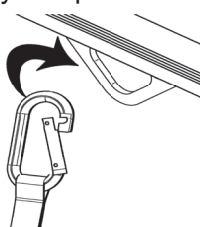

Закачете карабинера към количката и след това преместете подемника над пациента.

3

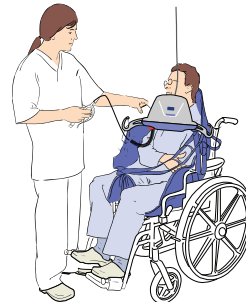


Спуснете подемника под брадичката и разгънете опорите. За пациент в легнало положение по гръб спуснете подемника към гърдите, разгънете опорите и след това инсталирайте ремъците.

4

За да прикрепите slingа, поставете примката на ремъка в опората и леко изтеглете ремъка.


5

! Слинг с клупове

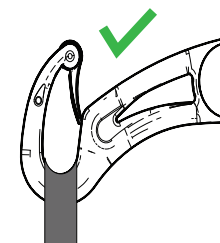

Уверете се, че обезопасителната закопчалка е затворена.


6

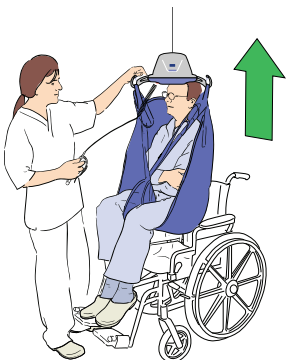

За да вдигнете пациента, натиснете бутона „НАГОРЕ“ на ръчната контрола. Преди да преместите пациента, повдигнете, докато докато хълбоците на пациента не се окажат над подлакътниците на инвалидната количка, горния край на ваната или на леглото.

Направлявайте краката на пациента, така че да не се блъснат в някое препятствие.

7

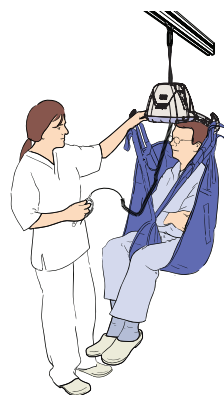

Преместете пациента.

8

След като пациентът се намира вече над желаната точка за преместване и е готов за спускане, натиснете бутона „НАДОЛУ“.

9

След като пациентът бъде правилно нагласен, откачете клуповете и освободете slingа от подемника.

Откачете подемника от количката.