

Maxi Sky 440

Presun pacienta/klienta




1



Umiestnite vak okolo pacienta/klienta. V prípade vaku s oporou hlavy sa uistite, že sa nachádza aj pod vrchom hlavy pacienta/klienta.


2

Stlačením tlačidla DOLU na ručnom ovládači odvíte popruh a druhou rukou napínate popruh.

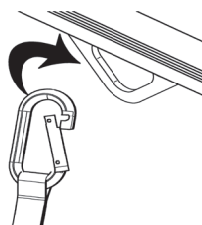

Na vozík upevnite karabínu a zdvíhacie zariadenie umiestnite nad pacienta/klienta.

3

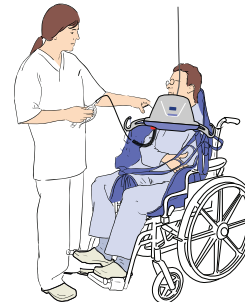


Zdvíhacie zariadenie spustíte pod bradu a rozbaľte opory. V prípade pacienta/klienta v polohe poležiačky zdvíhacie zariadenie spustíte k hrudi, rozbaľte opory a umiestnite popruhy.

4

Na pripojenie vaku vložte slučku popruhu do opory a jemne potiahnite za popruh.


5

! Pútkový vak

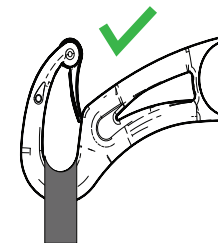

Uistite sa, že je bezpečnostná západka zatvorená.


6

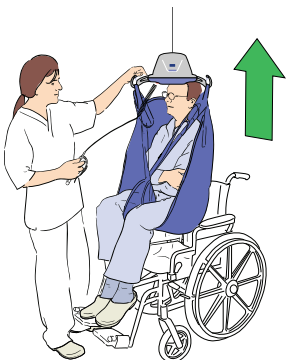

Ak chcete pacienta/klienta zdvihnúť, na ručnom ovládači stlačte tlačidlo HORE. Pred presunom pacienta/klienta dvíhajte dovtedy, kým nie je zadok pacienta/klienta nad opierkami invalidného vozíka, okrajom vane alebo lôžka.

Nohy pacienta/klienta presuňte cez všetky prekážky.

7

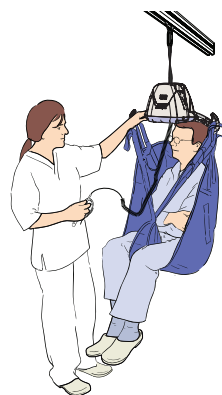

Presuňte pacienta/klienta.

8

Keď sa pacient/klient nachádza nad požadovaným miestom presunu a je pripravený na spustenie, stlačte tlačidlo DOLU.

9

Keď je pacient/klient správne usadený, odpojte popruhy a vak od zdvíhacieho zariadenia.

Zdvíhacie zariadenie odpojte od vozíka.