

Maxi Sky 440

转运患者




1



在患者四周放置吊兜。带头部支撑的吊兜要确保其延伸至患者头顶。

2

在用一只手保持吊带张力的同时，按下手持控制器上的“降低”按键以解开吊带。

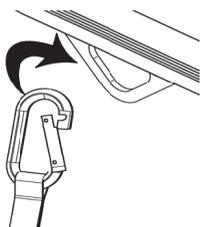

将竖钩挂到滚轮上，然后将移位机移到患者上方。

3




将移位机降至低于下颚，并展开支架。对于在仰卧位的患者，请降低移位机至胸部附近并展开支架，然后再给患者套上吊带。

4

如果要连接吊兜，请将吊带环插入到支架上，然后轻轻拉紧吊带。

5

 环状式吊兜

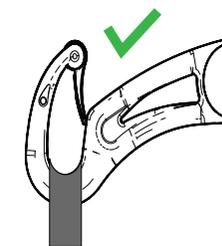

确保安全锁已关闭。

6



如果要提升患者，请按下手持控制器上的“升高”按钮。移动患者之前请升高设备，直到患者臀部完全离开轮椅臂支架、浴缸或床铺的顶部。

引导患者的双腿跨过障碍物。

7



移动患者。

8

当患者位于所需转运位置上方并准备下降时，请按下“降低”按键。

9

一旦患者妥当就座后，请拆开吊环并从移位机上解下吊兜。

从推车上卸下移位机。