


Прехвърляне от изправена позиция

1




Активирайте спирачките на подемника Alenti.

2

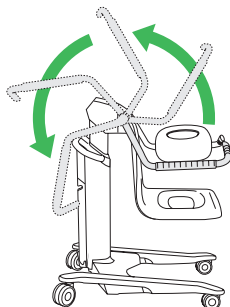

Сгънете назад подпората за ръце.

3

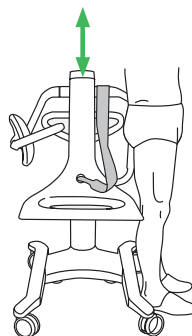


Регулирайте височината на подемника Alenti. Уверете се, че седалката е изравнена със задната част на коленете на пациента. Помогнете на пациента да седне.

4




Риск от падане

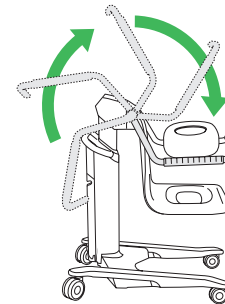

Сгънете напред подпората за ръце.

5

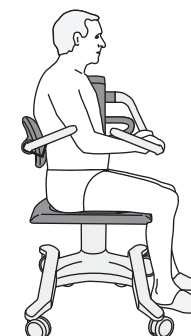

Уверете се, че пациентът е в изправено положение в средата на седалката.

6



Уверете се, че пациентът седи с:

- седалището към задната част на седалката,
- гърба към опората за гърба и
- ръцете на подпората за ръце.

7



Подсигурете пациента с предпазния колан.

8



Риск от падане



Регулирайте подемника Alenti до безопасна и ергономична височина.

9



Освободете спирачките.

10



Използвайте дръжките за прехвърляне, за да прехвърлите пациента.

Прехвърляне в изправена позиция

1




Спуснете подемника Alenti, докато краката на пациента допрат пода.

2




Активирайте спирачките на подемника.

3

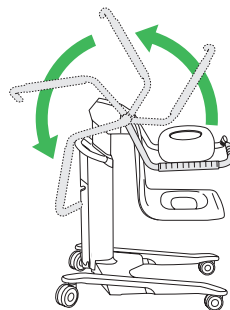

Сгънете назад подпората за ръце встрани от пациента.


4

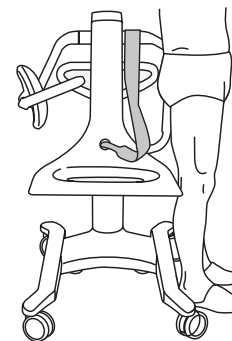

Освободете предпазния колан, поставете колана около горната част на рамото с дръжка на подпората за ръце и помогнете на пациента да се изправи.

Прехвърляне от помощно средство за изправяне и повдигане

1

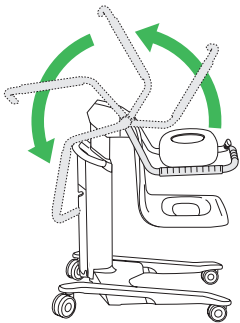

Сгънете назад подпората за ръце.

2




Позиционирайте помощното средство за изправяне и повдигане колкото се може по-близо до подемника, като гърбът на пациента е обърнат към седалката на подемника Alenti.

3




Активирайте спирачките на подемника.

4

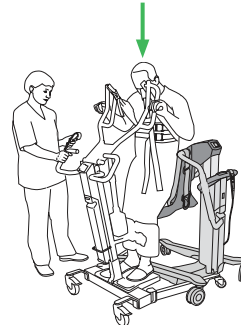


Спуснете пациента до седалката на подемника Alenti. Откачете slinga от куките.

5

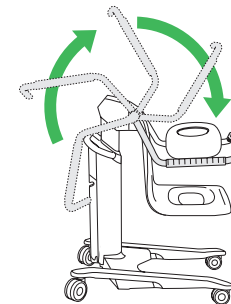

Сгънете напред подпората за ръце, така че пациентът да се хване за нея.

6

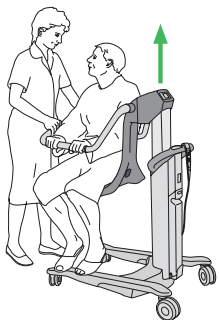

Повдигнете подемника Alenti на височина, при която краката на пациента не допират помощното средство за изправяне и повдигане. Премахнете slinga от пациента.

7



Риск от падане




Уверете се, че пациентът седи с:

- седалището към задната част на седалката,
- гърба към опората за гърба и
- ръцете на подпората за ръце.

8



Риск от падане

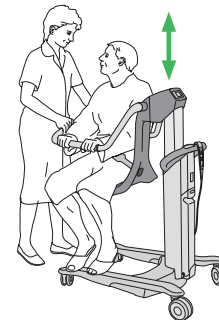


Подсигурете пациента с предпазния колан. Премахнете пособието за изправяне и повдигане. Регулирайте подемника Alenti до ергономична височина.


9





Освободете спирачките.

Прехвърляне към помощно средство за изправяне и повдигане

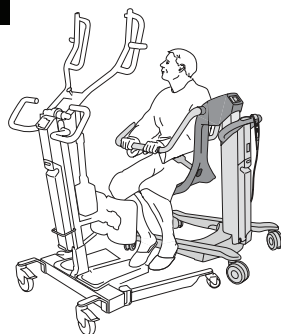
- 


Спуснете подемника Alenti.
- 


Позиционирайте помощното средство за изправяне и повдигане пред пациента.
- 


Оставете спирачките на подемника Alenti отключени.
- 


Активирайте спирачките

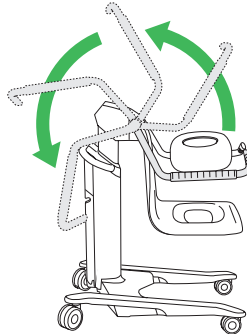Активирайте спирачките на помощното средство за изправяне и повдигане.
- 

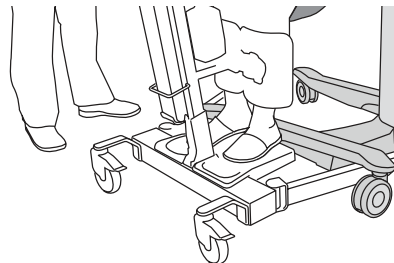Сгънете назад подпората за ръце встрани от пациента.
- 

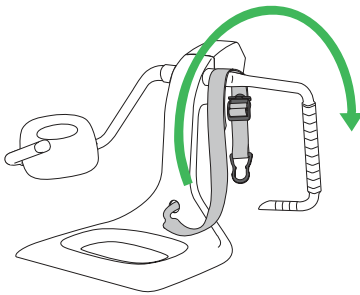Позиционирайте краката на пациента върху подпората за крака на пособието за повдигане и изправяне.
- 

Свалете предпазния колан и го поставете около горната част на подпората за ръце.
- 

Поставете слинга около пациента. Закачете слинга за пособието за повдигане и изправяне. Внимателно повдигнете пособието за изправяне и повдигане.
- 

Освободете спирачките на пособието за изправяне и повдигане, след което бавно го преместете заедно с пациента далеч от подемника Alenti.

Прехвърляне от легло - седяща позиция

1




Активирайте
спирачките



Активирайте спирачките на леглото.
Сгънете назад подпората за ръце.

2

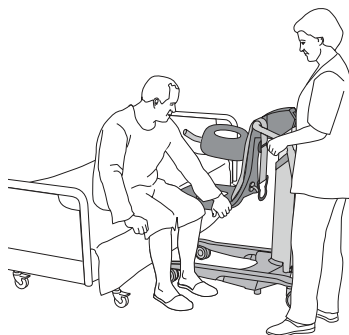


Позиционирайте подемника Alenti напред към
страничната част на леглото със седалката
на подемника Alenti по-ниско от леглото.

3




Активирайте
спирачките на
подемника Alenti.

4

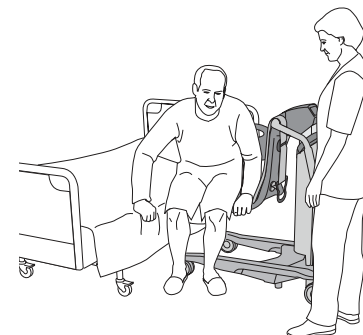

Оставете пациента да се придвижи
от леглото до подемника Alenti.

5

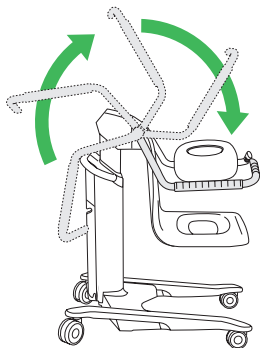

Сгънете напред подпората за ръце,
така че пациентът да се хване за нея.

6



Риск от
падане




Уверете се, че пациентът седи с:

- седалището към задната част на седалката,
- гърба към опората за гърба и
- ръцете на подпората за ръце.

7



Риск от
падане

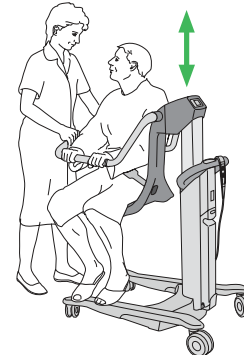

Подсигурете пациента с предпазния колан.
Регулирайте подемника Alenti до
ергономична височина.


8



Освободете
спирачките.

Прехвърляне към легло - седяща позиция

1

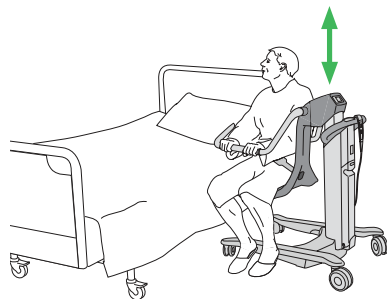

Регулирайте подемника Alenti до подходяща височина. Позиционирайте подемника Alenti, така че предната му част да е обърната към страничната част на леглото.


2



Активирайте спирачките


Активирайте спирачките на подемника Alenti. Активирайте спирачките на леглото.

3

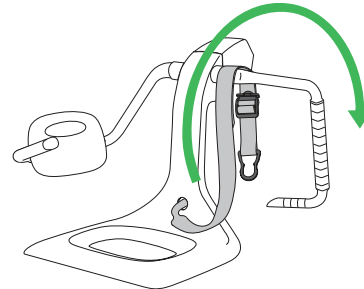


Свалете предпазния колан и го поставете около горната част на рамото с дръжка на подпората за ръце.

4

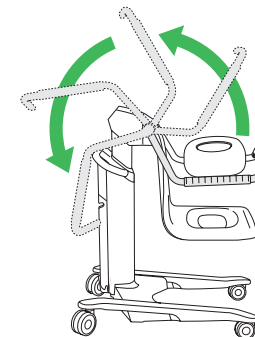


Сгънете назад подпората за ръце встрани от пациента.

5

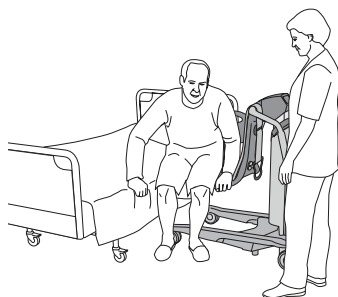

Оставете пациента да се придвижи до леглото от подемника Alenti.


6

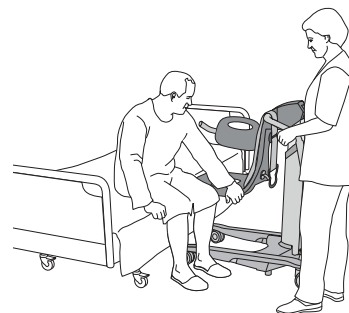

Уверете се, че пациентът седи стабилно изправен от страни на леглото, преди да издърпате подемника Alenti настрана.


Къпане на пациент

1

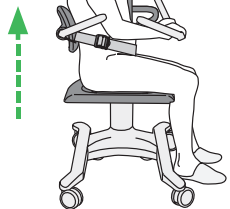

Спуснете ваната до най-ниската ѝ височина. Повдигнете подемника така, че да има разстояние между гениталиите на пациента и ръба на ваната.

2

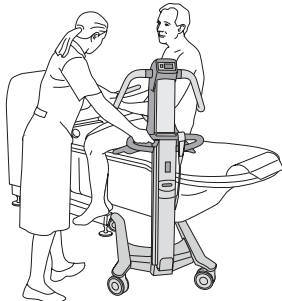


Позиционирайте подемника диагонално до частта за глава на ваната.

3




Риск от прищипване

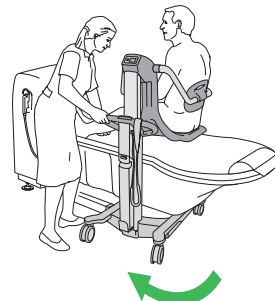


Помогнете на пациента да премести краката си над ръба на ваната, докато завъртате подемника на позиция.

4

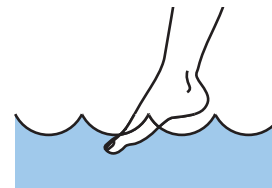

Дайте възможност на пациента да усети водата. Ако е необходимо, регулирайте температурата.

5

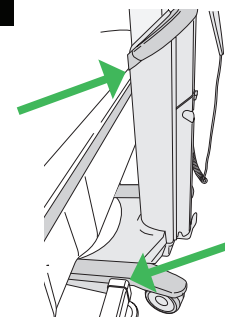


Центрирайте подемника над ваната, докато се спре във ваната.

6





Риск от прищипване

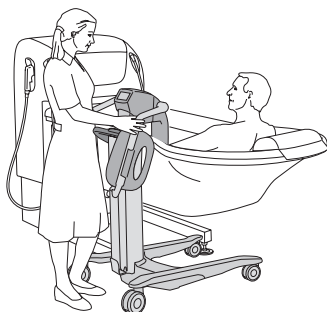

Спуснете подемника до удобна височина за болногледача. Повдигнете ваната. Уверете се, че няма прищипани части на тялото.

7

По избор

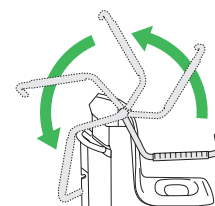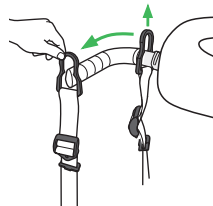

Ако пациентът желае и може да го направи:

1. Свалете предпазния колан от опората за гърба.
2. Наклонете пациента напред.
3. Сгънете назад опората за гърба.
4. Наклонете пациента назад към ваната.
5. Сгънете назад подпората за ръце встрани от пациента.


8



Къпане на пациент.

След къпането

1

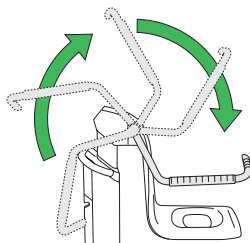

Отворете дренажния отвор.
Ако дръжката на подпората за ръце
е сгъната навън, я сгънете отново
напред пред пациента.

2




Риск от
падане



Уверете се, че пациентът седи с:


- седалището към задната част на седалката,
- гърба към опората за гърба и
- ръцете на подпората за ръце.

3

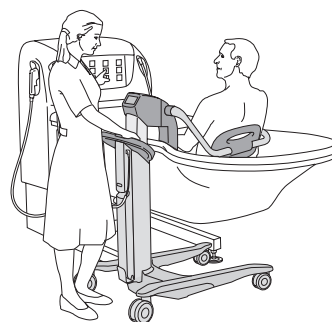

Наклонете пациента напред
и завъртете напред рамото с
дръжка на подпората за гърба.
Затегнете предпазния колан.

4

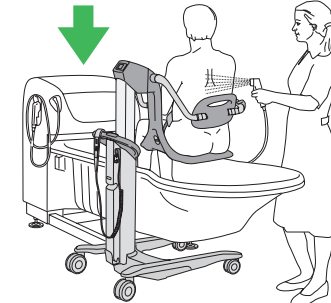

Спуснете ваната до най-ниската позиция.
Пуснете душа и дайте възможност
на пациента да усети водата с ръка.
Ако е необходимо, регулирайте
температурата. Измийте пациента.

5



Подсушете пациента
и поставете кърпи, за да
го поддържате затоплен
и да се чувства удобно.

6



Уверете се, че пациентът
е в изправено положение
в средата на седалката.

7



Повдигнете
подемника така, че да има
разстояние между гениталиите
на пациента и ръба на ваната.
Измийте с душа и подсушете
краката на пациента.

8



Риск от
прищипване

Помогнете на пациента да
премести краката си над ръба
на ваната, докато завъртате
подемника встрани от ваната.

9



Риск от
преобръ-
щане

Уверете се, че подемникът
Alenti не е в близост до
околните препятствия.
Спуснете подемника.

