

Przemieszczanie z pozycji stojącej

1




Aktywować hamulce podnośnika Alenti.

2



Odchylić do tyłu podpórkę do rąk.

3

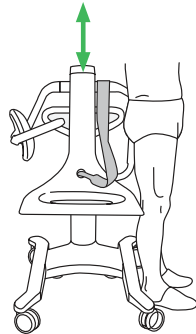


Ustawić wysokości podnośnika Alenti. Upewnić się, że siedzisko jest zrównane z tylną częścią kolan pacjenta. Pomóc pacjentowi usiąść.

4



Ryzyko upadku

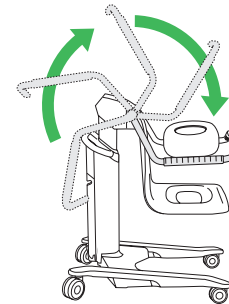

Odchylić do przodu podpórkę do rąk.

5



Upewnić się, że pacjent siedzi prosto na środku siedziska.

6



Upewnij się, że:

- pośladki pacjenta znajdują się na tylnej części siedziska,
- jego plecy oparte są o oparcie oraz
- dłonie znajdują się na podpórcę.

7



Zabezpieczyć pacjenta za pomocą pasa bezpieczeństwa.

8



Ryzyko upadku




Ustawić podnośnik Alenti na bezpiecznej oraz ergonomicznej wysokości.

9



Zwolnić hamulce.

10

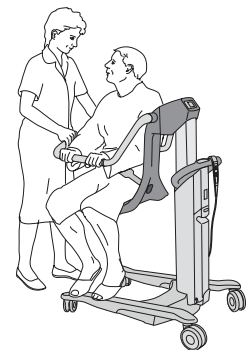

Do przemieszczania pacjenta wykorzystać uchwyty do przemieszczania.

Przemieszczanie do pozycji stojącej

1




Obniżyć podnośnik Alenti do momentu, w którym stopy pacjenta będą stykać się z podłożem.

2




Aktywować hamulce podnośnika.

3

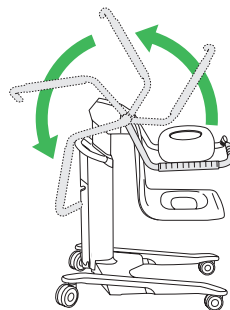

Odchylić do tyłu podpórkę do rąk, oddalając ją od pacjenta.


4

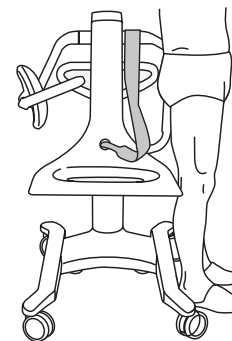

Rozpiąć pas bezpieczeństwa, przełożyć go wokół górnej części ramienia uchwyty podpórki do rąk i pomóc pacjentowi wstać.


Przemieszczanie z pionizatora

1

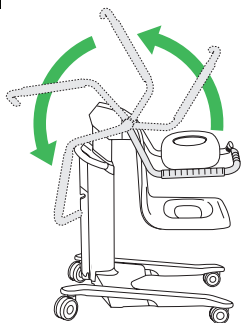

Odchylić do tyłu podpórkę do rąk.

2

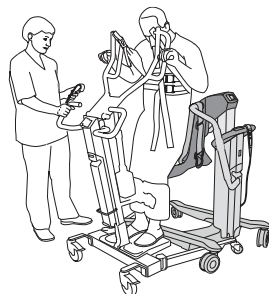


Gdy plecy pacjenta skierowane są do siedziska podnośnika Alenti, ustawić pionizator jak najbliżej podnośnika.

3



Aktywować hamulce podnośnika.

4

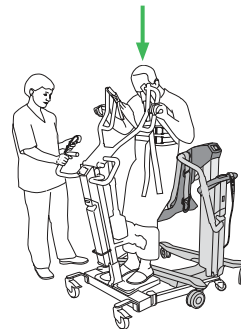


Obniżyć pacjenta na siedzisko podnośnika Alenti. Odczepić nosidło.

5



Złożyć podpórkę do rąk do przodu, aby pacjent mógł ją chwycić.

6

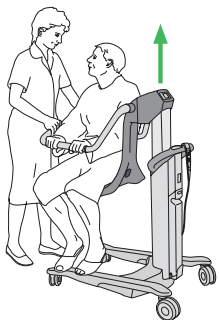

Unosić podnośnik Alenti do momentu, w którym stopy pacjenta nie będą stykały się z pionizatorem. Wyjąć nosidło spod pacjenta.

7



Ryzyko upadku




Upewnij się, że:

- pośladki pacjenta znajdują się na tylnej części siedziska,
- jego plecy oparte są o oparcie oraz
- dłonie znajdują się na podpórce.

8



Ryzyko upadku

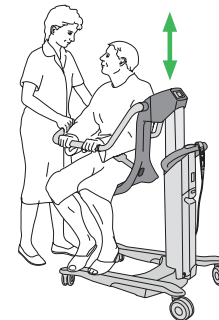

Zabezpieczyć pacjenta za pomocą pasa bezpieczeństwa. Usunąć pionizator. Ustawić podnośnik Alenti na ergonomicznej wysokości.

9



Zwolnić hamulce.

Przemieszczanie na pionizator

1



Obniżyć
podnośnik Alenti.

2



Umieścić pionizator
przed pacjentem.

3



Pozostawić
hamulce
podnośnika Alenti
w ustawieniu
odblokowanym.


4



Założyć
hamulce


Zaciągnąć
hamulce
pionizatora.

5

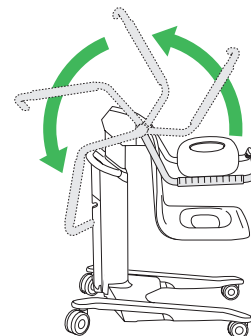


Odchylić do tyłu podpórkę do
rąk, oddalając ją od pacjenta.

6

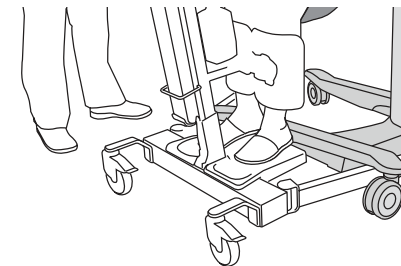

Umieścić stopy pacjenta na
wsporniku stóp pionizatora.

7

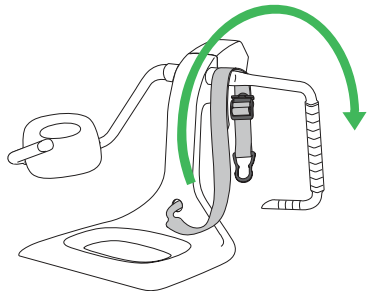

Zdjąć pas bezpieczeństwa
i ułożyć go wokół górnej
części podpórki do rąk.

8



Ułożyć nosidło wokół pacjenta.
Zamocować nosidło do pionizatora.
Delikatnie unieść pionizator.

9



Zwolnić hamulec pionizatora i powoli odsunąć
pionizator wraz z pacjentem od podnośnika Alenti.

Przenoszenie z łóżka — pozycja siedząca

1




Założyć hamulce



Zablokować hamulce łóżka.
Odchylić do tyłu podpórkę do rąk.

2

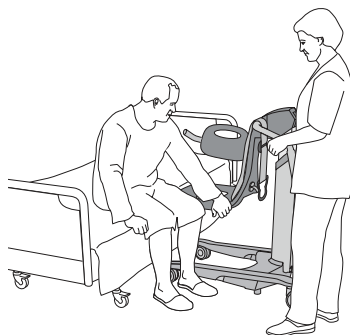


Ustawić podnośnik Alenti przodem do krawędzi łóżka i obniżyć siedzisko podnośnika Alenti poniżej poziomu łóżka.

3




Aktywować hamulce podnośnika Alenti.

4

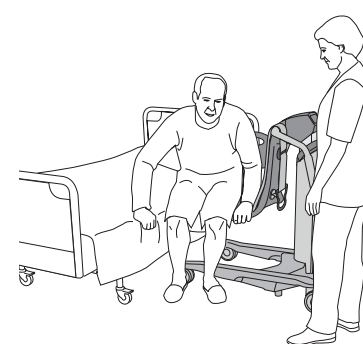

Umożliwić pacjentowi przemieszczenie z łóżka na podnośnik Alenti.

5

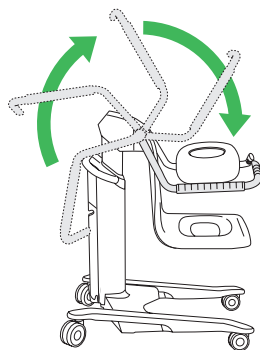

Złożyć podpórkę do rąk do przodu, aby pacjent mógł ją chwycić.

6



Ryzyko upadku




Upewnij się, że:

- pośladki pacjenta znajdują się na tylnej części siedziska,
- jego plecy oparte są o oparcie oraz
- dłonie znajdują się na podpórce.

7



Ryzyko upadku

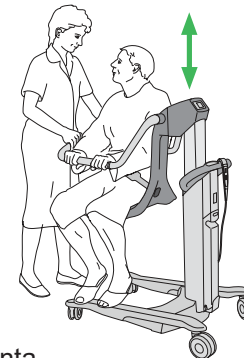

Zabezpieczyć pacjenta za pomocą pasa bezpieczeństwa. Ustawić podnośnik Alenti na ergonomicznej wysokości.


8



Zwolnić hamulce.

Przenoszenie do łóżka — pozycja siedząca

1

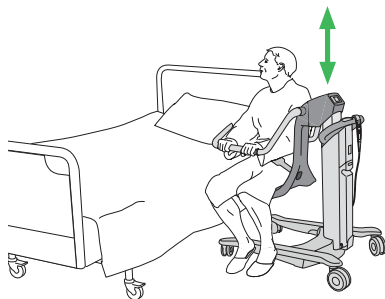

Ustawić podnośnik Alenti na odpowiedniej wysokości. Ustawić podnośnik Alenti przodem do bocznej krawędzi łóżka.


2



Założyć hamulce


Aktywować hamulce podnośnika Alenti. Zablokować hamulce łóżka.

3

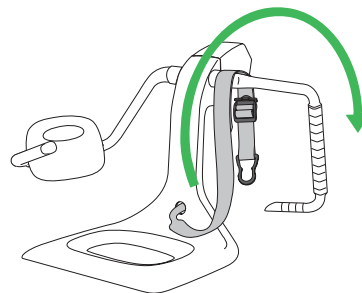


Zdjąć pas bezpieczeństwa i ułożyć go wokół górnej części podpórki do rąk.

4

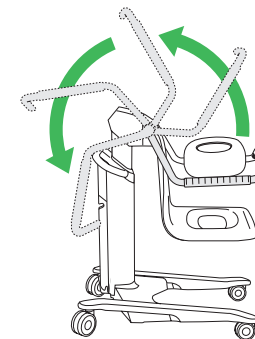


Odchylić do tyłu podpórkę do rąk, oddalając ją od pacjenta.

5

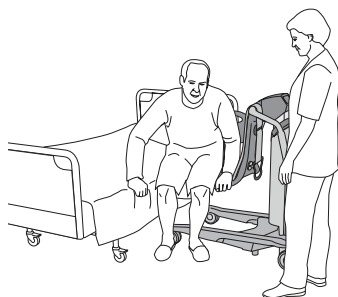

Pozwolić pacjentowi na przemieszczenie się na łóżko z podnośnika Alenti.


6

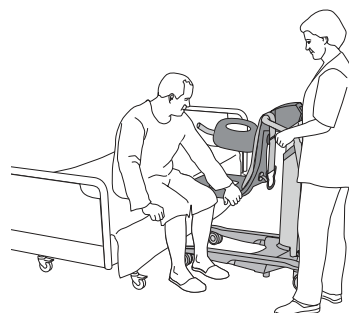

Przed odsunięciem podnośnika Alenti upewnić się, że pacjent siedzi prosto i bezpiecznie na krawędzi łóżka.


Kąpiel pacjenta

1

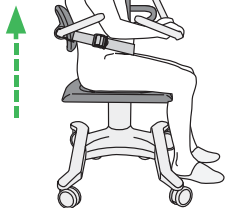

Opuścić wannę do najniższego położenia. Unieść podnośnik tak, aby pomiędzy genitaliami pacjenta a obręczą wanny była wolna przestrzeń.

2

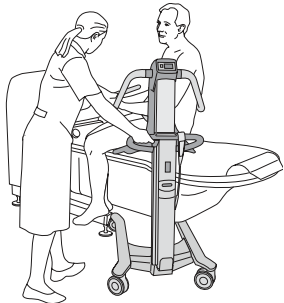


Podnośnik ustawić równoległe do wezglowia wanny.

3




Ryzyko
przycięcia

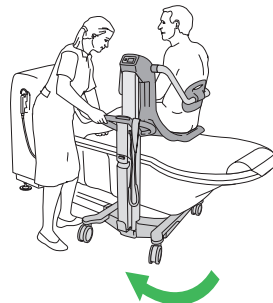


Pomóc pacjentowi przenieść nogi nad krawędź wanny, obracając podnośnik.

4

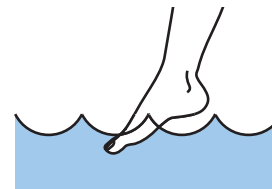

Pozwolić pacjentowi sprawdzić temperaturę wody. Jeśli potrzeba, dostosować temperaturę wody.

5

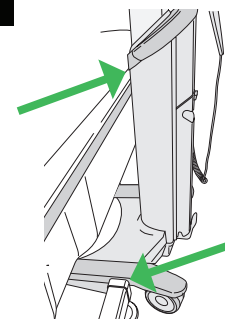

Wypośredkować podnośnik nad wanną, aż się o nią oprze.

6





Ryzyko
przycięcia



Obniżyć podnośnik do wysokości wygodnej dla opiekuna. Podnieść wannę. Upewnić się, że żadna część ciała nie zakleszczyła się.

7

Opcjonalnie

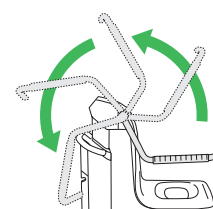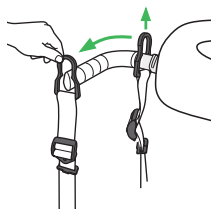

Jeżeli stan pacjenta na to pozwala:


1. Zdjąć pas bezpieczeństwa z oparcia pleców.
2. Pochylić pacjenta w przód.
3. Odchylić do tyłu oparcie pleców.
4. Oprzeć plecy pacjenta o wannę.
5. Odchylić do tyłu podpórkę do rąk, oddalając ją od pacjenta.

8



Kąpiel pacjenta.

1

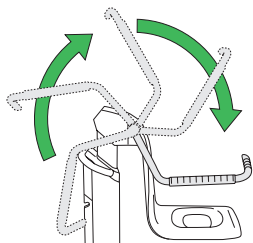


Otworzyć odpływ.
Jeśli podpórka pod rękę jest rozłożona, złożyć ją do przodu przed pacjentem.

2




Ryzyko upadku

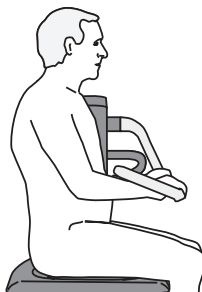

Upewnij się, że:


- pośladki pacjenta znajdują się na tylnej części siedziska,
- jego plecy oparte są o oparcie oraz
- dłonie znajdują się na podpórcie.

3

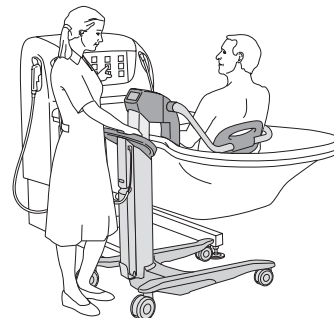

Przechylić pacjenta do przodu i obrócić do przodu uchwyt oparcia pleców.
Zapiąć pas bezpieczeństwa.

4

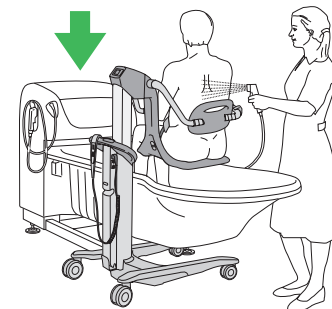

Opuścić wannę do najniższego położenia. Uruchomić prysznic i pozwolić, aby pacjent sprawdził ręką temperaturę wody. Jeśli potrzeba, dostosować temperaturę wody. Umyć pacjenta pod prysznicem.

5




Wytrzeć pacjenta i okryć go jednym lub dwoma ręcznikami, aby do ogrzać i zapewnić uczucie komfortu.

6



Upewnij się, że pacjent siedzi prosto na środku siedziska.

7

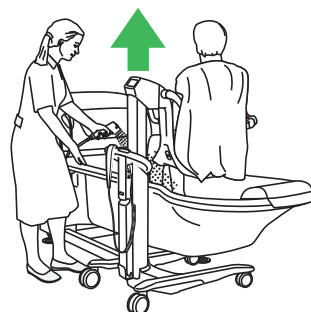

Unieść podnośnik tak, aby pomiędzy genitaliami pacjenta a obręczą wanny była wolna przestrzeń. Oplukać prysznicem stopy pacjenta i wytrzeć je.

8



Ryzyko przycięcia



Podczas odsuwania podnośnika znad wanny pomóc pacjentowi przenieść nogi nad krawędź wanny.

9



Ryzyko przewrócenia się



Upewnij się, że podnośnik Alenti jest całkowicie wolny od otaczających przeszkód. Obniżyć podnośnik.

