

# Maxi Sky 1000



## AVISO



Para evitar danos nos olhos e na pele, utilize sempre óculos e luvas de proteção. Se o contacto ocorrer, lave com água abundante. Se os olhos ou pele ficarem irritados, contacte um médico. Leia sempre as instruções de utilização e a Ficha de dados de segurança do desinfetante.

Limpe e desinfete antes de utilizar com pacientes novos.

### Acessórios necessários:

- Óculos e luvas de proteção
- Pano descartável

1. Utilize um pano molhado com água para remover os resíduos visíveis do elevador e respetivos acessórios de cima a baixo.
2. Utilize um pano húmido (água quente misturada com detergente suave) para limpar o equipamento de cima para baixo para remover todos os resíduos visíveis.
3. Enxague qualquer detergente residual com água limpa.
4. Limpe com um pano seco.

As áreas indicadas abaixo são as que mais provavelmente têm sujidade e micróbios. Preste atenção a:

- Rebordo do comando manual
- Parte de trás e manípulo do comando manual
- União entre a barra de suporte e a extensão
- Estrutura e estofo da barra de suporte
- Trinco

Para uma melhor superfície de rolamento para as rodas da maca, limpe o interior da calha de quatro em quatro meses. Para o fazer, introduza um pano húmido na abertura e faça-o deslizar na calha, de uma extremidade à outra.

