


Maxi Sky 440

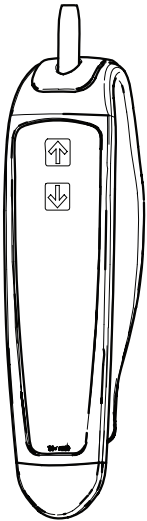

Handbedienung




Nach-oben-Taste



Nach-unten-Taste

Bedienfeld

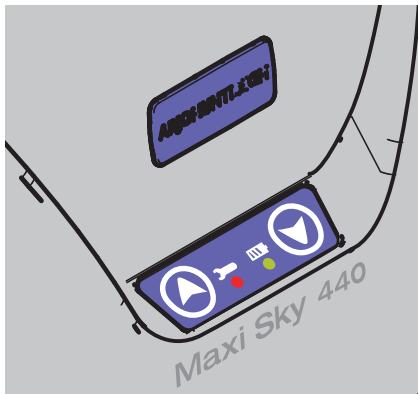

Tasten Nach oben und Nach unten

Die Tasten Nach oben und Nach unten werden verwendet, um einen Transfer abzuschließen, falls beim Betrieb mit der Handbedienung ein Problem aufgetreten ist.



Wartung erforderlich – Rotes Licht

Blinken (kein Signalton) – Wartung durch Ihre Regionalvertretung erforderlich.

Leuchten (mit Signalton) – Wartung ist überfällig.

Beenden Sie den Gebrauch des Lifters und wenden Sie sich an Ihre lokale Vertretung zwecks Instandsetzung.




Akkuladezustand – Gelbes Licht

Blinken – Akkus werden gerade geladen.

Leuchten – Ladevorgang beendet, Akkus geladen.

1

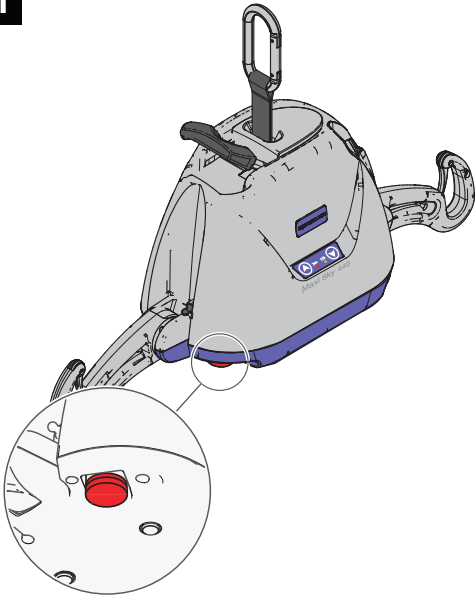

Der Lifter kann jederzeit von der Spannungsversorgung getrennt werden – hierfür wird der rote pilzförmige Bedienknopf unter dem Lifter gedrückt.

Zum Zurückstellen wird der Notausschalter in Pfeilrichtung (im Uhrzeigersinn) gedreht.

Personen, die den Lifter zum ersten Mal bedienen, sollten den „Notausvorgang“ üben, bevor sie einen Pflegebedürftigen transferieren.


Notbremse

Die Notbremse ist eine zusätzliche Sicherheitsfunktion, die in dem wenig wahrscheinlichen Fall, dass der Lifterantrieb oder -motor einmal ausfallen sollte, das Herunterfallen des Pflegebedürftigen automatisch verhindert.

Die Notbremse ist nur für die einmalige Betätigung ausgelegt und kann deshalb nur einmal verwendet werden. Rufen Sie Ihren Arjo-Gebietsverkaufsleiter an, um die Einheit ersetzen zu lassen. Die Notabsenkung kann nicht verwendet werden, nachdem die Notbremse betätigt wurde.


Notabsenkung

1

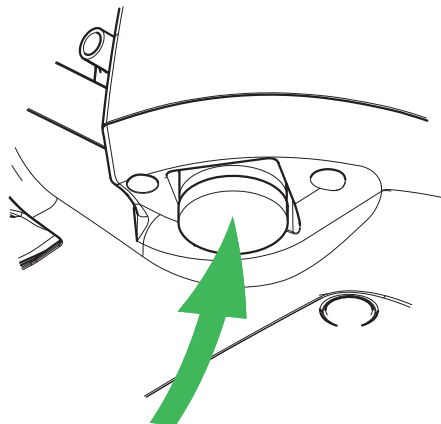


Drücken Sie den roten Notausschalter unter dem Lifter. Bringen Sie den Lifter mit dem Pflegebedürftigen über das Bett bzw. über den Rollstuhl.

2

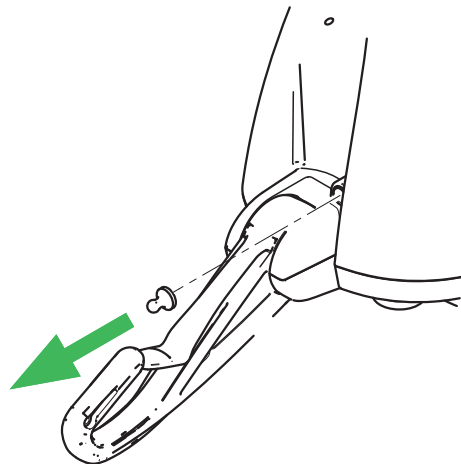

Entfernen Sie die schwarze Kunststoffkappe an der Seite des Lifters.

3

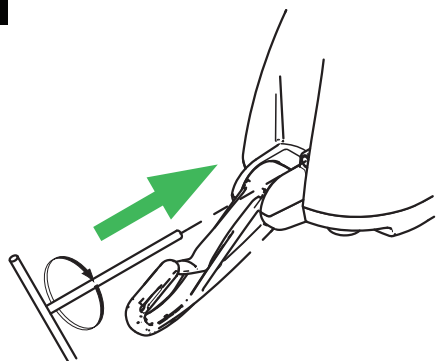

Das Spezialwerkzeug in die Öffnung einsetzen. Zum Absenken des Pflegebedürftigen im Uhrzeigersinn drehen. Das Spezialwerkzeug dreht den Motor direkt, sodass der Pflegebedürftige langsam herabgelassen wird.

Nachdem der Pflegebedürftige sicher auf ein Bett oder in einen Rollstuhl übernommen wurde, ziehen Sie das Spezialwerkzeug aus dem Lifter. Rufen Sie einen qualifizierten Techniker zur Wartung des Lifters an.

