


# Maxi Sky 440



## Pulsantiera di controllo

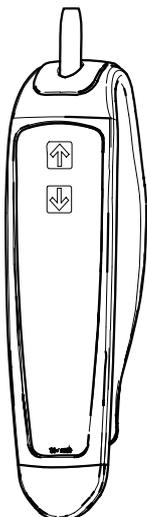


**Pulsante con freccia verso l'alto**



**Pulsante con freccia verso il basso**

## Pannello di controllo

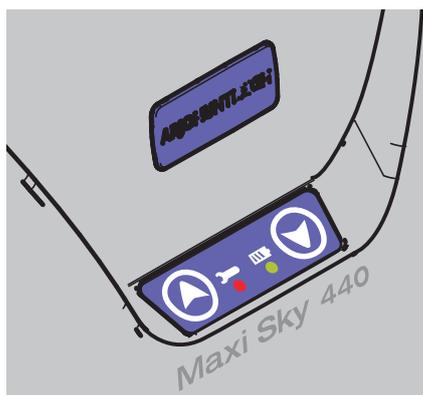

### **Pulsanti «Su» e «Giù»**

I pulsanti Su e Giù vengono usati per completare un trasferimento se si verifica un problema con la pulsantiera di controllo durante il funzionamento.



### **Manutenzione necessaria - Spia rossa**

Lampeggiante (senza bip) - Richiesta di manutenzione da parte del proprio rappresentante locale.  
Fissa (con bip) - Mancata esecuzione della manutenzione. Interrompere l'utilizzo del sollevapazienti e contattare il rappresentante locale per assistenza.




### **Livello di carica della batteria - Spia gialla**

Lampeggiante - In corso di ricarica della batterie.  
Fissa - Ricarica completata; batterie cariche.

## Arresto di emergenza

1

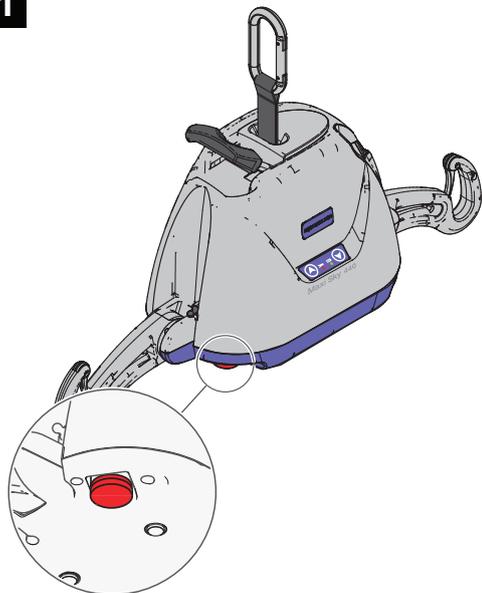

L'operatore può disattivare l'alimentazione elettrica in qualsiasi momento premendo il tasto rosso di emergenza a forma di fungo situato sotto il sollevapazienti.

Il tasto viene ripristinato ruotandolo in senso orario nella direzione delle frecce.

La prima volta si consiglia agli utenti di fare pratica con la manovra di arresto prima di azionare il sollevapazienti con un paziente.


## Freno di emergenza

Il freno di emergenza rappresenta un ulteriore dispositivo di sicurezza che impedisce automaticamente la caduta accidentale del paziente nella remota eventualità di un guasto alla trasmissione o al motore.

Il freno di emergenza è concepito per una sola attivazione e, pertanto, può essere utilizzato una sola volta. Contattare il proprio rappresentante Arjo per concordare la sostituzione dell'unità. Non è possibile utilizzare il dispositivo di discesa di emergenza quando il freno di emergenza è attivato.


## Discesa di emergenza

1

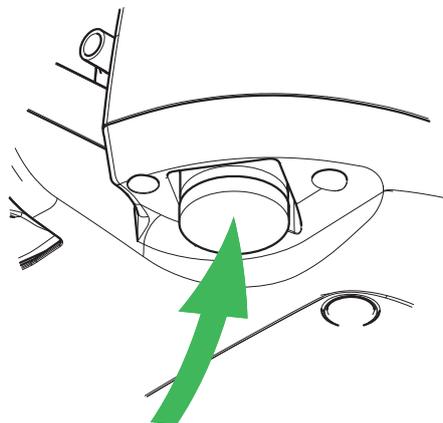


Premere il tasto rosso di arresto di emergenza sotto il sollevapazienti. Spostare il sollevapazienti con il paziente sul letto o sopra la sedia a rotelle.

2

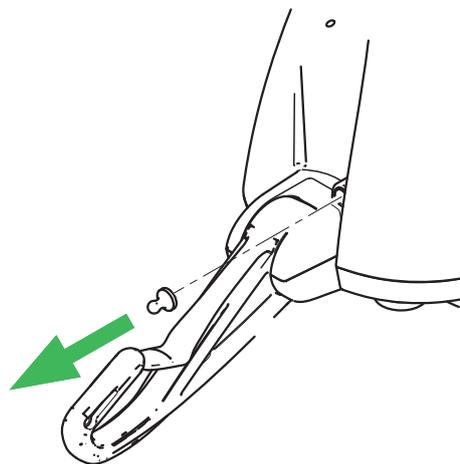

Rimuovere il tappo nero in plastica posto sul lato del sollevapazienti.

3

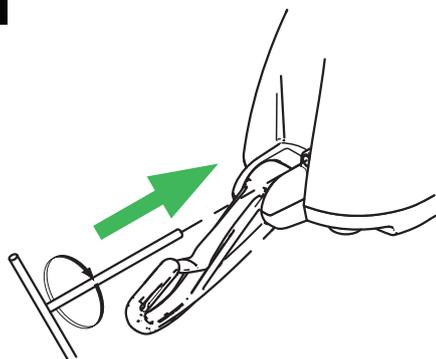

Inserire l'utensile speciale nell'apertura. Ruotarlo in senso orario per abbassare il paziente. La rotazione dell'utensile fa girare direttamente il motore cosicché ad ogni giro il paziente si abbassi leggermente.

Una volta abbassato in sicurezza il paziente sul letto o su una sedia a rotelle, rimuovere l'utensile dal sollevapazienti. Contattare un tecnico qualificato per la manutenzione del sollevapazienti.

