


# Maxi Sky 440



## Mando de control

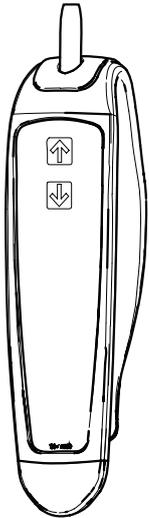


**Botón de subir**



**Botón de bajar**

## Panel de control

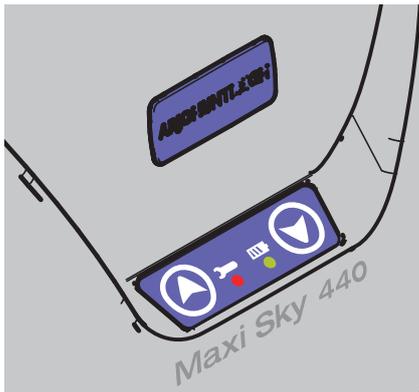

### Botones arriba y abajo

Los botones arriba y abajo se usan para completar el traslado si se produce un problema con el mando de control durante el funcionamiento.



### Mantenimiento necesario. Luz roja:

Intermitente (sin pitido): se requiere mantenimiento por parte de su representante local.  
Fija (con pitido): mantenimiento pendiente. Deje de utilizar la grúa y póngase en contacto con su representante local para realizar el servicio.




### Nivel de carga de la batería. Luz amarilla:

Intermitente: las baterías se están cargando.  
Fija: la carga ha finalizado y las baterías están cargadas.

## Desconexión de emergencia

1

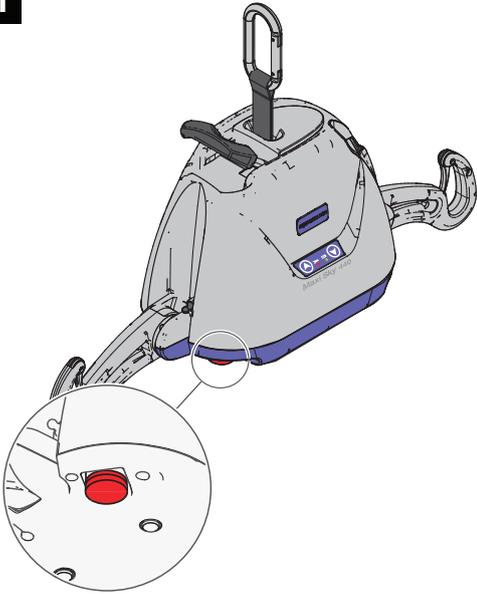

El operador puede cortar la energía eléctrica en cualquier momento pulsando el botón de emergencia rojo en forma de seta situado debajo de la grúa.

El botón se restablece girándolo en el sentido de las agujas del reloj, hacia las flechas.

Los usuarios noveles deberán ensayar esta maniobra de desconexión antes de manejar la grúa con un paciente.


## Freno de emergencia

El freno de emergencia es una función de seguridad adicional que evita automáticamente la caída del paciente en el caso improbable de que se produzca un fallo de la transmisión o del motor.

El freno de emergencia ha sido concebido para una única activación y, por lo tanto, solo puede utilizarse una vez. Llame a su representante de Arjo si necesita sustituir la unidad. El dispositivo de bajada de emergencia no se puede emplear cuando se ha activado el freno de emergencia.


## Bajada de emergencia

1

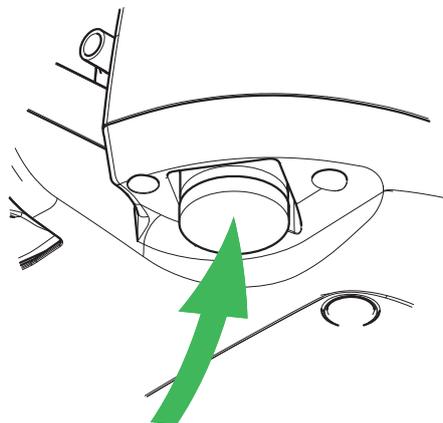


Pulse el botón de parada de emergencia rojo situado debajo de la grúa. Mueva la grúa con el paciente sobre la cama o en la silla de ruedas.

2

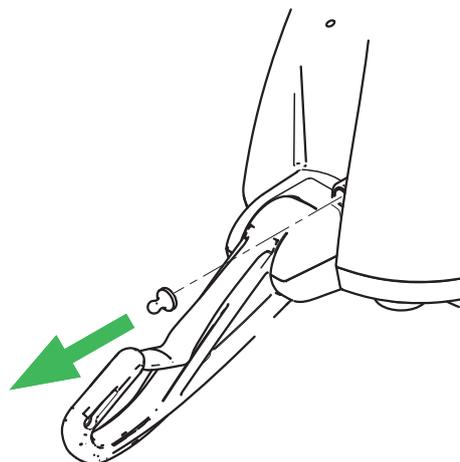

Retire el tapón de plástico negro situado en el lateral de la grúa.

3

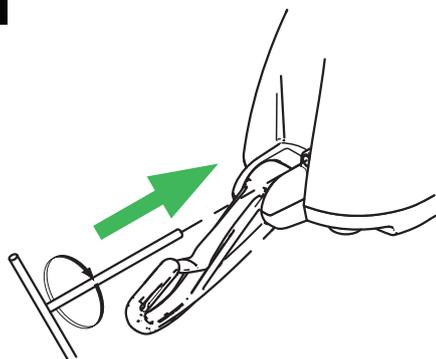

Inserte la herramienta especial en la abertura. Gírela en sentido horario para descender al paciente. El giro de la herramienta hace girar directamente el motor, de modo que a cada vuelta de la herramienta, el paciente descenderá de manera gradual.

Una vez que se haya bajado al paciente de manera segura a una cama o una silla de ruedas, retire la herramienta de la grúa. Llame a un técnico cualificado para realizar el mantenimiento de la grúa.

