


Maxi Sky 440

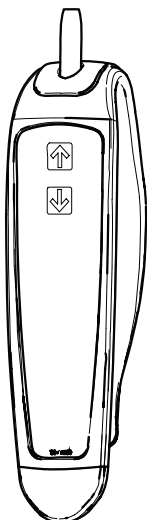

Ruční ovladač




Tlačítko nahoru



Tlačítko dolů

Ovládací panel

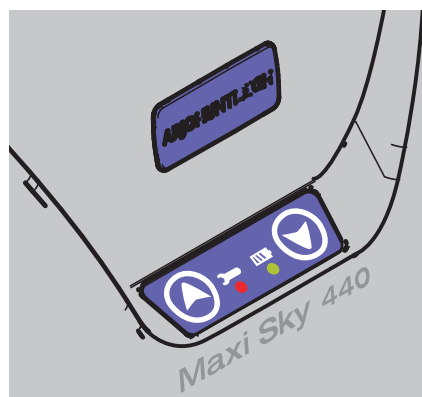

Tlačítka nahoru/dolů

Tlačítka nahoru a dolů se používají k provedení přesunu, pokud během provozu dojde k problému s ručním ovladačem.



Požadována údržba – červený světelný indikátor

Bliká (bez pípnutí) – požadována údržba místním zástupcem.

Svíí trvale (s pípnutí) – termín údržby je prošlý. Přestaňte zvedák používat a kontaktujte svého místního zástupce za účelem servisu.




Úroveň dobíjení baterie – žlutý světelný indikátor

Bliká – baterie se dobíjí.

Svíí trvale – dobíjení ukončeno, baterie je nabitá.

Nouzové zastavení

1

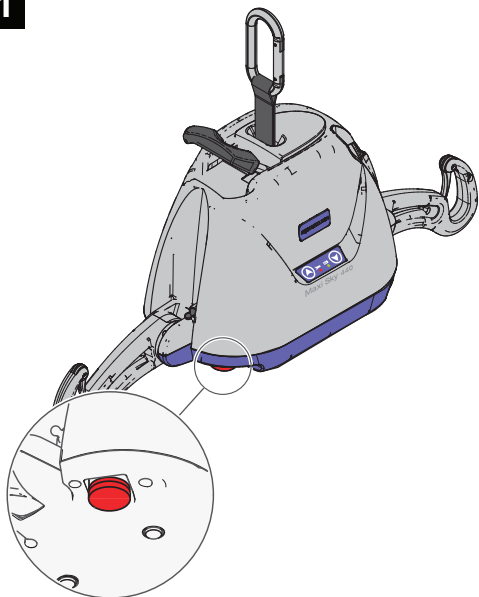

Obsluha může kdykoliv vypnout přívod elektrického proudu stisknutím červeného nouzového tlačítka ve tvaru hříbku umístěného pod zvedákem.

Tlačítko se resetuje otočením ve směru šipek (ve směru chodu hodinových ručiček).

Uživatelé, kteří pracují se zvedákem poprvé, by si měli nacvičit toto zastavení dříve, než budou obsluhovat zvedák s pacientem/klientem.

Nouzová brzda

Nouzová brzda je další bezpečnostní funkce, která automaticky brání pádu pacienta/klienta v nepravděpodobném případě poruchy převodů nebo motoru.


Nouzová brzda je určena jen pro jedno spuštění a může být proto použita pouze jednou.

Zavolejte zástupce servisního oddělení společnosti Arjo, aby zajistil výměnu jednotky.

Nouzové spouštění nelze použít, jakmile je aktivovaná nouzová brzda.


Nouzové spouštění

1

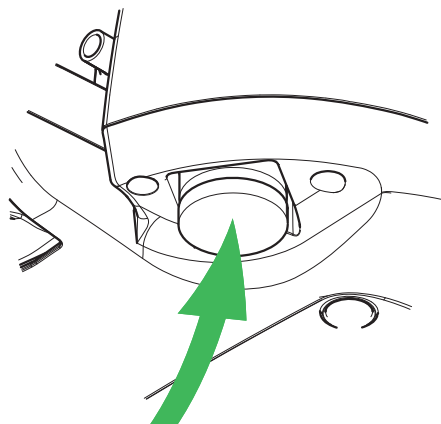


Stiskněte červené tlačítko nouzového vypínání umístěné pod zvedákem. Zvedák s pacientem/klientem přesuňte nad lůžko nebo invalidní vozík.

2

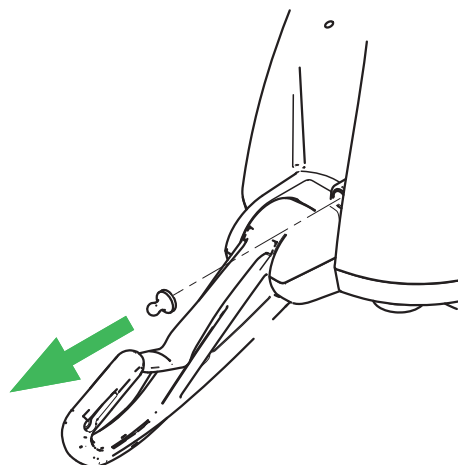

Odstraňte černou plastovou čepku, která se nachází na boku zvedáku.

3

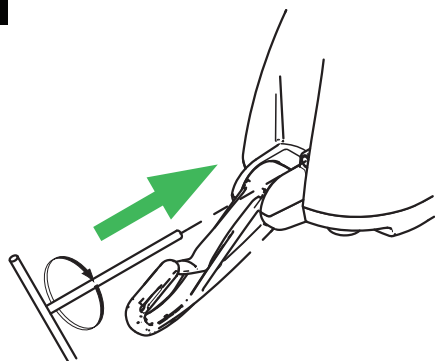

Zasuňte do něho speciální nástroj. Pro spuštění pacienta/klienta jím otočte proti směru chodu hodinových ručiček. Každým pootočením nástroje se přímo otočí motor, takže pacient/klient je jemně spuštěn.

Když je pacient/klient bezpečně spuštěn na lůžko nebo invalidní vozík, vyjměte nástroj ze zvedáku. Kontaktujte kvalifikovaného technika, aby provedl servis zvedáku.

