

# Sara 3000

## Přepravní vak

(Více informací o vacích naleznete v dokumentaci dodané s příslušným vakem.)

CE  
2797

**1**

**POZNÁMKA**  
Holenní popruhy nepoužívejte v kombinaci s přepravním vakem.

Předkloňte pacienta/klienta dopředu a vak přehoďte přes dolní část jeho zad tak, aby byl 5 cm (2 palce) nad pasem.

**2**

Ujistěte se, že je jisticí popruh oddělený.  
Vezměte obě stehenní části vaku (A) a jednu po druhé zasuňte pod pacientovy/klientovy nohy.

**3**

Zapněte přezky (jsou-li k dispozici) nebo popruh s háčkem a očkem (je-li k dispozici).  
Popruh utáhněte tak, aby byl pro pacienta/klienta pohodlný.

**4**

Při použití vaku se musí vždy použít a upevnit hrudní jisticí popruh.

Přesuňte zvedák Sara 3000 do požadované polohy.

**5**

K upevňovacím bodům připněte klipy. Zatáhněte za klipy, abyste je zajistili podle obrázku.

**6**


Upínací poutka (A) připněte na obou stranách (vlevo a vpravo) k centrálnímu očku (B).

**7**

Chodidla pacienta/klienta položte na opěrku nohou (A).

**8**

**POZNÁMKA**  
Stisknutím příslušného ovládacího tlačítka (A je možné rozevřít nohy podvozku, aby byly vně křesla.

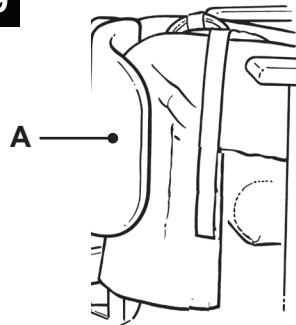**9**

Přisuňte zvedák Sara 3000 k pacientovi/klientovi tak, aby se dolními částmi nohou dotýkal opěrky koleno (A).

**13**

Zvedněte pacienta/klienta nad židli.

**10**

Před zvedáním a v jeho průběhu neustále kontrolujte, zda jsou všechny klipy vaku bezpečně připojeny a ve správné poloze a zda se při postupném zatížení správně napínají.

**11**

Jednu či obě ruce pacienta/klienta položte na pomocné rukojeti.

**12**

#### **POZNÁMKA**

Pacienta/klienta nezvedejte výše než do úrovně do polohy vsedě.

#### **POZNÁMKA**

Pacient/klient nesmí při zvedání pomáhat.

**14**

Nepokoušejte se uvolnit upínací klipy, poutka ani hrudní jisticí popruh, dokud vak pacienta/klienta podpírá.

#### **POZNÁMKA**

Před přesunem zkонтrolujte, zda jsou nohy podvozku v zavřené poloze.

**15**

Pohyb by měl vždy probíhat ve znázorněném směru.

Přesuňte pacienta/klienta na požadované místo.

**16**

Při spouštění dbejte na to, aby se pacient/klient plně opíral o židli, křeslo, toaletní mísu apod., na které je spouštěn.

Spusťte pacienta/klienta.

Jakmile je pacient/klient usazen, uvolněte hrudní jisticí popruh a klipy vaku vytáhněte vzhůru, abyste je odepnuli z pomocných madel zvedáku Sara 3000.

## Stavěcí vak

1



Předkloňte pacienta/klienta dopředu a vak přehoďte přes dolní část jeho zad tak, aby byl 5 cm (2 palce) nad pasem.

2



Ujistěte se, že je vnitřní jisticí popruh oddělený.

3



Zapněte přezky (jsou-li k dispozici) nebo popruh s háčkem a očkem (je-li k dispozici).

Popruh utáhněte tak, aby byl pro pacienta/klienta pohodlný.


4



Při použití vaku se musí vždy použít a upevnit hrudní jisticí popruh.


Přesuňte zvedák Sara 3000 do požadované polohy.

5

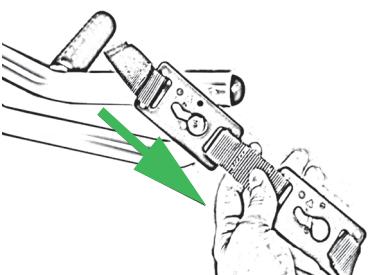

K upevňovacím bodům připněte klipy. Zatáhněte za klipy, abyste je zajistili podle obrázku.

6

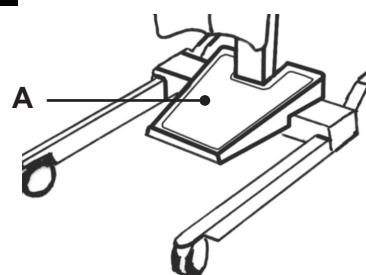


Chodidla pacienta/klienta položte na opěrku nohou (A).

7

### POZNÁMKA

Stisknutím příslušného ovládacího tlačítka je možné rozevřít nohy podvozku, aby byly vně křesla.

8

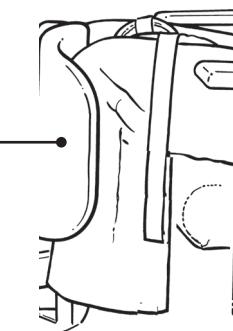

Přisuňte zvedák Sara 3000 k pacientovi/klientovi tak, aby se dolními částmi nohou dotýkal opěrky kolenou (A).

**9**

Před zvedáním a v jeho průběhu neustále kontrolujte, zda jsou všechny klipy vaku bezpečně připojeny, ve správné poloze a zda se správně napínají.

**10**

Jednu či obě ruce pacienta/klienta položte na pomocné rukojeti.

**11**

Pacient/klient přejde z polohy vsedě do polohy vestoje.

Povzbuděte pacienta/klienta, aby při vstávání z křesla pokud možno co nejvíce spolupracoval anebo si stoupnl sám.

**12**

Zvedněte pacienta/klienta.

**13**

Nepokoušejte se uvolnit upínací klipy, poutka ani hrudní jisticí popruh, dokud vak pacienta/klienta podpírá.

**POZNÁMKA**

Před přesunem zkонтrolujte, zda jsou nohy podvozku v zavřené poloze.

**14**

Pohyb by měl vždy probíhat ve znázorněném směru.

Přesuňte pacienta/klienta na požadované místo.

**15**

Při spouštění dbejte na to, aby se pacient/klient plně opíral o židli, křeslo, toaletní mísu apod., na které je spouštěn.

Spusťte pacienta/klienta.

Jakmile je pacient/klient usazen, uvolněte hrudní jisticí popruh a klipy vaku vytáhněte vzhůru, abyste je odepnuli z pomocných madel zvedáku Sara 3000.

