

# Sara 3000

## Cesta de Transferência

(Para mais informações sobre cestas, leia a documentação da cesta.)

**1** **OBSERVAÇÃO**  
Não use a tira de fixação das pernas com a cesta de Transferência.



Incline o paciente para frente e posicione a cesta ao redor da parte inferior de suas costas, 5 cm (2 polegadas) acima da linha da cintura.




**2**  
Certifique-se de que o cinto de suporte está separado.  
Coloque cada seção de perna (A) da cesta sob cada perna.




**3**  
Prenha as fivelas (se disponíveis) ou o velcro (se disponível).  
Ajuste o cinto de modo que fique confortável para o residente.

**4**  
  
O cinto peitoral da cesta deve sempre ser colocado e ajustado ao usar a cesta.


Mova o Sara 3000 para a posição.

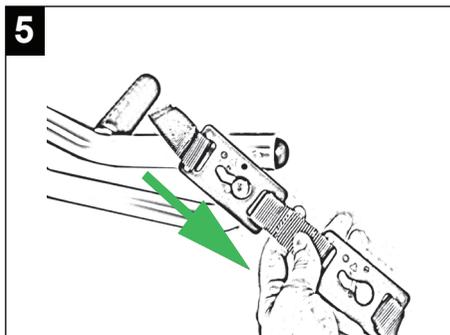

**5**  
Aplique os prendedores nos pontos de fixação. Puxe os prendedores, conforme mostrado, para afixá-los.

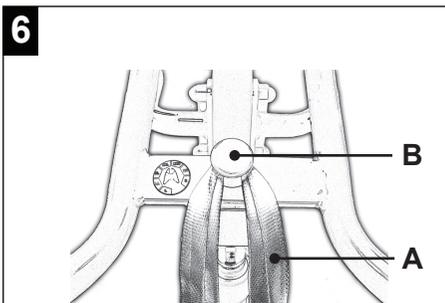

**6**  
Prenha cada laço de fixação (A) na lateral de cada perna (esquerda e direita) na argola central (B).

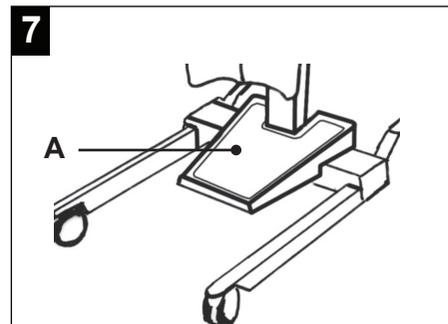


**7**  
Posicione os pés do residente no suporte de pés (A).

**8** **OBSERVAÇÃO**  
As pernas do chassi podem ser abertas para contornar uma cadeira, acionando o botão de controle adequado (A).



9

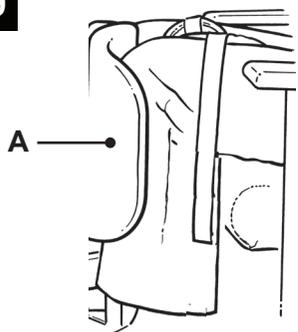

Empurre o Sara 3000 na direção do residente de modo que a parte inferior da perna entre em contato total com o suporte de joelhos (A).

10



Sempre verifique se todos os prendedores da cesta estão firmemente conectados e posicionados antes e durante o ciclo de elevação, bem como tracionados à medida que o peso é gradualmente elevado.

11



Posicione a(s) mão(s) do residente nos apoios de suporte.

12

**OBSERVAÇÃO**

Não eleve o residente para cima da posição sentada.

**OBSERVAÇÃO**

O residente não deve auxiliar na elevação.

13



Eleve o residente um pouco da cadeira.

14



Não tente soltar os prendedores de fixação, as alças ou cinto de fixação peitoral enquanto o residente ainda estiver na cesta.

**OBSERVAÇÃO**

Verifique se as pernas do chassi estão na posição fechada antes da transferência.

15



Sempre mova na direção mostrada.

Transfira o residente para o destino desejado.

16



Ao descer, certifique-se de que o residente esteja completado apoiado pelo assento, cadeira, vaso sanitário etc. sobre o qual está sendo posicionado.

Descer o residente.

Quando o residente estiver sentado, abra o cinto peitoral e puxe os prendedores da cesta para cima, para destravá-los dos braços de apoio do residente do Sara 3000.

## Cesta em pé

1



Incline o paciente para frente e posicione a cesta ao redor da parte inferior de suas costas, 5 cm (2 polegadas) acima da linha da cintura.

2



Certifique-se de que o cinto de suporte interno está separado.

3



Prenda as fivelas (se disponíveis) ou o velcro (se disponível).

Ajuste o cinto de modo que fique confortável para o residente.


4



O cinto peitoral da cesta deve sempre ser colocado e ajustado ao usar a cesta.


Mova o Sara 3000 para a posição.

5

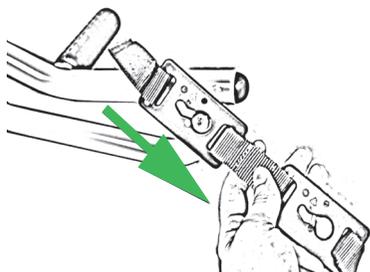

Aplique os prendedores nos pontos de fixação. Puxe os prendedores, conforme mostrado, para afixá-los.

6

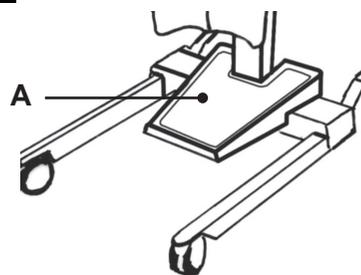


Posicione os pés do residente no suporte de pés (A).

7

**OBSERVAÇÃO**  
As pernas do chassi podem ser abertas para contornar uma cadeira, acionando o botão de controle adequado.

8

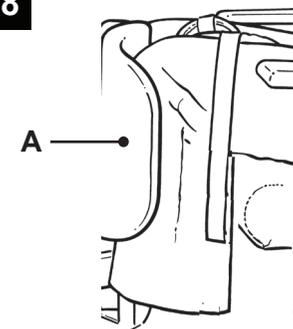

Empurre o Sara 3000 na direção do residente de modo que a parte inferior da perna entre em contato total com o suporte de joelhos (A).

9



**Sempre verifique se todos os prendedores da cesta estão firmemente conectados e posicionados antes e durante o ciclo de elevação, bem como tracionados.**

10



Posicione a(s) mão(s) do residente nos apoios de suporte.

11

A postura corporal do residente deve mudar de sentado para em pé.

Incentive o residente, se for capaz, a auxiliar o máximo possível para se levantar da cadeira e/ou se equilibrar.

12



Elevar o residente.

13



**Não tente soltar os prendedores de fixação, as alças ou cinto de fixação peitoral enquanto o residente ainda estiver na cesta.**

#### **OBSERVAÇÃO**

**Verifique se as pernas do chassi estão na posição fechada antes da transferência.**

14



**Sempre mova na direção mostrada.**

Transfira o residente para o local desejado.

15



**Ao descer, certifique-se de que o residente esteja completado apoiado pelo assento, cadeira, vaso sanitário etc. sobre o qual está sendo posicionado.**

Descer o residente.

Quando o residente estiver sentado, abra o cinto peitoral e puxe os prendedores da cesta para cima, para destravá-los dos braços de apoio do residente do Sara 3000.

