

# Sara 3000

## Funda de transferência

(Para mais informação sobre fundas, leia a respetiva documentação.)


1

**NOTA**  
Não utilize a extensão de fixação das pernas quando utilizar a funda de transferência.



Incline o residente para a frente e coloque a funda à volta da zona lombar inferior, 5 cm (2 polegadas) acima da linha da cintura.

2

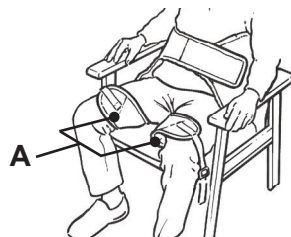

Certifique-se de que a extensão de apoio está separada.

Puxe cada secção da perna (A) da funda e deslize-a por baixo de cada perna.

3



Pressione as fivelas (se disponíveis) ou a fita com fixação por sistema de gancho e argola (se disponível) para se unirem.

Aperte a extensão de modo a ficar confortável para o residente.


4



Quando se usa a funda, a extensão de apoio do peito deve ser sempre aplicada e apertada.


Mova o Sara 3000 para a devida posição.

5

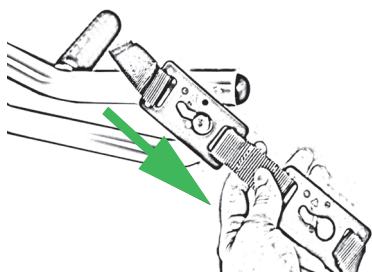


Aplique os ganchos nos pontos de fixação. Empurre os ganchos como mostrado para os prender.

6

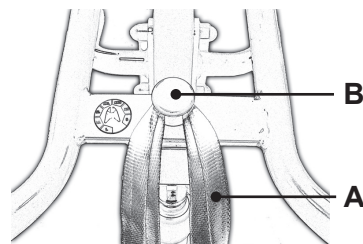

Prenda cada alça de fixação (A) em cada lado da perna (direito e esquerdo) na presilha central (B).


7

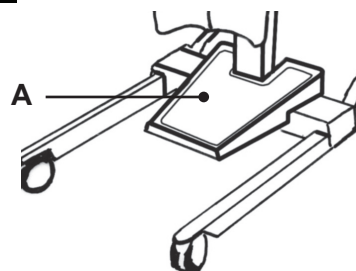


Coloque os pés do residente no apoio para os pés (A).

8

**NOTA**  
As pernas do chassis podem abrir-se para contornar uma cadeira, premindo o botão de controlo adequado (A).

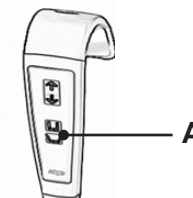

9

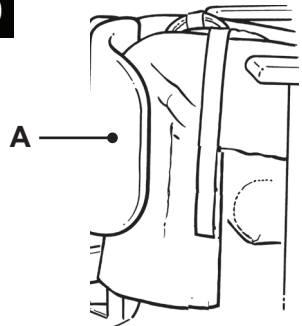

Empurre o Sara 3000 na direção do residente de modo a haver contacto total entre a parte inferior das pernas e o apoio para os joelhos (A).

10



**Certifique-se de que os ganchos da funda estão presos de forma segura e na posição devida, antes da elevação, durante o ciclo de elevação e em tensão, à medida que o peso vai sendo levantado gradualmente.**

11




Coloque a(s) mão(s) do residente nas pegas de apoio.

12

**NOTA**  
Não levante o residente além da posição sentada.

**NOTA**  
O residente não deve ajudar na elevação.

13

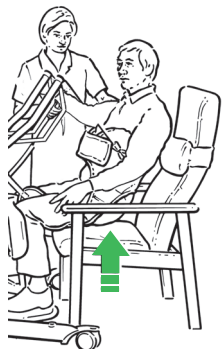

Eleve o residente, afastando-o da cadeira.

14



**Não tente libertar os ganchos de fixação, as alças ou a extensão de fixação do peito enquanto o residente estiver apoiado pela funda.**

**NOTA**  
Certifique-se de que as pernas do chassis estão fechadas antes da transferência.

15



**Mova sempre na direção mostrada.**

Transfira o residente para o destino pretendido.

16



**Ao descer o residente, certifique-se de que ele está totalmente apoiado pelo assento, cadeira, sanita, etc, quando for descido.**

Baixe o residente.

Quando o residente estiver sentado, abra a extensão de apoio do peito e puxe os ganchos da funda para cima, para os soltar dos braços de apoio do residente do Sara 3000.

## Funda para pôr em pé

1



Incline o residente para a frente e coloque a funda à volta da zona lombar inferior, 5 cm (2 polegadas) acima da linha da cintura.

2



Certifique-se de que a extensão de apoio interior está separada.

3



Pressione as fivelas (se disponíveis) ou a fita com fixação por sistema de gancho e argola (se disponível) para se unirem.

Aperte a extensão de modo a ficar confortável para o residente.


4



**Quando se usa a funda, a extensão de apoio do peito deve ser sempre aplicada e apertada.**


Mova o Sara 3000 para a devida posição.

5

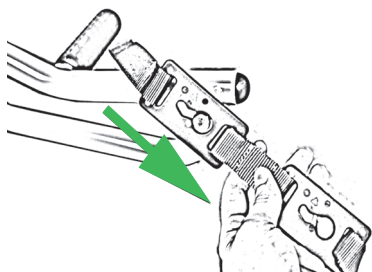

Aplique os ganchos nos pontos de fixação. Empurre os ganchos como mostrado para os prender.

6

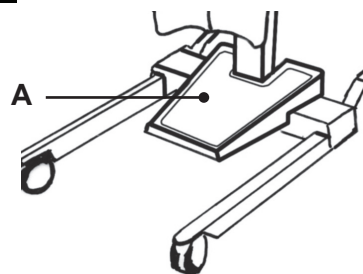


Coloque os pés do residente no apoio para os pés (A).

7

### NOTA

As pernas do chassis podem abrir-se para contornar uma cadeira, premindo o botão de controlo adequado.

8

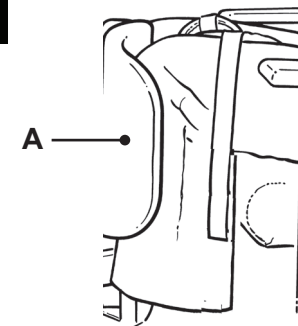

Empurre o Sara 3000 na direção do residente de modo a haver contacto total entre a parte inferior das pernas e o apoio para os joelhos (A).

9



**Certifique-se de que os ganchos da funda estão presos de forma segura e na posição devida, antes da elevação, durante o ciclo de elevação e em tensão.**

10



Coloque a(s) mão(s) do residente nas pegas de apoio.

11

A postura do corpo do residente deve passar da posição sentada para a posição em pé.

Se o residente for capaz, encoraje-o a ajudar o mais possível a levantar-se da cadeira e/ou a equilibrar-se em pé.

12



Levante o paciente.

13




**Não tente libertar os ganchos de fixação, as alças ou a extensão de fixação do peito enquanto o residente estiver apoiado pela funda.**

#### NOTA

**Certifique-se de que as pernas do chassis estão fechadas antes da transferência.**

14

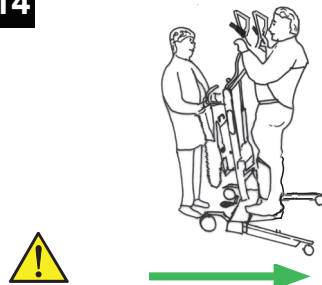

**Mova sempre na direção mostrada.**

Transfira o residente para o destino pretendido.

15



**Ao descer o residente, certifique-se de que ele está totalmente apoiado pelo assento, cadeira, sanita, etc, quando for descido.**

Baixe o residente.

Quando o residente estiver sentado, abra a extensão de apoio do peito e puxe os ganchos da funda para cima, para os soltar dos braços de apoio do residente do Sara 3000.

