



Calypso

Dùng khẩn cấp

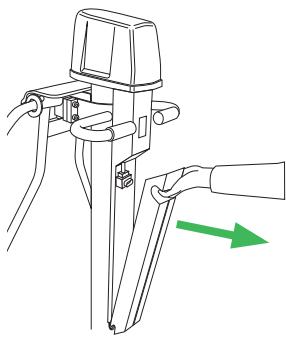


Để dừng ngay thao tác nâng, tháo gỡ pin.

Chức năng cao và thấp khẩn cấp

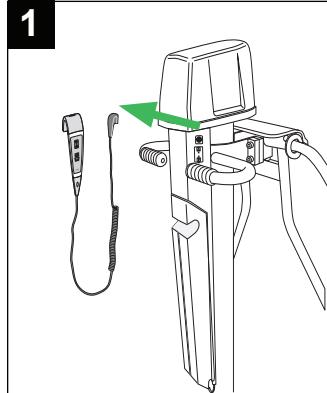

Rút phích cắm điều khiển bằng tay.

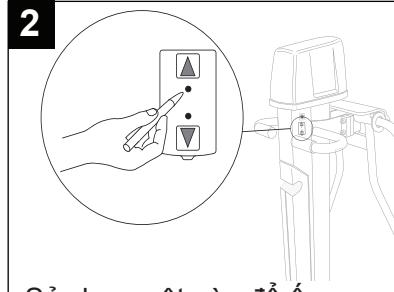

Sử dụng vật cùn để ấn.


Nâng:

Ấn vật đó vào lỗ bên cạnh mũi tên lên.


Hạ:

Ấn vật đó vào lỗ bên cạnh mũi tên xuống.

Nâng và hạ bằng tay

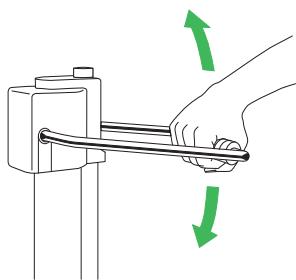


Nâng: bơm bằng cách sử dụng hết khoảng dịch chuyển để bơm.

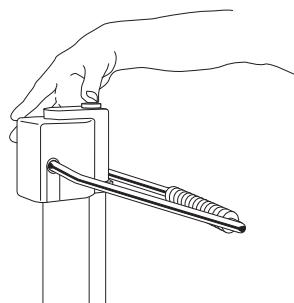


Hạ: ấn nút hạ.

Nâng và hạ bằng điện

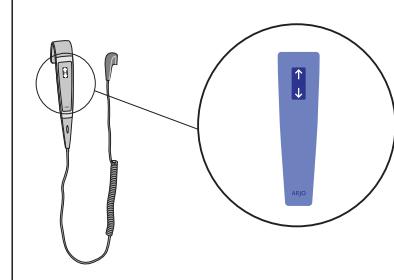


Nâng: ấn mũi tên lên.
Hạ: ấn mũi tên xuống.

Phanh

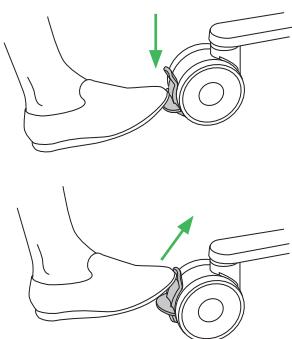


Bóp phanh: nhấn xuống
Nhả phanh: đẩy lên

Tựa lưng và tựa tay

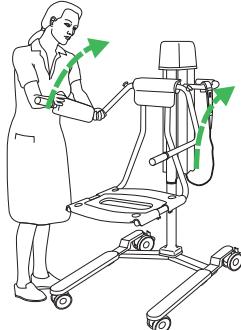

Nâng lên gấp tựa tay và tựa lưng lên.


Tháo chõ ngồi

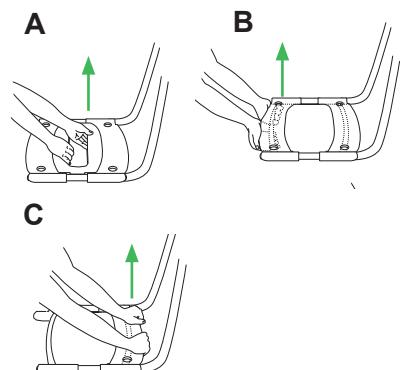

A: Kéo thẳng lên
B: Ép lên trên từ bên dưới
C: Kéo thẳng lên


Thắt đai an toàn

1

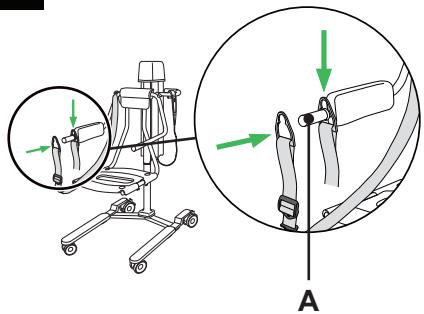


Gắn đai an toàn vào tay cầm di chuyển (A).
Ấn xuống để khóa.

2

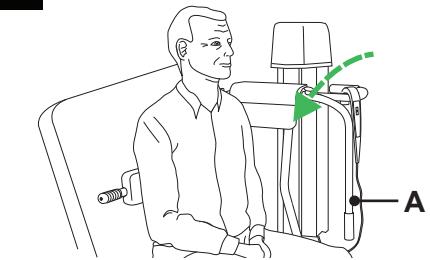

Gập tựa tay lên (A).
Đặt bệnh nhân
Gập tựa tay xuống (A).


3

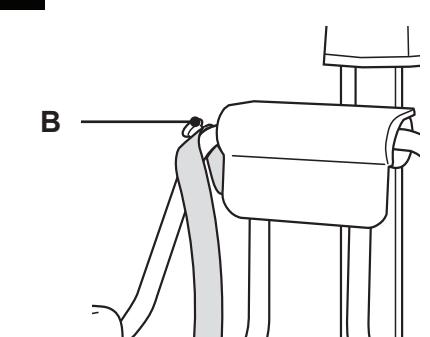

Đặt đai an toàn trước mặt bệnh nhân, gắn chặt vào núm (B).


Điều chỉnh đai an toàn

1

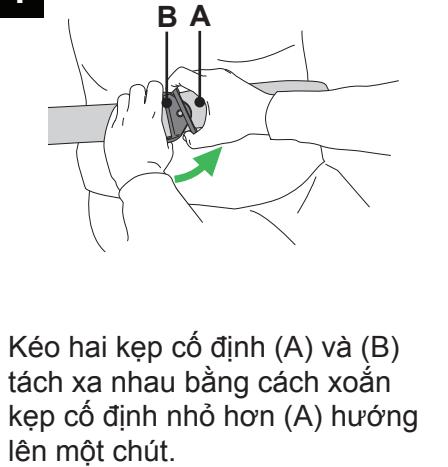


Kéo hai kẹp cố định (A) và (B) tách xa nhau bằng cách xoắn kẹp cố định nhỏ hơn (A) hướng lên một chút.

2

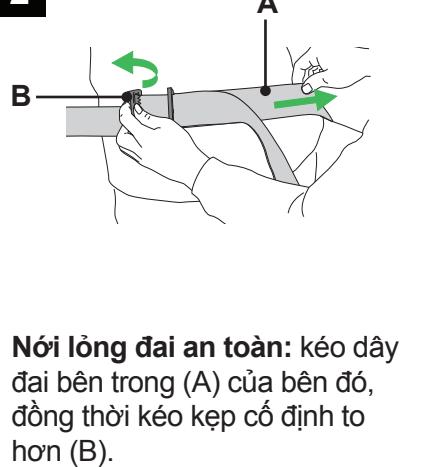

Nới lỏng đai an toàn: kéo dây đai bên trong (A) của bên đó, đồng thời kéo kẹp cố định to hơn (B).


3

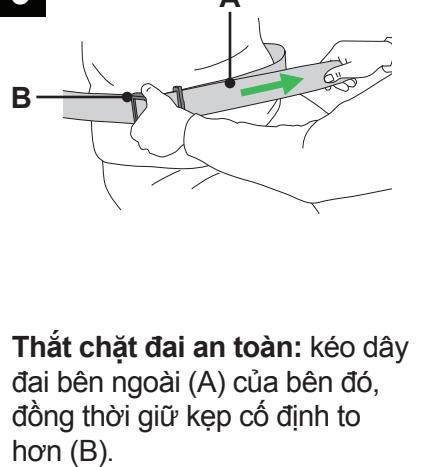


Thắt chặt đai an toàn: kéo dây đai bên ngoài (A) của bên đó, đồng thời giữ kẹp cố định to hơn (B).

Tháo đai an toàn

4

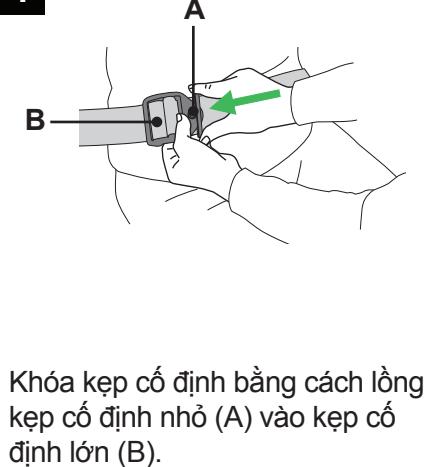

Khóa kẹp cố định bằng cách lồng kẹp cố định nhỏ (A) vào kẹp cố định lớn (B).

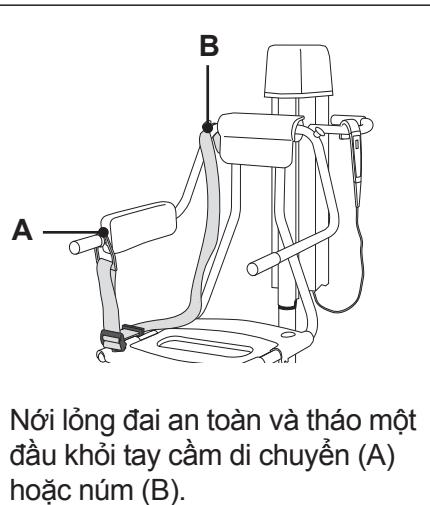

Nới lỏng đai an toàn và tháo một đầu khỏi tay cầm di chuyển (A) hoặc núm (B).