

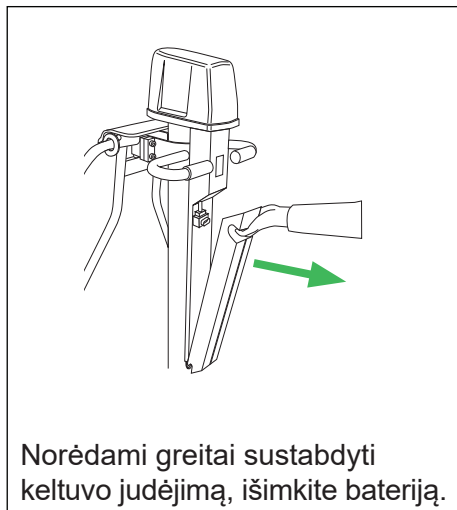



Avarinis išjungiklis

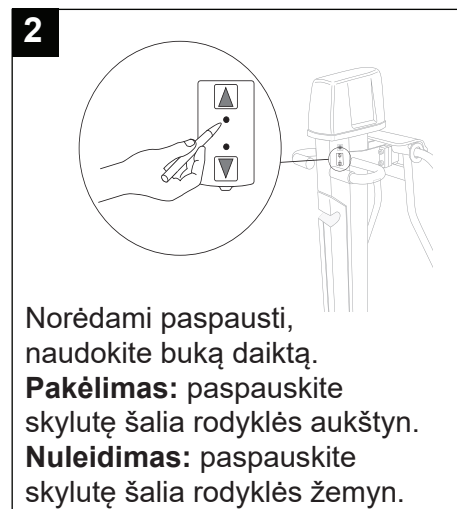


Avarinis pakėlimas ir nuleidimas

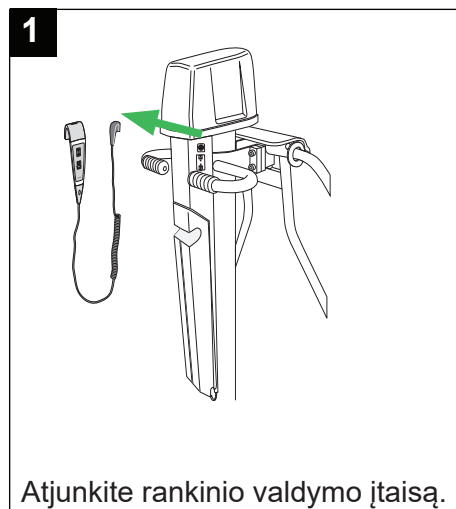


Rankinis pakėlimas ir nuleidimas

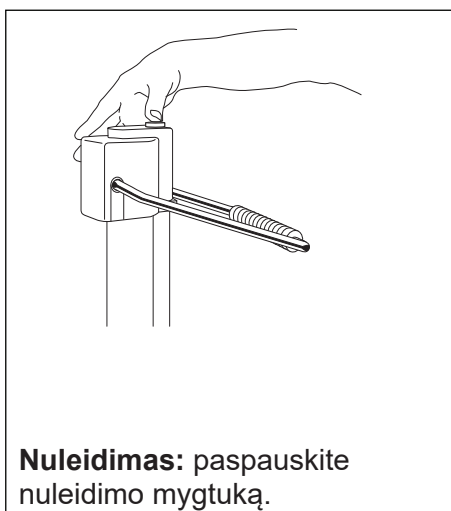

Pakėlimas ir nuleidimas elektriniu būdu

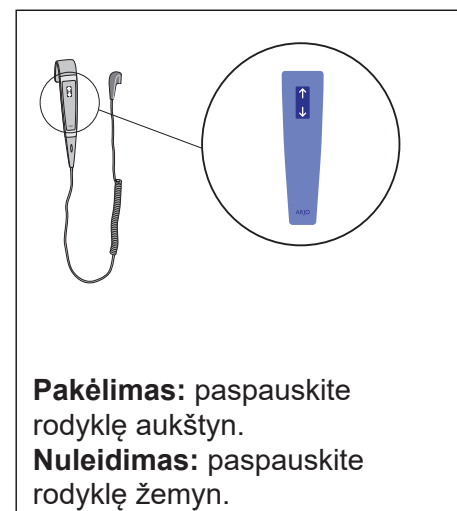


Stabdžiai

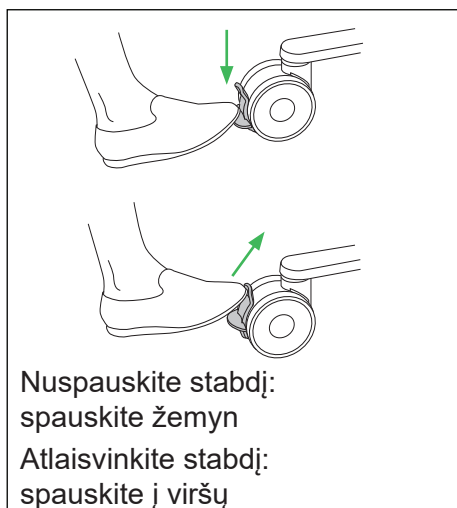

Rankų atrama ir nugaros atlošas




Sėdynės išėmimas

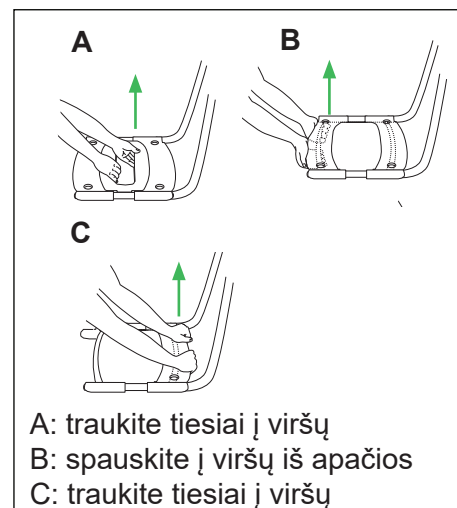


Saugos diržo tvirtinimas

1

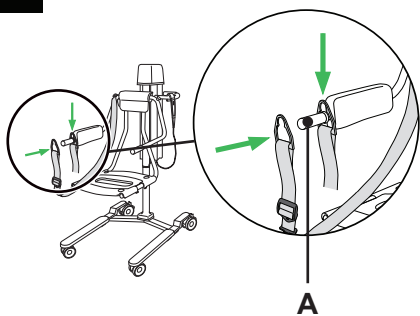


Pritvirtinkite saugos diržą prie perkėlimo rankenos (A). Paspauskite žemyn, kad užfiksuotumėte.

2

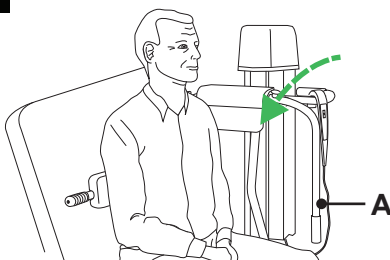

Pakelkite rankų atramą (A). Įtaisykite pacientą. Nulenkite rankų atramą (A).


3

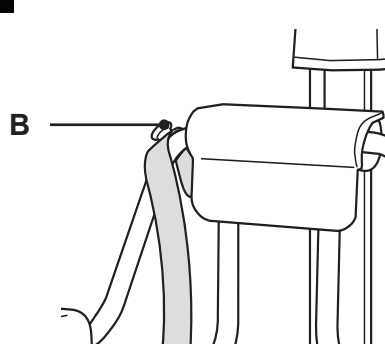

Dėkite saugos diržą priešais pacientą ir prisekite prie rankenėlės (B).


Saugos diržo reguliavimas

1

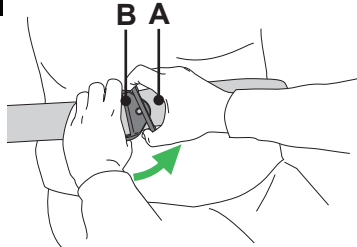


Atitraukite tvirtinimo sagtis (A) ir (B) vieną nuo kitos šiek tiek pasukdami mažesniąją sagtį (A) į viršų.

2

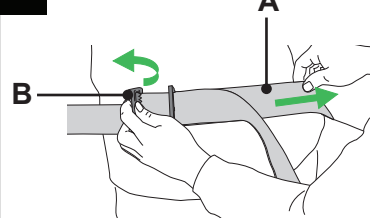

Atlaisvinkite saugos diržą: traukdami vidinį diržą (A) į šoną ir tuo pat metu pakeldami didesniąją sagtį (B).


3

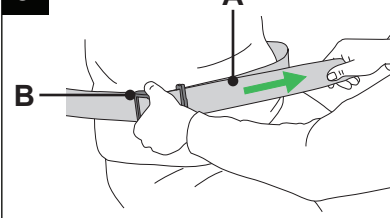


Priveržkite saugos diržą: traukite išorinį diržą (A) į šoną ir tuo pat metu laikykite didesniąją sagtį (B).

Nuimkite saugos diržą

4

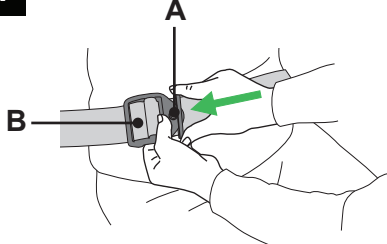

Užsekite diržo sagtis įkišdami mažesniąją sagtį (A) į didesniąją sagtį (B)

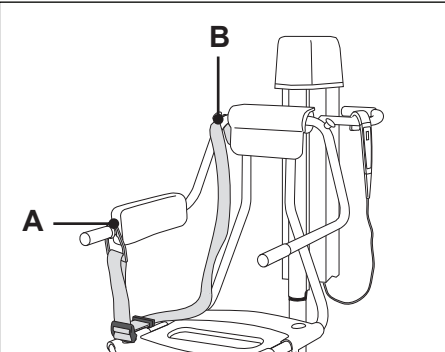

Atlaisvinkite saugos diržą ir nuimkite vieną jo galą nuo perkėlimo rankenos (A) arba rankenėlės (B).

