




Apturēšana avārijas situācijā Pacelšana un nolaišana avārijas situācijās

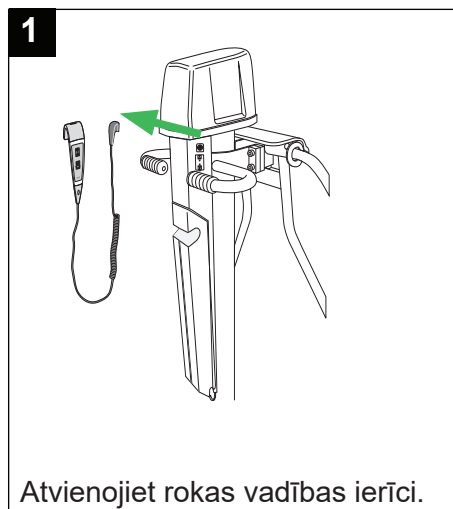


Manuālā pacelšana un nolaišana

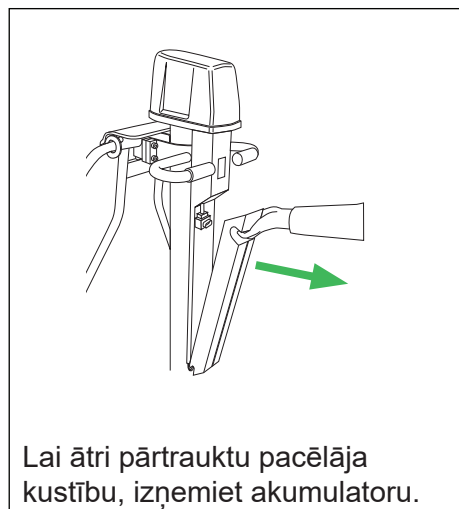

Elektriska pacelšana un nolaišana

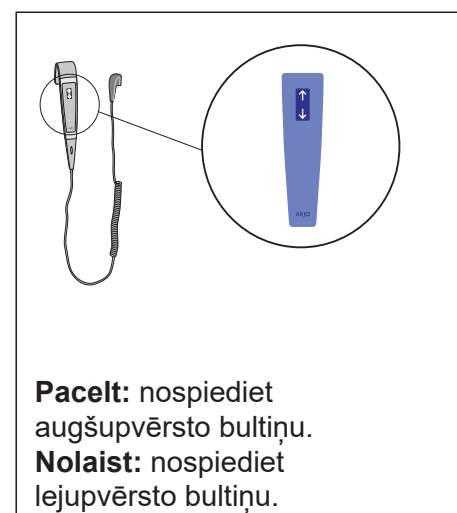


Bremzes

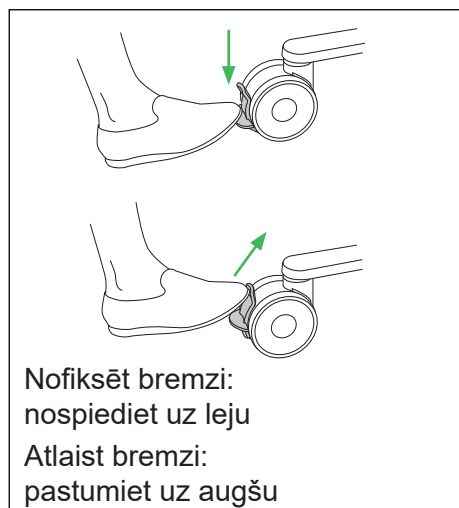

Roku balsts un atzveltne




Sēdekļa noņemšana

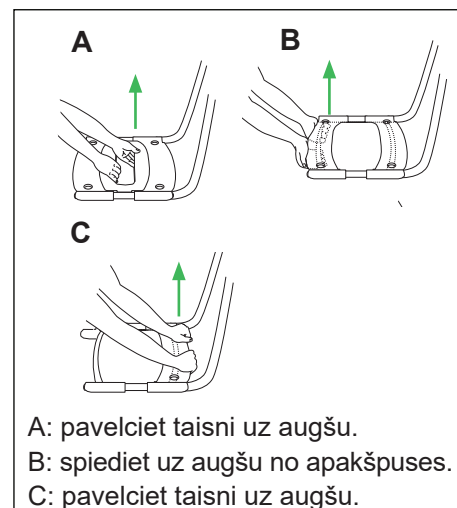


Drošības siksnas piestiprināšana

1

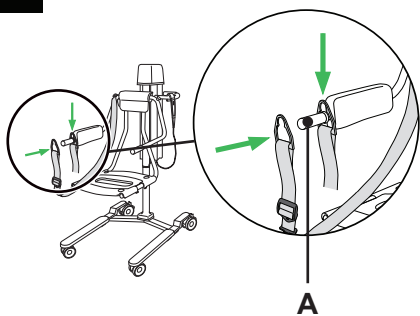


Piestipriniet drošības siksnu pārvietošanas rokturim (A). Piespiediet uz leju, lai bloķētu.

2

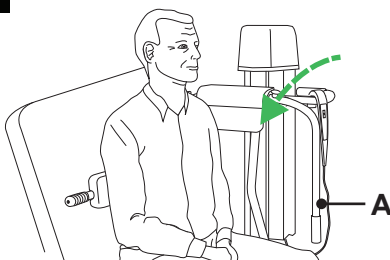

Salokiet roku balstu (A). Pozicionējiet pacientu. Nolokiet roku balstu (A).


3

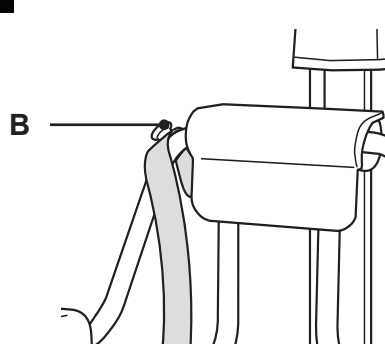

Novietojiet drošības siksnu pacienta priekšpusē, piestipriniet to pogai (B).


Drošības siksnas noregulēšana

1

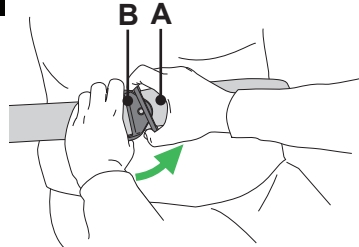


Savelciet kopā stiprinājuma sprādzes (A) un (B), nedaudz pavelkot uz augšu mazo stiprinājuma sprādzi (A).

2

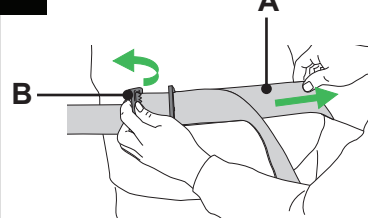

Atlaist vaļīgāk drošības siksnu: pavelciet iekšējo siksnu (A) uz sāniem un vienlaikus paceliet uz augšu lielo stiprinājuma sprādzi (B).


3

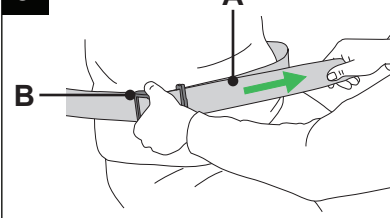


Pievilkt ciešāk drošības siksnu: pavelciet ārējo siksnu (A) uz sāniem un vienlaikus paceliet uz augšu lielo stiprinājuma sprādzi (B).

Drošības siksnas noņemšana

4

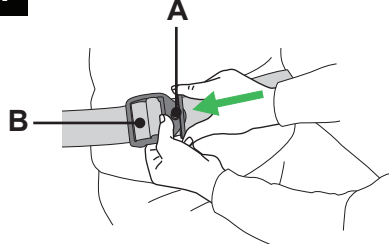

Saslēdziet kopā stiprinājuma sprādzes, ievietojot mazāko stiprinājuma sprādzi (A) lielākajā stiprinājuma sprādzē (B).

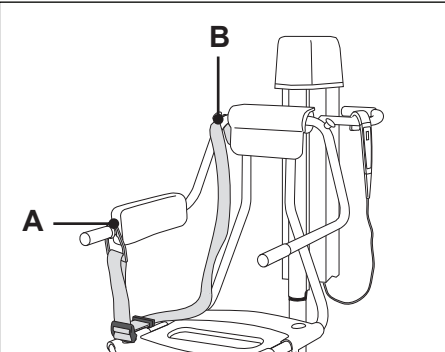

Atbrīvojiet drošības siksnu un izņemiet laukā vienu siksnas galu no pārvietošanas roktura (A) vai arī no pogas (B).