





Nødstop

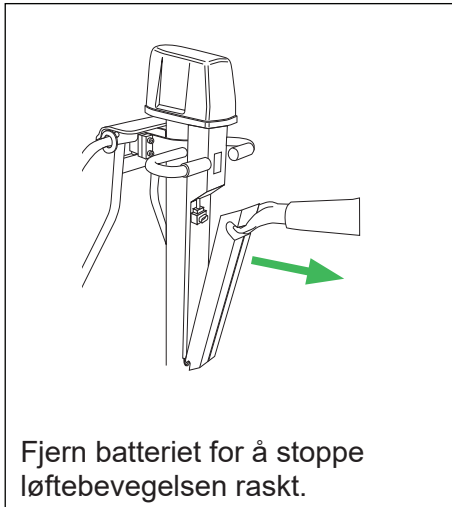

Nødløfting og -senking

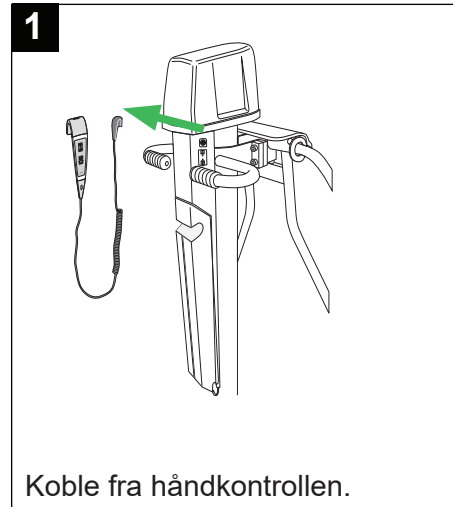


Manuell heving og senking

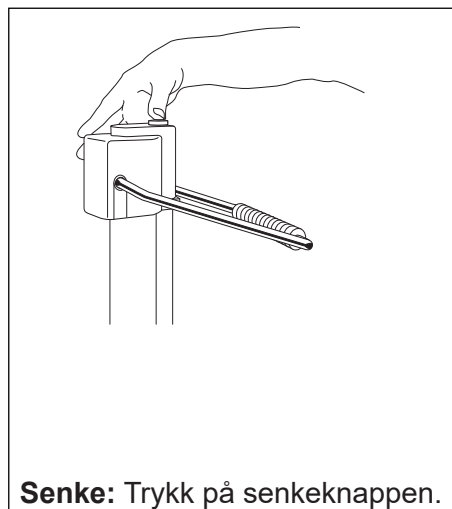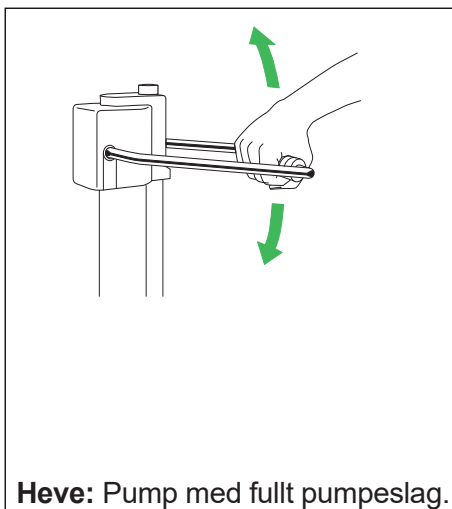

Elektrisk løfting og senking




Bremser

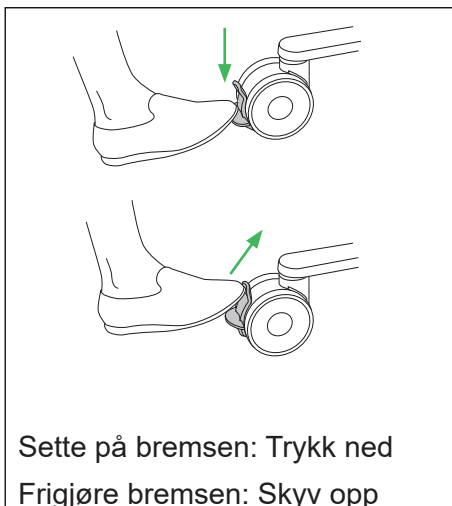

Håndstøtte og ryggstøtte




Fjerne setet

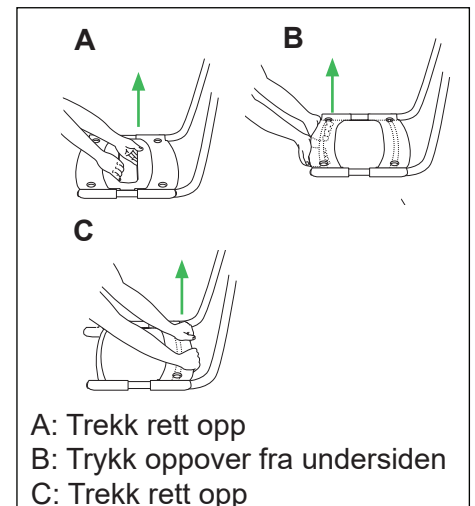


Fest sikkerhetsbeltet

1

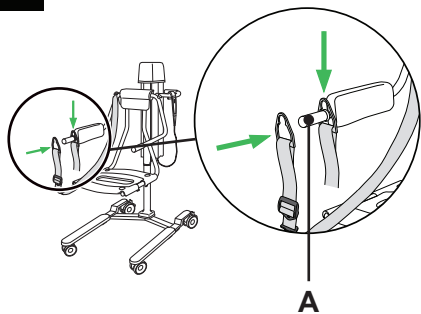


Fest sikkerhetsbeltet til forflytningshåndtaket (A). Trykk ned for å låse det.

2

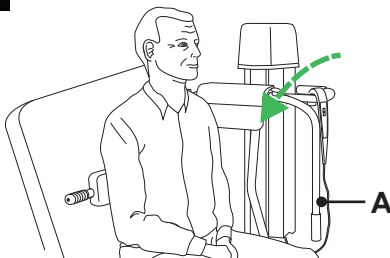

Fell opp håndstøtten (A). Plasser pasienten. Fell ned håndstøtten (A).


3

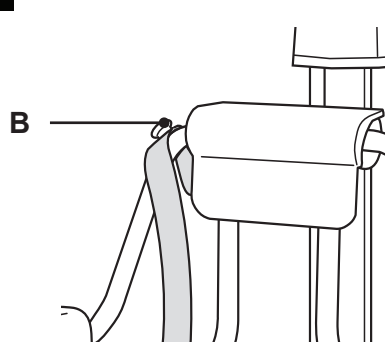

Legg sikkerhetsbeltet foran pasienten og fest det til knappen (B).


Juster sikkerhetsbeltet

1

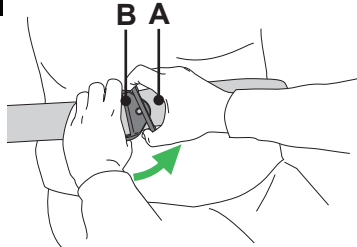


Trekk festeklemme (A) og (B) fra hverandre ved å vri de små festeklipsene (A) litt oppover.

2

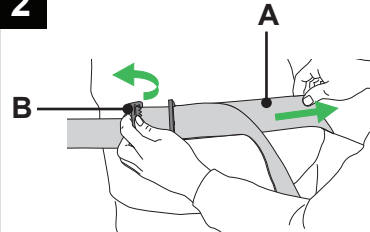

Løsne sikkerhetsbeltet: Trekk i den innvendige remmen (A) på siden samtidig som du løfter den store festeklemmen (B).


3

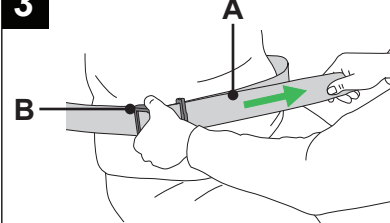


Stram sikkerhetsbeltet: Trekk i den utvendige remmen (A) på siden samtidig som du holder den store festeklemmen (B).

Fjern sikkerhetsbeltet

4

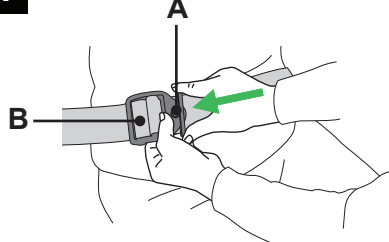

Lås festeklemmene ved å sette den lille festeklemmen (A) inn i den store festeklemmen (B).

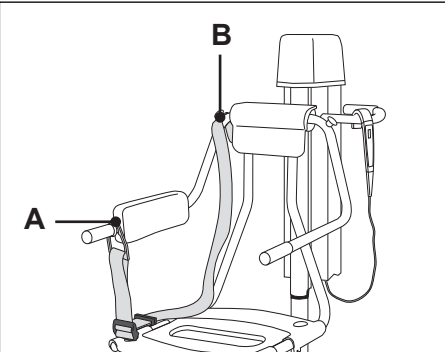

Løsne sikkerhetsbeltet og fjern én av endene fra forflytningshåndtaket (A) eller knotten (B).