



Hätäpysäytys

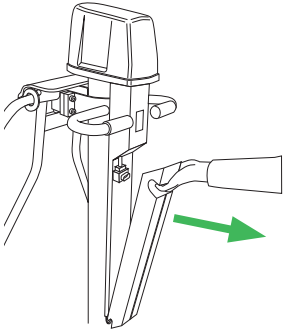

Voit pysäyttää nostimen liikkeen nopeasti irrottamalla akun.


Hätänosto ja -lasku

1

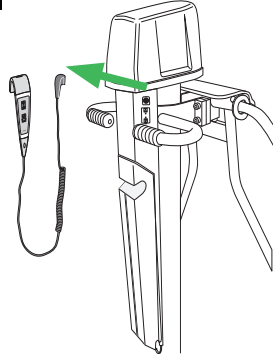

Irrota käsiohjain.

2

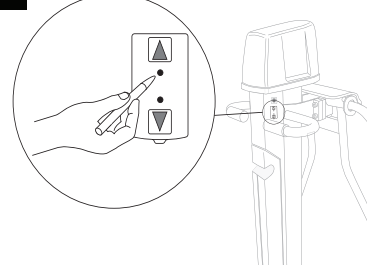


Paina tylpällä esineellä.


Nosto: paina ylöspäin osoittavan nuolen vieressä olevaa reikää.

Lasku: paina alaspäin osoittavan nuolen vieressä olevaa reikää.

Manuaalinen nostaminen ja laskeminen

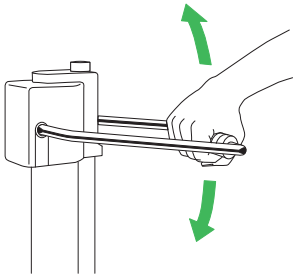


Nosto: pumpppaa käyttäen varren koko liikealuetta.

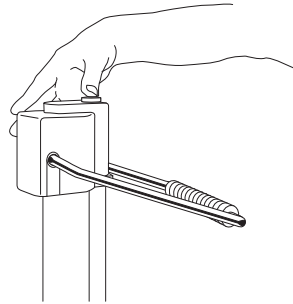

Lasku: paina laskupainiketta.


Sähkötoiminen nostaminen ja laskeminen

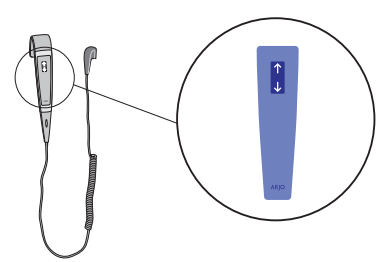

Nosto: paina ylöspäin osoittavaa nuolta.


Lasku: paina alaspäin osoittavaa nuolta.

Jarrut

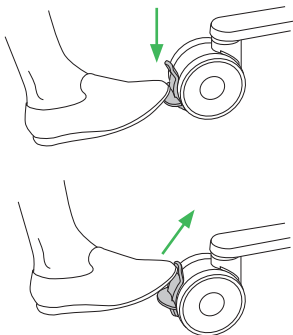


Jarrun kytkeminen: paina alaspäin
Jarrun vapauttaminen: työnnä ylöspäin

Käsi- ja selkänöja

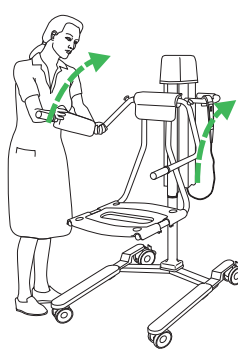

Taita käsi- ja selkänöja ylös nostamalla.

Istuimen irrottaminen

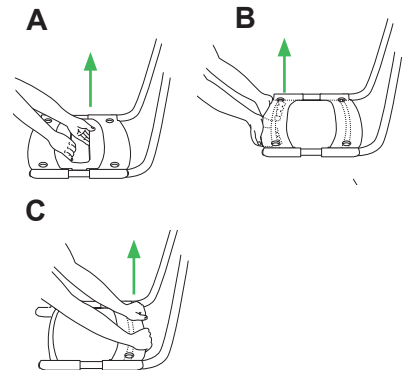


A: Vedä suoraan ylöspäin

B: Paina ylöspäin alta

C: Vedä suoraan ylöspäin


Kiinnitä turvavyö

1

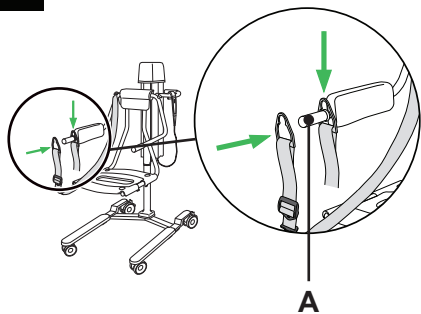


Kiinnitä turvavyö siirtokahvaan (A).
Lukitse se painamalla alaspäin.

2

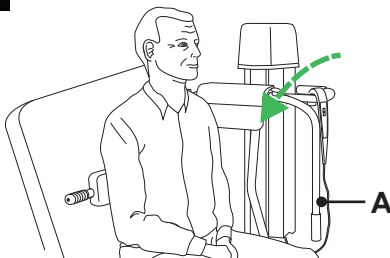

Käännä käsinoja (A) ylös.
Aseta potilas.
Käännä käsinoja (A) alas.


3

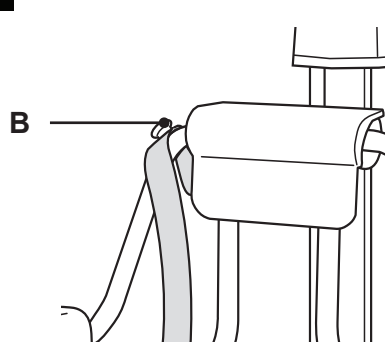

Aseta turvavyö potilaan eteen,
kiinnitä se nuppiin (B).


Säädä turvavyö

1

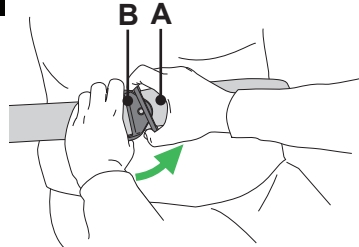


Vedä kiinnikkeet (A) ja (B)
erilleen kääntämällä pienempää
kiinnikettä (A) hieman ylöspäin.

2

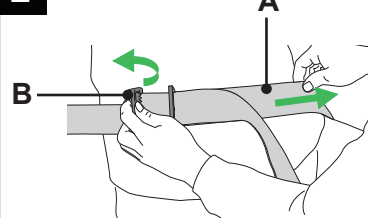

Turvavyön löysentäminen:
vedä sisempää hihnaa (A)
sivulta ja nosta samalla
suurempaa kiinnikettä (B).


3

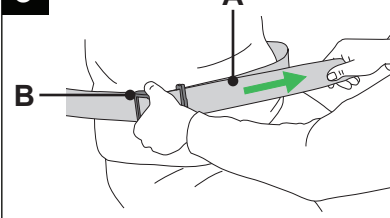


Turvavyön kiristäminen:
vedä ulompaa hihnaa (A)
sivulta ja pidä samalla kiinni
suuremmasta kiinnikkeestä (B).

Turvavyön irrottaminen

4

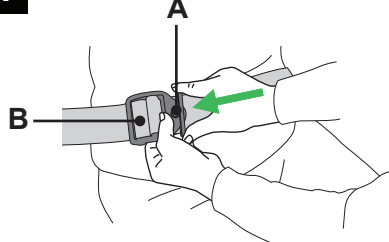

Lukitse kiinnikkeet työntämällä
pienempi kiinnike (A) suuremman
kiinnikkeen (B) sisään.

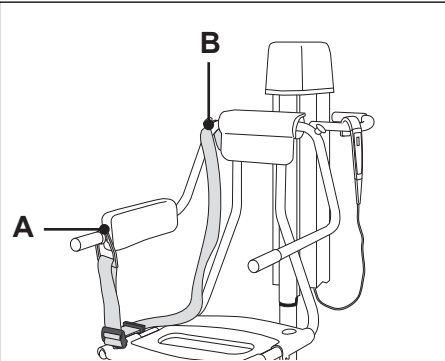

Löysää turvavyötä ja irrota
toinen sen päistä siirtokahvasta
(A) tai nupista (B).