




## Oprirea de urgență

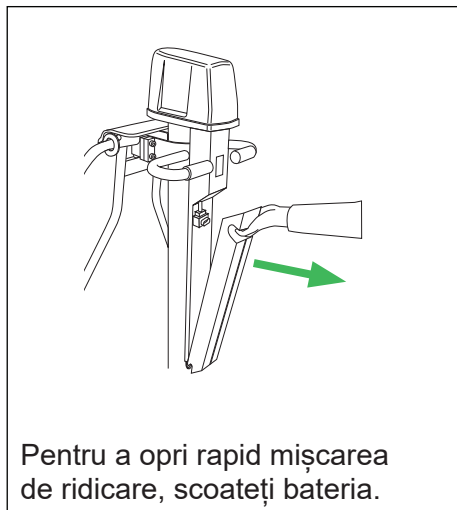


## Ridicarea și coborârea de urgență

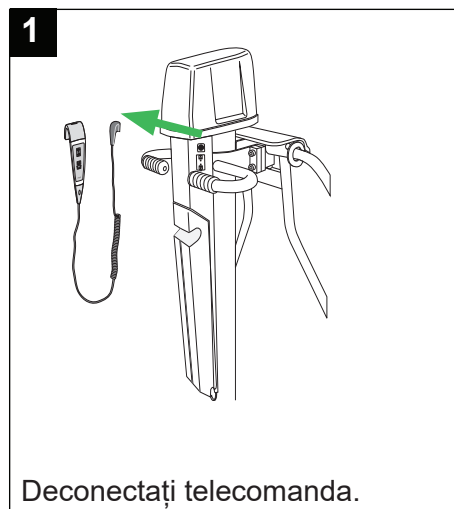


## Ridicarea și coborârea realizate manual

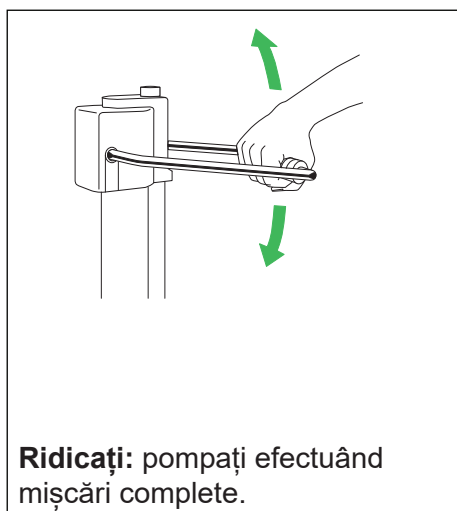


## Ridicarea și coborârea realizate electric

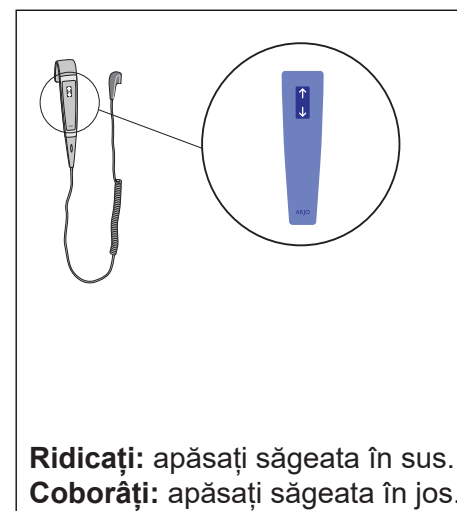


## Frânele

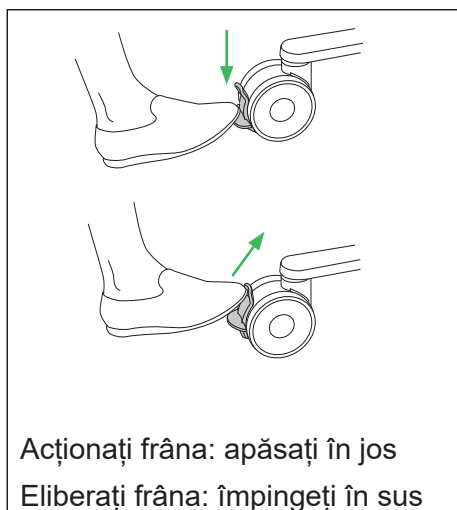

## Suportul pentru mâini și spătarul

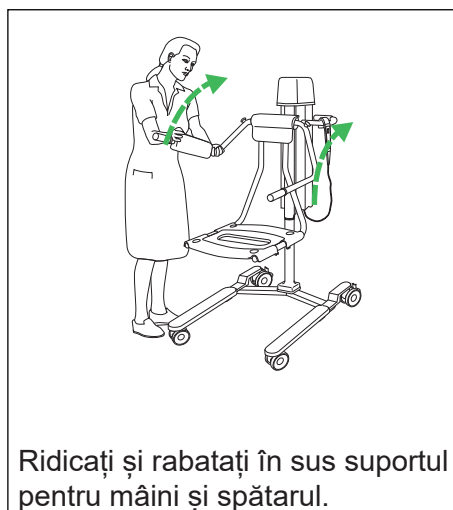


## Demontarea scaunului

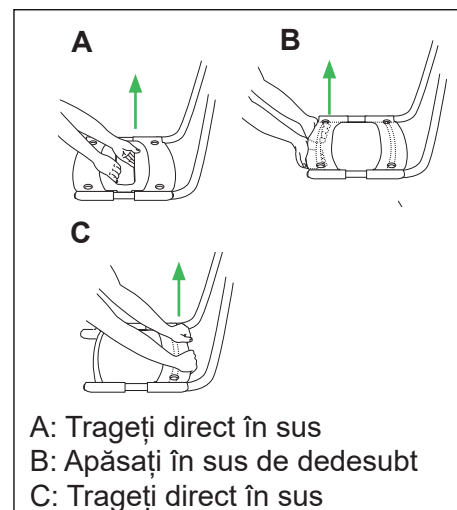


## Atașarea centurii de siguranță

1

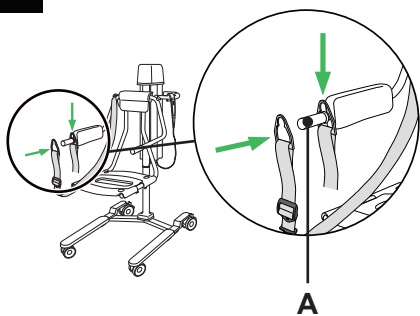


Prindeți centura de siguranță de mânerul pentru transfer (A) Apăsați în jos pentru a fixa.

2

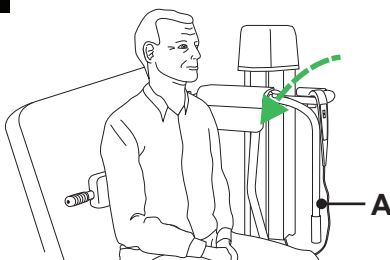

Rabatați în sus suportul pentru mâini (A). Poziționați pacientul. Rabatați în jos suportul pentru mâini (A).


3

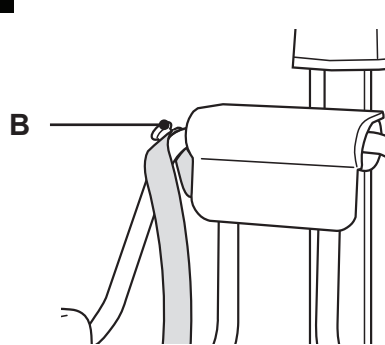

Așezați centura de siguranță în fața pacientului și prindeți-o de buton (B).


## Reglarea centurii de siguranță

1

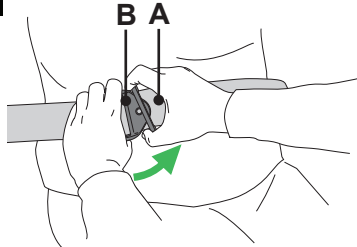


Desfaceți clemele de prindere (A) și (B) răsucind ușor în sus clema mică de prindere (A).

2

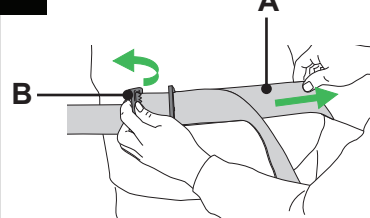

**Slăbiți centura de siguranță:** trageți de cureaua interioară (A) de pe lateral, ridicând în același timp clema mare de prindere (B).


3

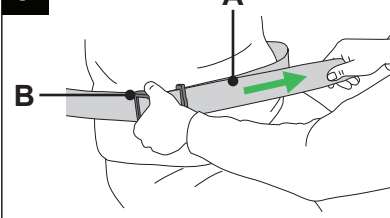


**Strângeți centura de siguranță:** trageți de cureaua exterioară (A) de pe lateral, ținând în același timp clema mare de prindere (B).

## Scoaterea centurii de siguranță

4

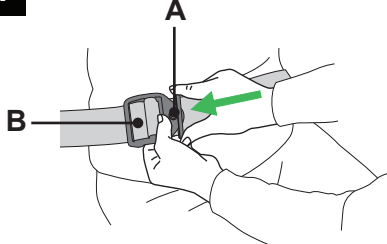

Blocați clemele de prindere introducând clema mică (A) în clema mare (B).

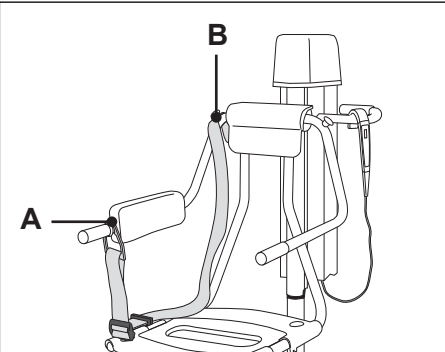

Slăbiți centura de siguranță și desfaceți unul dintre capete, fie de pe mânerul pentru transfer (A), fie de la buton (B).