



Noodstop

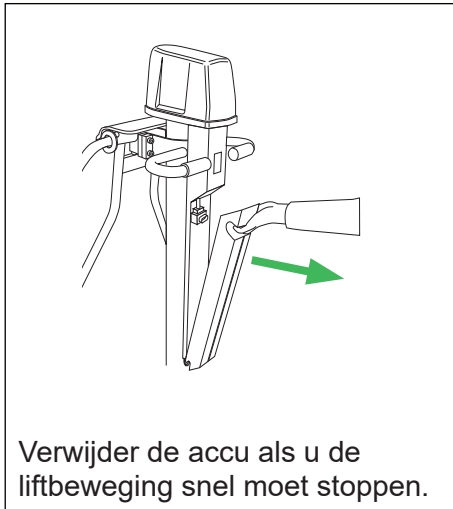

Omhoog en omlaag in noodsituaties

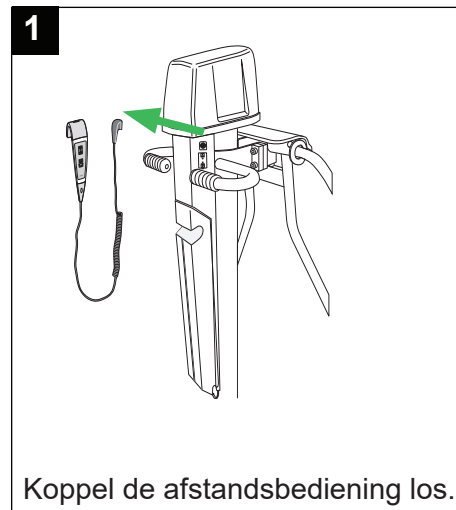


Handmatig omhoog- en omlaagbrengen



Elektrisch omhoog- en omlaagbrengen




Remmen

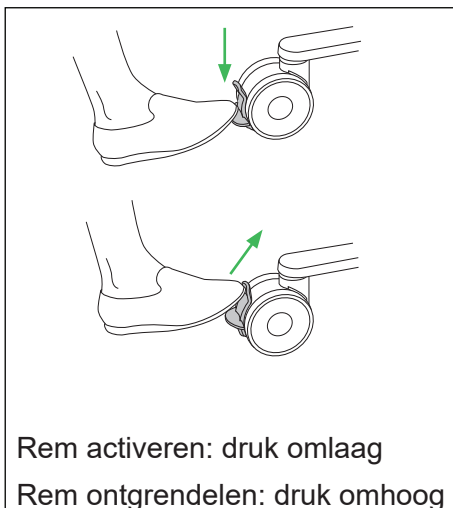

Handsteun en rugsteun




Zitting verwijderen

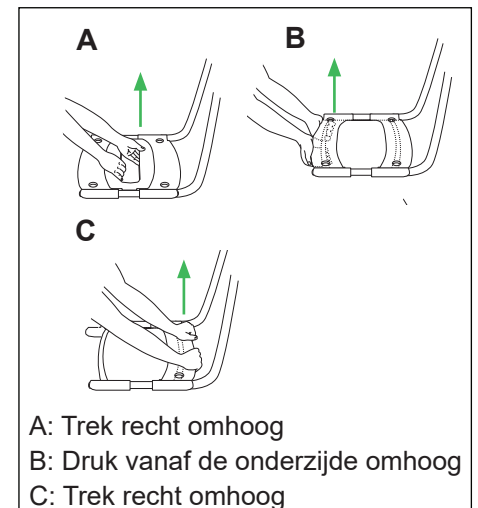


De veiligheidsriem bevestigen

1

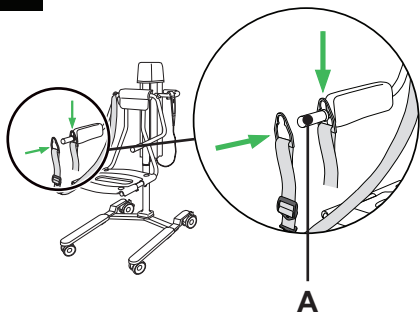


Bevestig de veiligheidsriem aan de transferhendel (A). Druk omlaag om te vergrendelen.

2

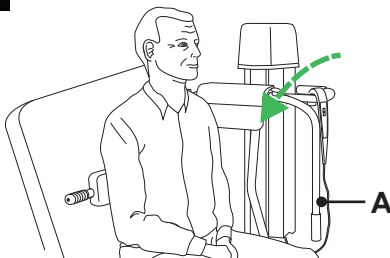

Klap de handsteun omhoog (A). Positioneer de zorgvrager. Klap de handsteun omlaag (A).


3

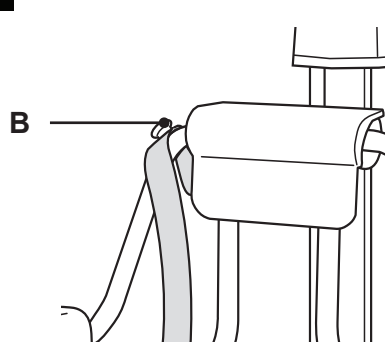

Plaats de veiligheidsriem vóór de zorgvrager en bevestig hem aan de knop (B).


De veiligheidsriem afstellen

1

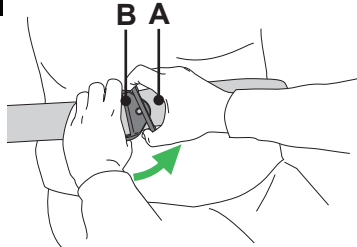


Trek de bevestigingsclips (A) en (B) uit elkaar door de kleinere bevestigingsclip (A) iets naar boven te draaien.

2

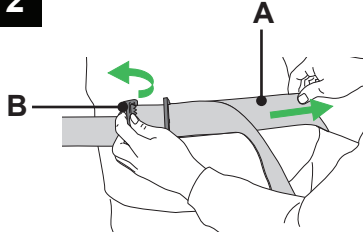

De veiligheidsriem losser zetten: trek de binnenste band (A) naar de zijkant en licht tegelijkertijd de grotere bevestigingsclip (B) op.


3

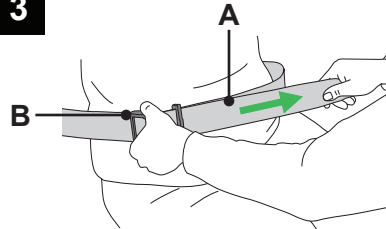


De veiligheidsriem strakker zetten: trek de buitenste band (A) naar de zijkant terwijl u de grotere bevestigingsclip (B) vasthoudt.

De veiligheidsriem verwijderen

4

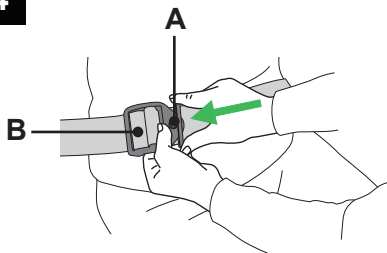

Sluit de bevestigingsclips door de kleinere bevestigingsclip (A) in de grotere bevestigingsclip (B) te steken.

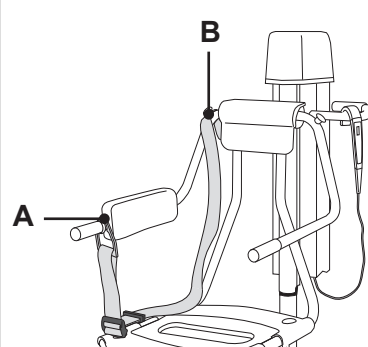

Zet de veiligheidsriem losser en verwijder een van de uiteinden van de transferhendel (A) of de knop (B).