

시스템 2000



자동채우기

자동채우기 켜짐/꺼짐 버튼




P300 P220


채우기는 사전 설정된 수위에서 자동으로 중단됩니다.

자동 채우기 버튼을 눌러 언제든지 채우기를 중단하십시오.

샤워 버튼 및 샤워기 손잡이

샤워기 켜짐/꺼짐 버튼



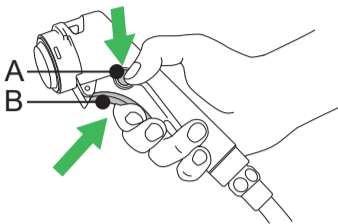


잠금 버튼(A)은 유량을 잠급니다.

트리거(B)로 유량을 조정하고 잠금 해제합니다.


P300 디스플레이



욕조에 물이 없습니다.
활성화된 기능이 없습니다.

물의 온도:
물이 채워지는 상태, 샤워기 또는 채워진 욕조.


P300은 세 개의 자동채우기 수위를 가지고 있습니다.
사전 설정 수위는 정상입니다.



자동채우기 정상 수위 자동채우기 낮은 수위 자동채우기 높은 수위

수위를 변경하려면:
자동채우기가 시작된 후 (-) 또는 (+)를 8초 이내에 누르십시오.

화상 방지




45 °C
(113 °F)

화상 방지 기능이 활성화된 경우 환자를 안전하게 욕조에서 옮깁니다.


화상 방지 기능으로 10초 내에 물을 차단합니다.

P300




본 디스플레이에 네 개의 대시가 표시되고 경보음이 울립니다.
이 때 혼합기는 자동으로 재교정됩니다.

P220



모든 LED가 깜빡이고 경보음이 울립니다.

P220 디스플레이



물의 온도:
물이 채워지는 상태, 샤워기 또는 채워진 욕조.

Hydromassage 또는 Hydrosound(옵션 기능)

Hydromassage 또는 Hydrosound 켜짐/꺼짐 버튼



P300 P220

강도 수위 조절

수중마사지



Hydrosound


P300




P220



Sound & Vision 시스템(옵션 기능)

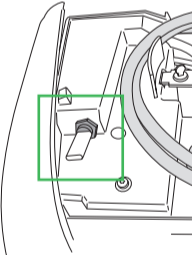


USB 커넥터는 컨트롤 패널 뒷개 아래에 있습니다.

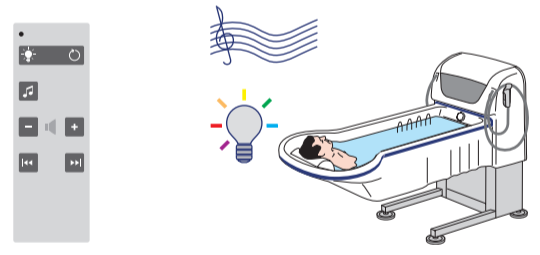


핸드셋 제어장치를 사용해 소리와 빛을 조정하십시오.

소독 장치(옵션 기능)


소독 켜짐/꺼짐 버튼



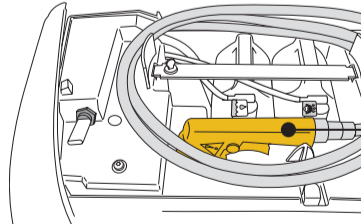


소독제 용기가 비어있을 때 깜빡입니다.(P300만 해당)

소독 장치는 컨트롤 패널 뒷개 아래에 있습니다.
소독 스프레이 손잡이(A)

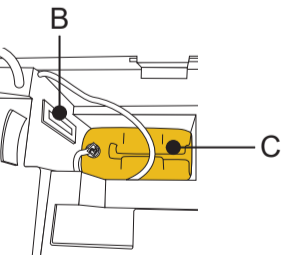

유량계(B)
소독제 용기(C)
(샴푸/목욕 오일 아래)



소독 혼합 비율을 다음과 같이 정하십시오.
소독제를 욕조에 분사합니다.
유량계에 표시된 혼합 비율이 올바른지 확인하십시오.
필요한 경우 흡입 호스의 노브를 조정하십시오.

