

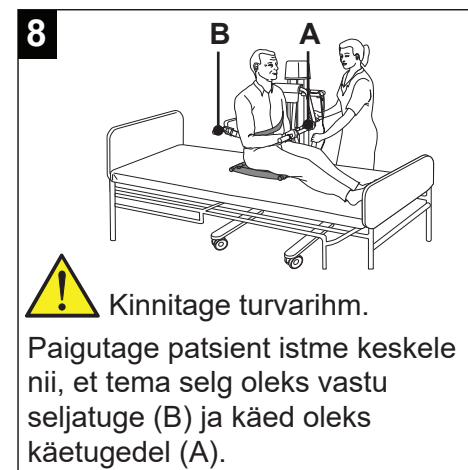
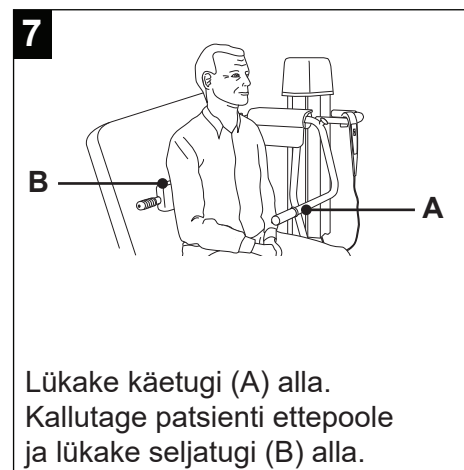
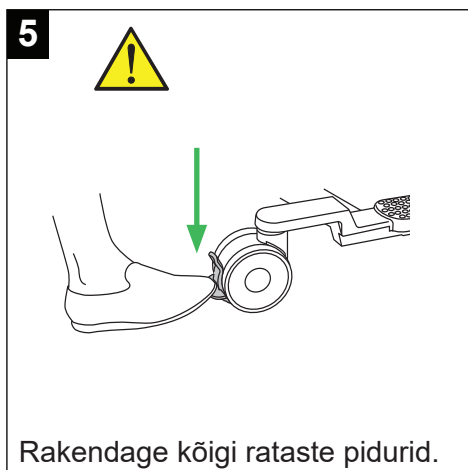
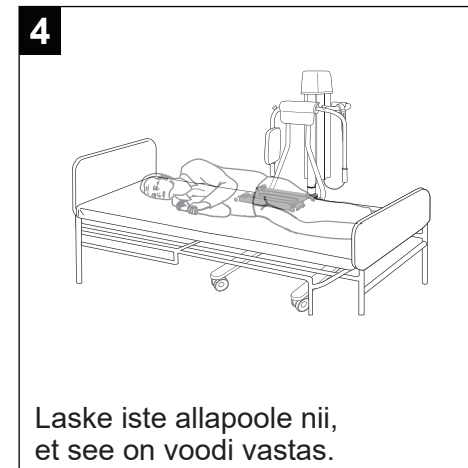
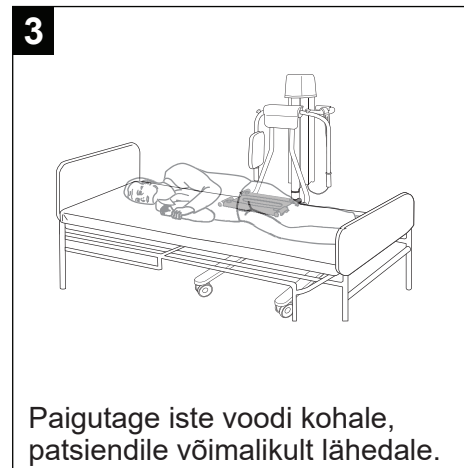
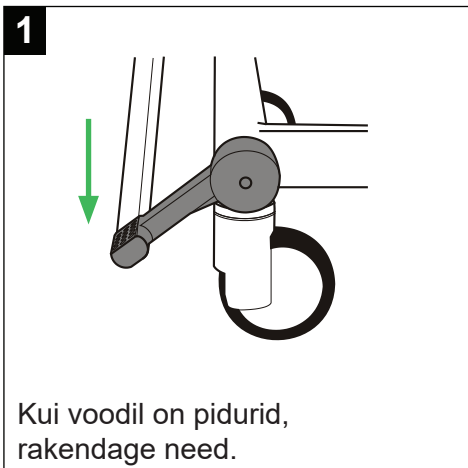





Calypso

Voodist tõstmine

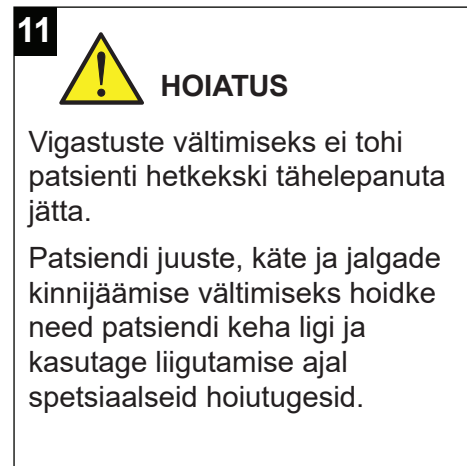


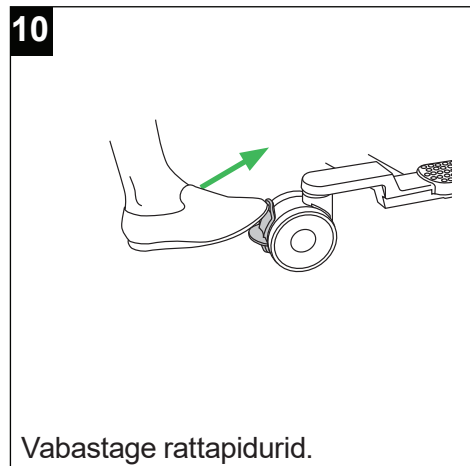

Voodisse tõstmine

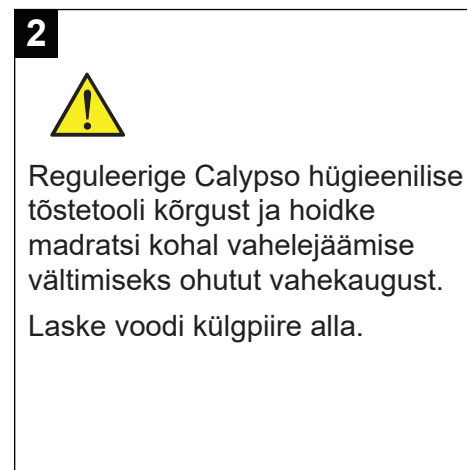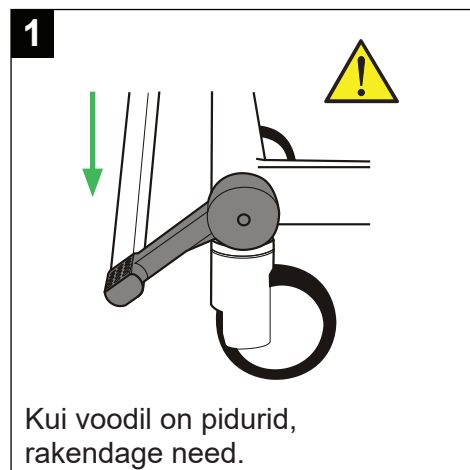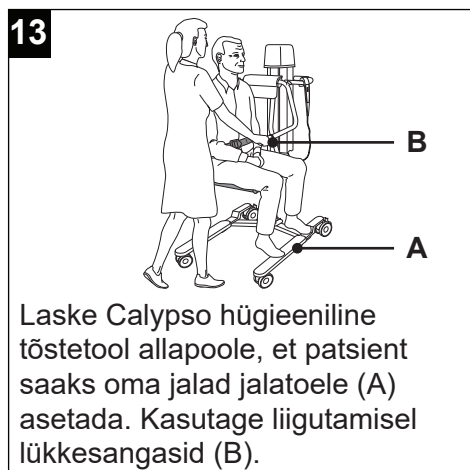

4

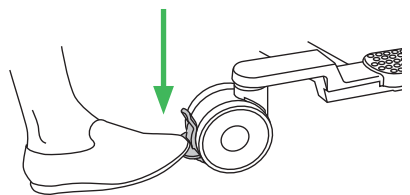

Rakendage kõigi rataste pidurid.


5




Vältige kehaosade vahele jäämist.

Laske Calypso hügieeniline tõstetool allapoole, nii et see on kindlalt vastu voodit.

Vajaduse korral tõstke päitsit.

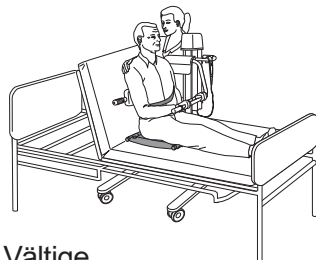


6

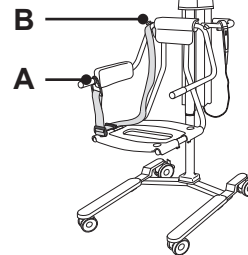

Lõdvendage turvarihma ja eemaldage selle üks ots kas lükkesanga (A) või nupu (B) küljest.


7

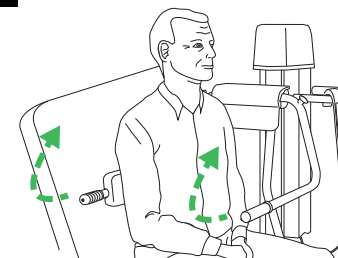

Lükake selja- ja käetugi üles.


Aidake patsiendil voodile toetuda.

8

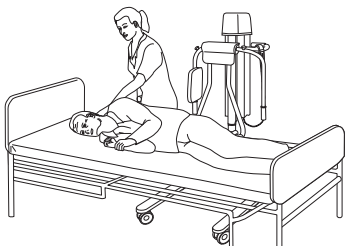


Vajaduse korral laske päitsit alla. Keerake patsient külili, seljaga Calypso hügieenilise tõstetooli poole.

9

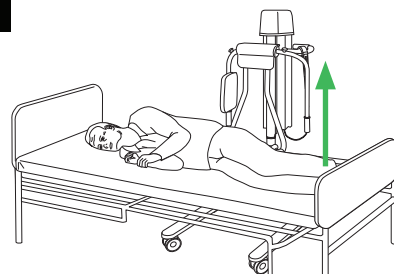

Tõstke Calypso hügieenilise tõstetooli iste piisavalt kõrgele, et seda saaks voodi juurest eemale nihutada.

10

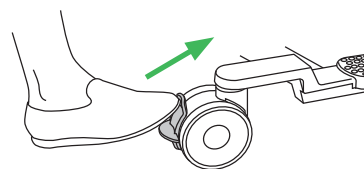

Vabastage rattapidurid.

11

Tõmmake Calypso hügieeniline tõstetool voodist eemale.

Keerake patsient selili.

Keerake voodi külgsuuna üles.

Ümberpaigutamine ratastoolist

1

MÄRKUS

Patsiendi viimiseks ratastoolist Calypso hügieenilisse tõstetooli peab ta olema piisavalt tugev, et liikuda küljele, ja/või olema võimeline püsti tõusma.

2




Rakendage ratastoolil pidurid.

Pange Calypso hügieeniline tõstetool ratastooli kõrvale.

3


Reguleerige Calypso hügieenilist tõstetooli nii, et iste jääks ratastooli istmest veidi kõrgemale. Võimaluse korral katke ratastooli iste.

4

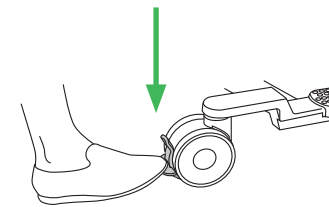


Rakendage Calypso hügieenilise tõstetooli pidurid.

5

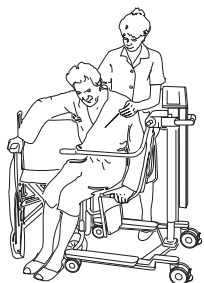


Aidake patsient viia Calypso hügieenilisse tõstetooli.

6

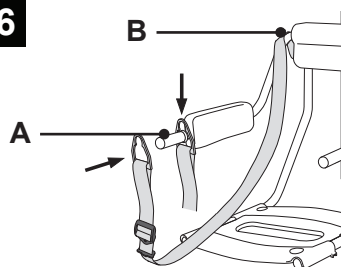

Kinnitage turvarihm lütkesanga (A) külge.
Asetage turvarihma teine ots nupu (A) külge.

7

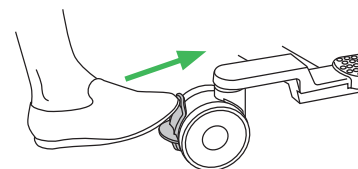

Vabastage Calypso hügieenilise tõstetooli pidurid.

8



Hoidke liikumise ajal lütkesangadest.


Ümberpaigutamine ratastooli

1

MÄRKUS

Patsiendi Calypso hügieenilisest tõstetoolist ära viimiseks peab ta olema piisavalt tugev, et liikuda küljele, ja/või olema võimeline püsti tõusma.

2

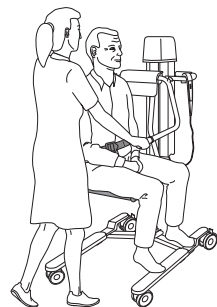

Veenduge, et patsiendi jalad oleks jalatugedel ja tema käed käetugedel.

3



Rakendage ratastoolil pidurid.


Eemaldage ratastooli käetugi ja tõstke ratastooli jalatoed üles.

Pange Calypso hügieeniline tõstetool ratastooli kõrvale.

4


Reguleerige Calypso hügieenilist tõstetooli nii, et iste jääks ratastooli istmest veidi kõrgemale. Võimaluse korral katke ratastooli iste.

5

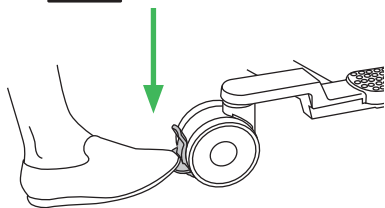


Rakendage Calypso hügieenilise tõstetooli pidurid.

6

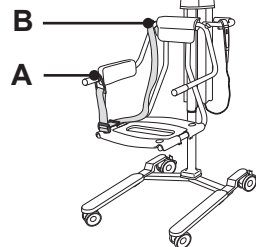

Eemaldage turvarihm, lõdvendades seda ja eemaldades selle ühe otsa kas lükkesanga (A) või nupu (B) küljest.

7

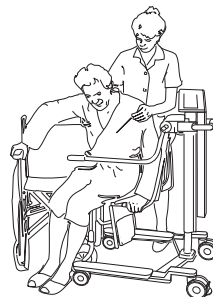

Aidake patsient viia ratastooli.

8

Veenduge, et patsient istuks mugavalt ja ohutult.

Patsiendi vannitamine

1



HOIATUS


Arvestage langetamise ajal liikumatute esemetega.

Hoidke patsiendi käed ja jalad keha lähedal.

Veenduge, et turvarihm oleks korralikult kinnitatud.

Veenduge, et te ei jäta patsienti hetkekski tähelepanuta.


2

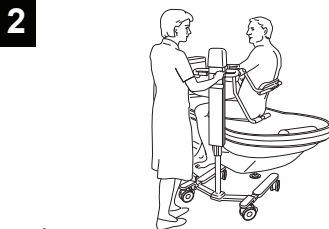

Vältige kehaosade kinnijäämist.

Vanniserva vabastamiseks tõstke Calypso hügieeniline tõstetool üles. Viige patsient üle vanni.

3

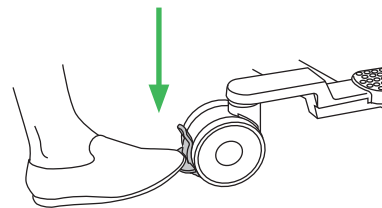

Rakendage Calypso hügieenilise tõstetooli pidurid.

4



Tõstke vann mugavale kõrgusele.

5




Laske Calypso hügieeniline tõstetool allapoole, nii et see on kindlalt vanni põhja vastas. Eemaldage turvarihm.

6




Tõmmake käetugi ettepoole. Kallutage seljatuge veidi taha. Vannitage patsienti.

7

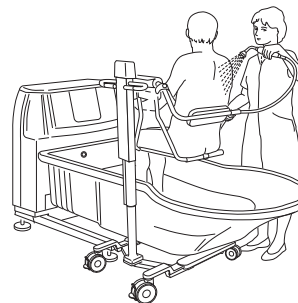

Laske käetugi alla. Tõstke seljatugi. Kinnitage turvarihm. Dušitage patsienti.

8

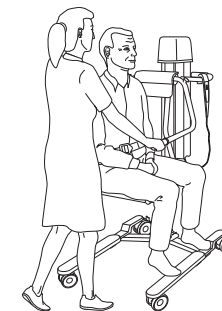

Kuivatage patsient. Katke patsient või pange ta riidesse. Viige patsient tagasi oma tuppa.

