



## Transfert depuis le lit

**1**

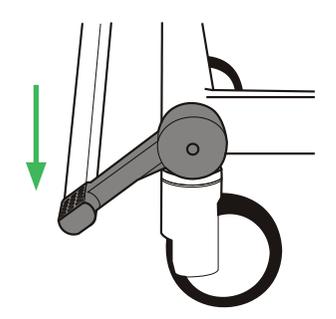


Bloquer les freins du lit, le cas échéant.

**2**

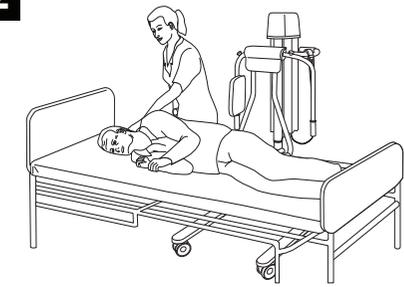


Rabattre la barrière de lit. Tourner le patient sur le côté, tête dirigée vers le côté opposé au fauteuil élévateur d'hygiène Calypso.

**3**

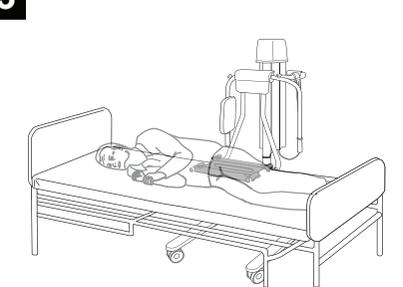


Placer le fauteuil au-dessus du lit, le plus près possible du patient.

**4**

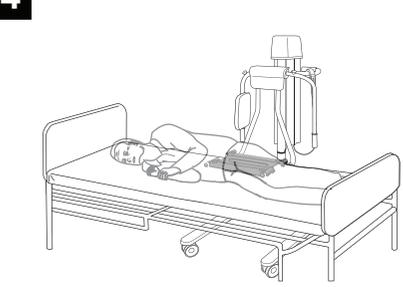


Abaisser le fauteuil de sorte qu'il soit appuyé contre le lit.

**5**

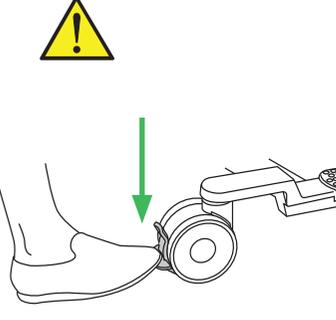


Serrer les freins sur toutes les roulettes.

**6**

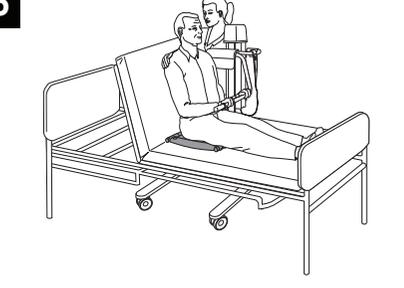


Placer le patient sur le dos. Placer le patient en position assise manuellement ou en remontant le dossier du lit.

**7**

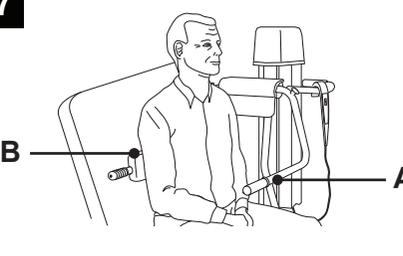



Déplier l'accoudoir (A). Faire pencher le patient vers l'avant et déplier le dossier (B).

**8**



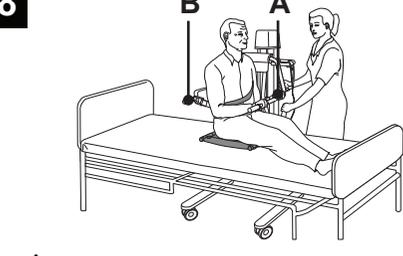








 Attacher la sangle de sécurité.

Placer le patient au centre du fauteuil, le dos contre le dossier (B) et les mains sur l'accoudoir (A).

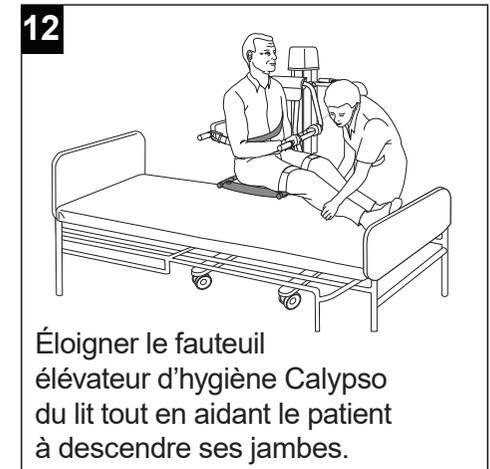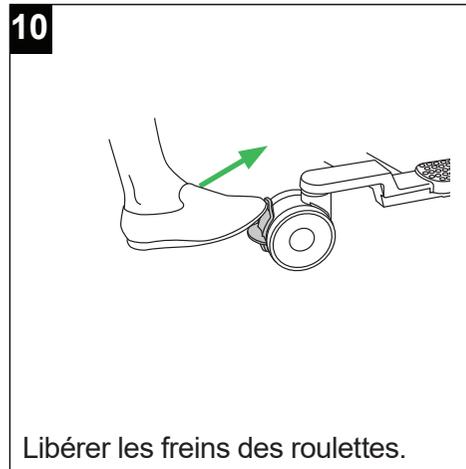

### Transfert dans le lit

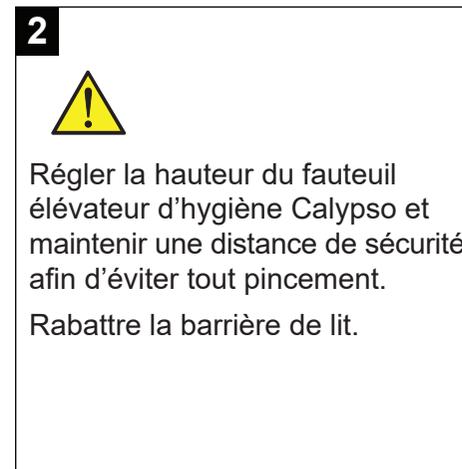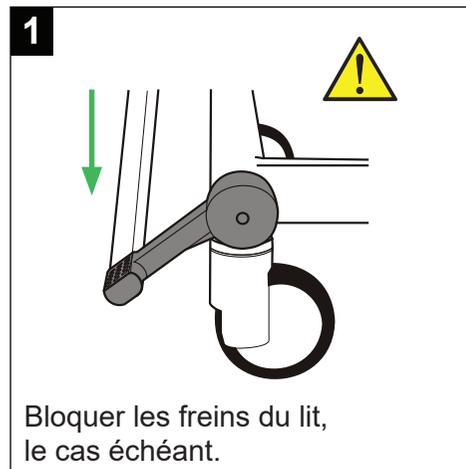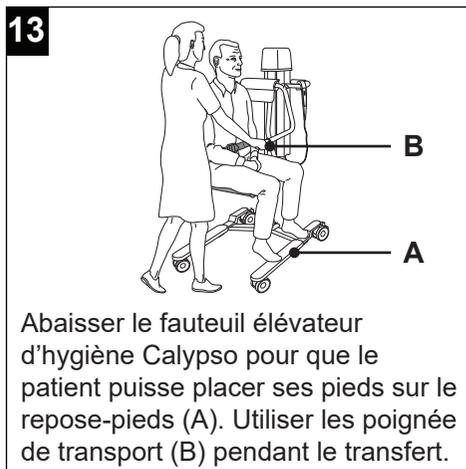

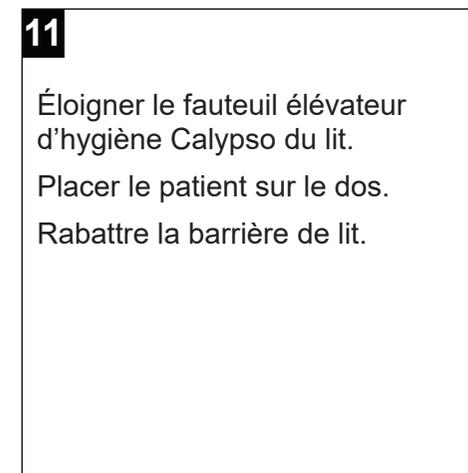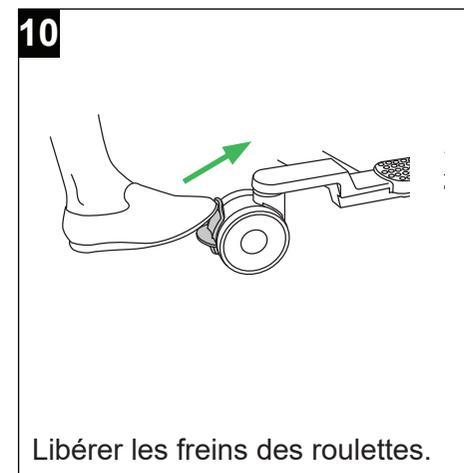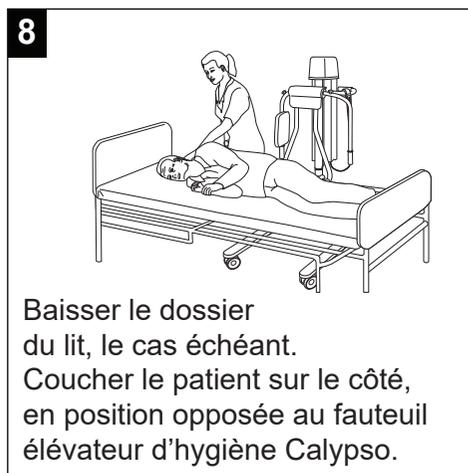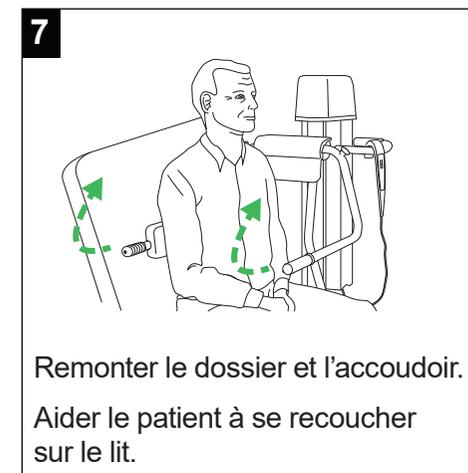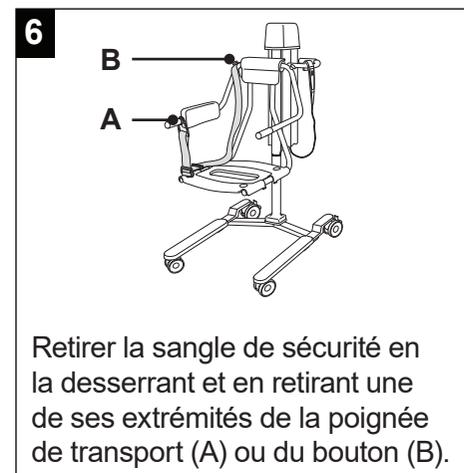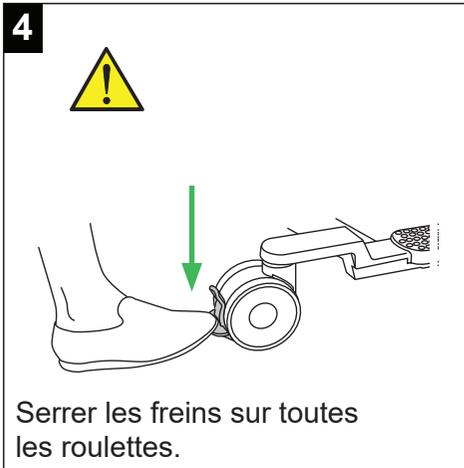

## Transfert depuis le fauteuil roulant

1

### AVERTISSEMENT

Pour qu'un patient soit en mesure de se déplacer depuis un fauteuil roulant vers le fauteuil élévateur d'hygiène Calypso, il doit être suffisamment fort pour se déplacer latéralement ou pour être capable de se mettre debout.

2




Bloquer les freins du fauteuil roulant.

Positionner le fauteuil élévateur d'hygiène Calypso à côté du fauteuil roulant.

3


Régler le fauteuil élévateur d'hygiène Calypso de sorte que le siège se trouve légèrement plus haut que celui du fauteuil roulant. Si possible, chevaucher le siège du fauteuil.

4

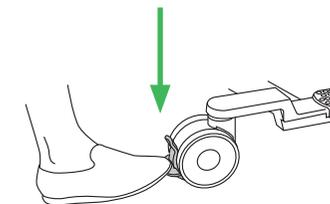


Serrer le frein du fauteuil élévateur d'hygiène Calypso.

5

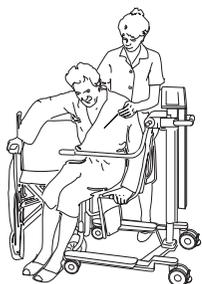


Aider le patient à s'installer dans le fauteuil élévateur d'hygiène Calypso.

6

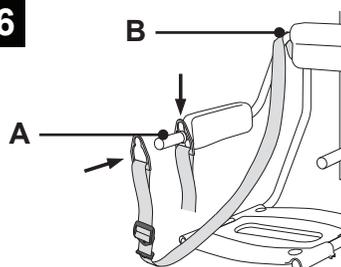

Attacher la sangle de sécurité à la poignée de transport (A). Attacher l'autre extrémité de la sangle de sécurité au bouton (B).

7

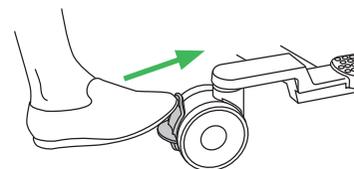

Desserrer le frein du fauteuil élévateur d'hygiène Calypso.

8



Tenir les poignées de transport lors du transfert.

## Transfert vers le fauteuil roulant

1

### AVERTISSEMENT

Pour qu'un patient soit en mesure de se déplacer depuis le fauteuil élévateur d'hygiène Calypso vers un fauteuil roulant, il doit être suffisamment fort pour se déplacer latéralement ou pour être capable de se mettre debout.

2



S'assurer que les pieds du patient se trouvent sur le repose-pieds et ses mains sur l'accoudoir.

3



Bloquer les freins du fauteuil roulant.


Retirer l'accoudoir et plier les repose-pieds du fauteuil roulant.

Positionner le fauteuil élévateur d'hygiène Calypso à côté du fauteuil roulant.

4


Régler le fauteuil élévateur d'hygiène Calypso de sorte que le siège se trouve légèrement plus haut que celui du fauteuil roulant. Si possible, chevaucher le siège du fauteuil.

5

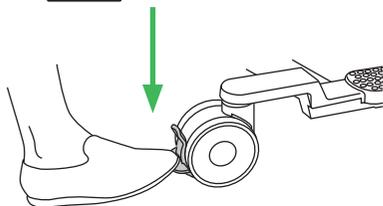


Serrer le frein du fauteuil élévateur d'hygiène Calypso.

6

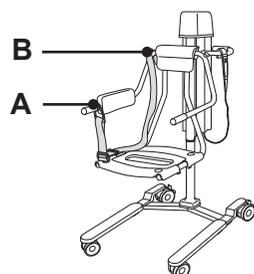

Enlever la sangle de sécurité en la desserrant et en retirant une de ses extrémités de la poignée de transport (A) ou du bouton (B).

7

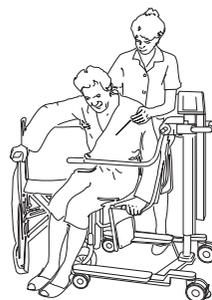

Aider le patient à s'installer dans le fauteuil roulant.

8

S'assurer que le patient est assis confortablement et en toute sécurité dans le fauteuil roulant.

## Aider le patient à prendre le bain

1



### AVERTISSEMENT

Faire attention aux objets fixes lors de la descente.

S'assurer que les bras et les pieds du patient restent bien près du corps.

S'assurer que la sangle de sécurité est correctement attachée.

S'assurer de ne pas laisser le patient sans surveillance.


2



Éviter de coincer une partie du corps.

Lever le fauteuil élévateur d'hygiène Calypso afin de dégager le bord de la baignoire. Déplacer le patient au-dessus de la baignoire.

3

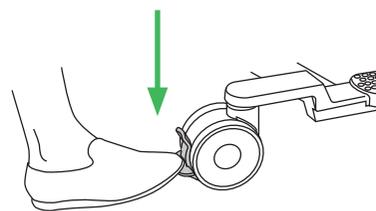

Serrer le frein du fauteuil élévateur d'hygiène Calypso.

4



Lever la baignoire à une hauteur confortable.

5




Abaisser le siège du fauteuil élévateur d'hygiène Calypso de sorte qu'il repose sur le fond de la baignoire. Enlever la sangle de sécurité.

6




Déployer l'accoudoir (A). Incliner légèrement le dossier. Aider le patient à prendre le bain.

7

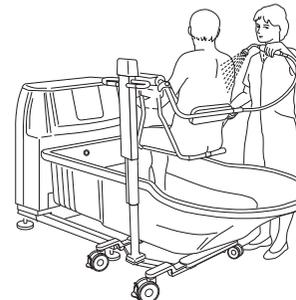

Abaisser l'accoudoir (A). Lever le dossier. Attacher la sangle de sécurité. Aider le patient à se doucher.

8

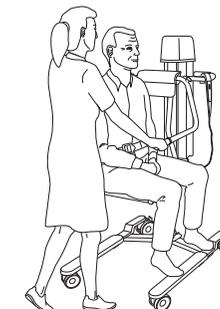

Aider le patient à se sécher. Aider le patient à se couvrir ou à s'habiller. Aider le patient à retourner dans sa chambre.

