


Calypso


Átemelés ágyból

1

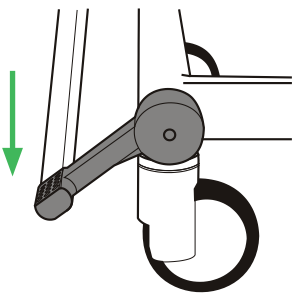


Adott esetben kapcsolja be az ágy fékeit.

2

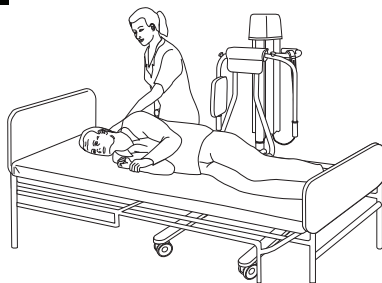


Hajtsa le az ágyrácsot.
Fordítsa oldalra a beteget, háttal a Calypso higiéniai emelőszéknek.

3

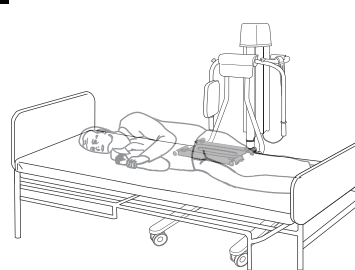


Igazítsa az ülést az ágy fölé, minél közelebb a beteghez.

4

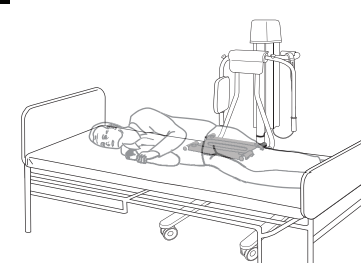


Eressze le az ülést úgy, hogy az ágyhoz nyomódjon.

5

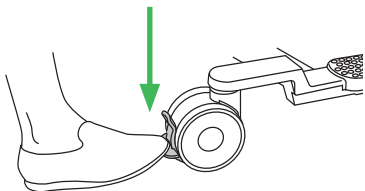


Az összes görgőn kapcsolja be a féket.

6

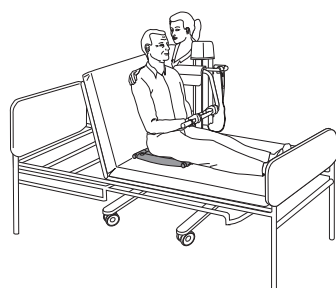

Fordítsa a beteget a hátára.
Ültesse fel a beteget manuálisan vagy az ágy fejszéjének megemelésével.

7

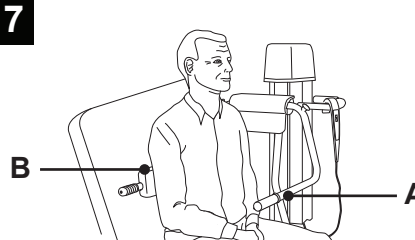

Hajtsa le a kéztámaszt (A).
Döntse előre a beteget, és hajtsa le a háttámlát (B).


8



Csatolja be a biztonsági övet.


Igazítsa a beteget az ülés közepére, döntse a háttámlának (B), és a kezét helyezze a kéztartóra (A).

9

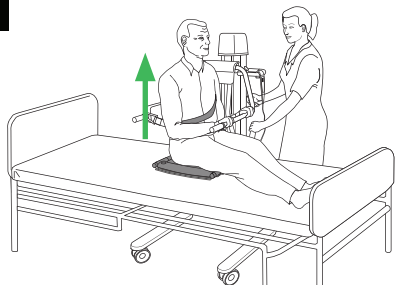

Emelje az ülést olyan magasságba, hogy el lehessen húzni az ágytól.

10

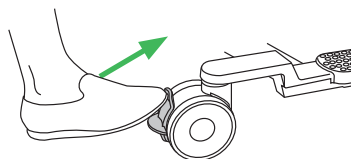

Oldja ki a görgőfékeket.

11




FIGYELMEZTETÉS

A sérülések elkerülése érdekében a beteget soha ne hagyja felügyelet nélkül.

A beakadás elkerülése végett ügyeljen arra, hogy a beteg haja, karja és lába szorosan a teste mellett maradjon, és mozgatás közben használja a megfelelő fogantyúkat.


12

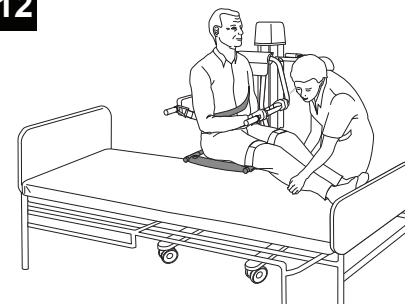

Húzza el a Calypso higiéniai emelőszéket az ágytól, közben segítve a betegnek leemelni a lábát.


Átemelés ágyba

13

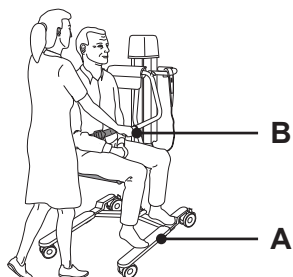

Eressze a Calypso higiéniai emelőszéket olyan magasságba, hogy a beteg rá tudja tenni a lábát a lábtámaszra (A). Átemeléshez a tolófogantyúkat (B) használja.

1

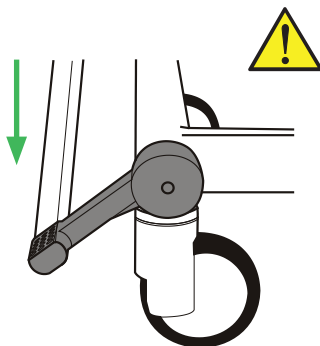

Adott esetben kapcsolja be az ágy fékeit.


2



Állítsa be a Calypso higiéniai emelőszék magasságát úgy, hogy az ülés biztonságos távolságban legyen a matractól a becsípődés megelőzése érdekében.


Hajtsa le az oldalrácsot.

3

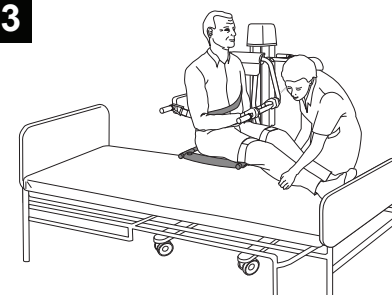


Tolja a Calypso higiéniai emelőszéket az ágy fölé, közben segítve a betegnek az ágyra emelni a lábát.

4

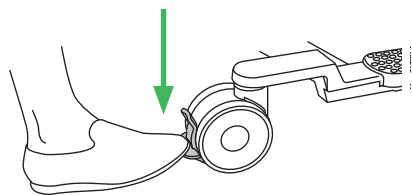

Az összes görgőn kapcsolja be a féket.


5

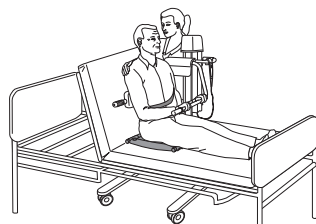

Ügyeljen rá, hogy semmilyen testrészt ne csipjen be.


Stabilan eresse rá az ágyra a Calypso higiéniai emelőszék ülését. Szükség esetén emelje fel a fejszéket.

6

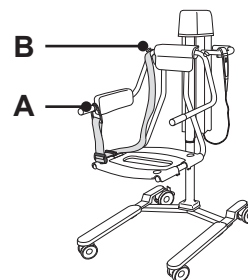

Vegye le a biztonsági övet úgy, hogy meglazítja, és eltávolítja az egyik végét a tolófogantyúról (A) vagy a gombról (B).


7

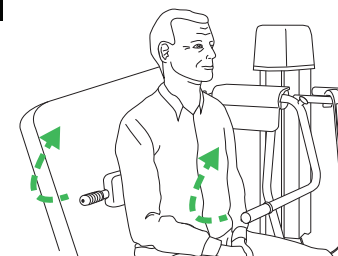

Hajtsa fel a háttámaszt és a kéztámaszt.


Segítsen a betegnek, hogy visszafeküdjön az ágyra.

8

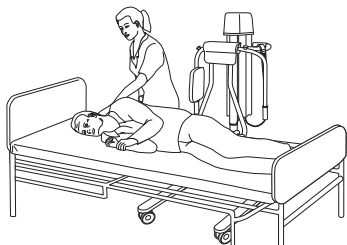


Szükség esetén eresse le a fejszéket. Fektesse a beteget az oldalára, háttal a Calypso higiéniai emelőszéknek.

9

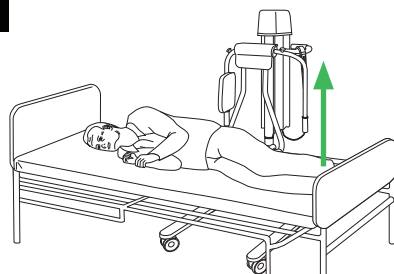

Emelje fel a Calypso higiéniai emelőszék ülését, ezzel elválasztva az ágytól.

10

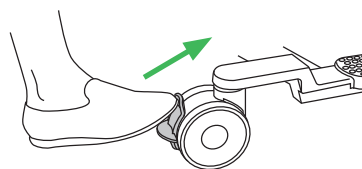

Oldja ki a görgőfékeket.

11

Húzza el a Calypso higiéniai emelőszéket az ágytól. Fordítsa a beteget a hátára. Hajtsa fel az oldalrácsot.

Átemelés kerekesszékből

1

MEGJEGYZÉS

Ahhoz, hogy a beteg át tudjon ülni a kerekesszékből a Calypso higiéniai emelőszékbe, elegendően erősnek kell lennie ahhoz, hogy oldalra húzódjon és/vagy felálljon.

2




Kapcsolja be a kerekesszék fékeit.

Tolja a Calypso higiéniai emelőszéket a kerekesszékhez.

3


Állítsa be a Calypso higiéniai emelőszéket úgy, hogy az ülése valamivel magasabban legyen a kerekesszék ülésénél. Lehetőség szerint legyen átfedésben a kerekesszék ülésével.

4

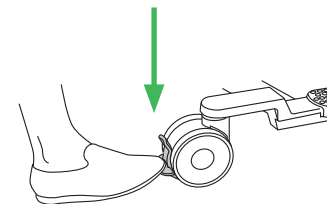


Kapcsolja be a Calypso higiéniai emelőszék fékeit.

5

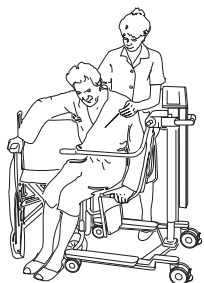


Segítsen a betegnek átülni a Calypso higiéniai emelőszékre.

6

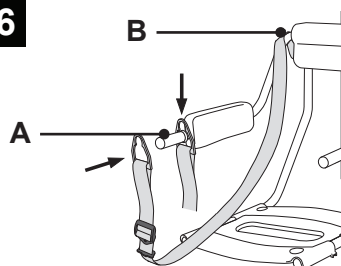


Akassza a biztonsági övet a tolófogantyúra (A). A biztonsági öv másik végét erősítse a gombra (B).

7

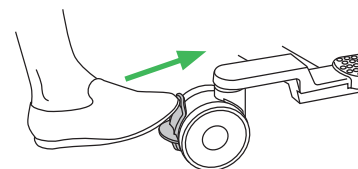

Oldja ki a Calypso higiéniai emelőszék fékeit.

8

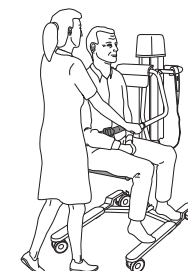

Átemeléskor a tolófogantyúkat fogja.


Átemelés kerekesszékre

1

MEGJEGYZÉS

Ahhoz, hogy a beteg át tudjon ülni a Calypso higiéniai emelőszékből a kerekesszékre, elegendően erősnek kell lennie ahhoz, hogy oldalra húzódjon és/vagy felálljon.

2

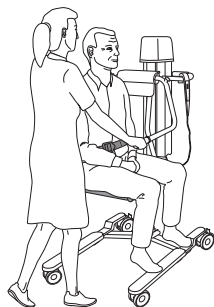

Gondoskodjon róla, hogy a beteg talpa a lábtámaszon, keze a kéztámaszon legyen.

3



Kapcsolja be a kerekesszék fékeit.


Vegye le a kerekesszék kartámaszát, és hajtsa fel a lábtámaszait.

Tolja a Calypso higiéniai emelőszéket a kerekesszékhez.

4


Állítsa be a Calypso higiéniai emelőszéket úgy, hogy az ülése valamivel magasabban legyen a kerekesszék ülésénél. Lehetőség szerint legyen átfedésben a kerekesszék ülésével.

5

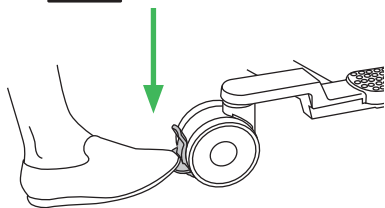


Kapcsolja be a Calypso higiéniai emelőszék fékeit.

6

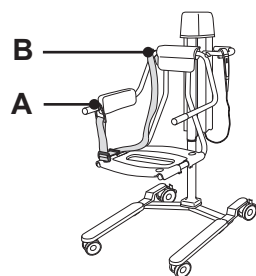

Vegye le a biztonsági övet úgy, hogy meglazítja, és eltávolítja az egyik végét a tolófogantyúról (A) vagy a gombról (B).

7

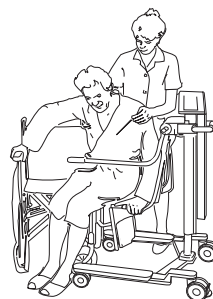

Segítsen a betegnek átülni a kerekesszékre.

8

Gondoskodjon róla, hogy a beteg kényelmesen és biztonságosan üljön a kerekesszékben.

Fürdesse meg a beteget

1



FIGYELMEZTETÉS


Leeresztéskor ügyeljen a rögzített tárgyakra.

A beteg karja és lába a teste közelében legyen.

Ellenőrizze, hogy megfelelően rögzítette-e a biztonsági övet.

A beteget nem szabad felügyelet nélkül hagyni.

2

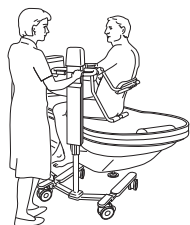


Ügyeljen rá, hogy semmilyen testrész ne szoruljon be.

Emelje le a Calypso higiéniai emelőszék ülését a fürdőkád széléről.

Igazítsa a beteget a fürdőkád fölé.

3

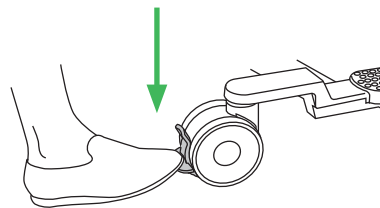

Kapcsolja be a Calypso higiéniai emelőszék fékeit.

4



Emelje a fürdőkádat kényelmes magasságba.

5




Eressze le a Calypso higiéniai emelőszék ülését úgy, hogy a fürdőkád alá támaszkodjon. Távolítsa el a biztonsági övet.

6




Húzza előre a kéztámaszt. Kissé döntse hátra a háttámlát. Fürdesse meg a beteget.

7

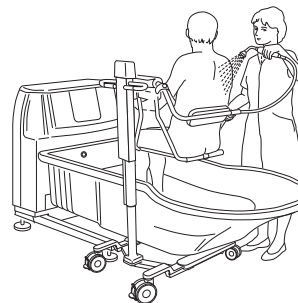

Eressze le a kéztámaszt. Emelje fel a háttámlát. Csatolja be a biztonsági övet. Zuhanyozza le a beteget.

8

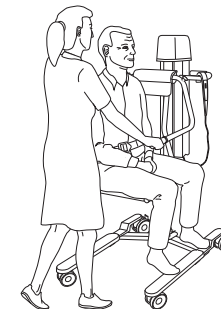

Törölje szárazra a beteget. Takarja le vagy öltöztesse fel a beteget. Vigye vissza a beteget a szobájába.

